

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЧЗП»



С.М. Степанов

«26» марта 2021 г.



КОНТЕЙНЕР ОДНОРАЗОВЫЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ «ЧЗП»

ПО ТУ 32.50.50-002-41224763-2020

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Введена впервые

Дата введения – «16» апреля 2021 г.

1 НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Наименование – Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария и органических отходов «ЧЗП» по ТУ 32.50.50-002-41224763-2020 (в дальнейшем – Контейнер)

Варианты исполнения Контейнера:

1. Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария классов Б, В или Г модель МК-01 «ЧЗП» без ручки, объёмом: 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,65; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,3; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0; 10,5; 10,7; 11,0; 11,4; 11,5; 12,0; 13,9; 15,0; 18,0; 20,0; 33,0; 35,0 л, в составе:

1.1 Корпус – 1 шт.

1.2 Крышка – 1 шт.

1.3 Заглушка – 1 шт.

1.4 Этикетка маркировочная, класс «Б» – 1 шт. (при необходимости).

1.5 Этикетка маркировочная, класс «В» – 1 шт. (при необходимости).

1.6 Этикетка маркировочная, класс «Г» – 1 шт. (при необходимости).

1.7 Инструкция по применению – 1 шт.

2. Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария классов Б, В или Г модель МК-01 «ЧЗП» с пластмассовой или металлической ручкой, объёмом: 0,5; 1,0; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,3; 6,5; 8,5; 9,0; 10,0; 10,5; 10,7; 11,0; 11,4; 11,5; 12,0; 13,9; 15,0; 18,0; 20,0 л, в составе:

2.1 Корпус – 1 шт.

2.2 Крышка – 1 шт.

2.3 Заглушка – 1 шт.

2.4 Этикетка маркировочная, класс «Б» – 1 шт. (при необходимости).

2.5 Этикетка маркировочная, класс «В» – 1 шт. (при необходимости).

2.6 Этикетка маркировочная, класс «Г» – 1 шт. (при необходимости).

2.7 Инструкция по применению – 1 шт.

3. Контейнер одноразовый для сбора органических отходов классов А, Б, В или Г модель МК-02 «ЧЗП» без ручки, объёмом: 0,4; 0,5; 0,6; 0,65; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,3; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0; 10,5; 10,7; 11,0; 11,4; 11,5; 12,0; 13,9; 15,0; 18,0; 20,0; 33,0; 35,0 л, в составе:

3.1 Корпус – 1 шт.

3.2 Крышка – 1 шт.

3.3 Этикетка маркировочная, класс «А» – 1 шт. (при необходимости).

3.4 Этикетка маркировочная, класс «Б» – 1 шт. (при необходимости).

3.5 Этикетка маркировочная, класс «В» – 1 шт. (при необходимости).

3.6 Этикетка маркировочная, класс «Г» – 1 шт. (при необходимости).

3.7 Инструкция по применению – 1 шт.

4. Контейнер одноразовый для сбора органических отходов классов А, Б, В или Г модель МК-02 «ЧЗП» с пластмассовой или металлической ручкой, объёмом: 0,5; 1,0; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,3; 6,5; 8,5; 9,0; 10,0; 10,5; 10,7; 11,0; 11,4; 11,5; 12,0; 13,9; 15,0; 18,0; 20,0 л, в составе:

4.1 Корпус – 1 шт.

4.2 Крышка – 1 шт.

4.3 Этикетка маркировочная, класс «А» – 1 шт. (при необходимости).

4.4 Этикетка маркировочная, класс «Б» – 1 шт. (при необходимости).

4.5 Этикетка маркировочная, класс «В» – 1 шт. (при необходимости).

4.6 Этикетка маркировочная, класс «Г» – 1 шт. (при необходимости).

4.7 Инструкция по применению – 1 шт.

2 СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС» (ООО «ЧЗП»)

Адрес: 422980, Россия, Республика Татарстан, г.Чистополь, ул.Промышленная, зд.27, оф.1

Телефон: +7(843)537-10-46, +7(843)537-10-56

E-mail: z-plast@inbox.ru

3 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»
(ООО «ЧЗП»)

Адрес: 422980, Россия, Республика Татарстан, г.Чистополь, ул.Промышленная, зд.27, оф.1

Телефон: +7(843)537-10-46, +7(843)537-10-56

E-mail: z-plast@inbox.ru

4 НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, УСТАНОВЛЕННОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

Для сбора, хранения, обеззараживания и транспортирования острого инструментария и органических отходов классов А, Б, В, Г.

Контейнер используется медицинским персоналом в реабилитационных, лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

5.1 Технические характеристики

5.1.1 Контейнер соответствует требованиям ТУ 32.50.50-002-41224763-2020 и изготавливается по конструкторской и технологической документацией, утверждённой в установленном порядке, с соблюдением санитарных норм и правил.

5.1.2 Класс в зависимости от потенциального риска применения в медицинских целях – 1 по ГОСТ 31508-2012 и Приказа Минздрава России от 06.06.2012г. № 4н.

5.1.3 Контейнер изготавливается из полипропилена марки 01270, производства ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» или полипропилена марки PP H350 FF/3, производства ООО НПП «НЕФТЕХИМИЯ», окрашенный суперконцентратом пигментов белого, жёлтого, красного или чёрного цвета, производства фирмы ООО «ГЛОБАЛ КОЛОРС».

Ручки изготавливаются из полипропилена марки 01270, производства ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» или полипропилена марки PP H350 FF/3, производства ООО НПП «НЕФТЕХИМИЯ», окрашенный суперконцентратом пигментов белого, жёлтого, красного или чёрного цвета, производства фирмы ООО «ГЛОБАЛ КОЛОРС» или из проволоки металлической по ГОСТ 3282-74 диаметром 3,5-4 мм или по ГОСТ 17305-91 диаметром 3-5 мм.

5.1.4 Объём, масса, габаритные и основные размеры контейнера соответствуют значениям, указанным в таблицах 1, 2. Допускается отклонения по размерам, массе и объёму контейнеров в пределах $\pm 8\%$ от номинальных значений указанных в таблицах.

5.1.5 Поверхность контейнера чистая, гладкая, без пузырей, трещин и сколов. Выпуклые следы после отрезки литника и облой зачищены заподлицо.

5.1.6 Собранный контейнер герметичен.

5.1.7 Контейнер выдерживает не менее двух падений без разрушения и течи при испытании на удар при свободном падении с высоты 0,8 м.

5.1.8 Контейнер МК-01 «ЧЗП» плотно закрывается крышкой с заглушкой, не допуская последующей разборки.

Таблица 1 – Технические характеристики Контейнера МК-01 «ЧЗП»

Объём, л	0,1	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,65
Высота, мм	84,0	120,0	133,0	97,0	117,0	118,0	90,0	99,0	79,0	113,5	100,0	101,0
Диаметр горловины (крышки), мм	–	–	–	–	–	–	100,2	110,0	115,0	111,3	111,0	111,1
Диаметр дна, мм	–	–	–	–	–	–	75,8	83,0	102,0	85,0	84,0	84,9
Длина горловины (крышки), мм	60,0	51,0	38,0	111,0	119,0	120,0	–	–	–	–	–	–
Длина дна, мм	53,0	40,0	30,0	105,0	104,0	105,0	–	–	–	–	–	–
Ширина горловины (крышки), мм	36,0	32,0	58,0	29,0	39,0	40,0	–	–	–	–	–	–
Ширина дна, мм	30,0	25,0	49,0	24,0	24,0	25,0	–	–	–	–	–	–
Масса контейнера без крышки, г.	15,0	18,0	30,1	36,0	42,5	43,0	36,0	39,6	24,0	28,0	40,0	40,5
Масса контейнера с крышкой, г.	39,3	56,0	58,0	59,0	60,0	62,0	45,0	45,0	62,0	63,0		

Длина фиксатора заглушки, мм	48,0	22,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Ширина фиксатора заглушки, мм	10,0	90,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Высота заглушки, мм	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Длина заглушки, мм	65,0	103,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Ширина заглушки, мм	58,0	95,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Объем, л	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
Высота, мм	129,0	130,0	132,0	143,3	182,3	200,0	138,0	202,0	203,0	153,0	154,0	155,0
Диаметр горловины (крышки), мм	163,0	165,0	166,0	181,7	145,4	159,0	184,0	161,0	163,0	182,0	184,0	185,0
Диаметр дна, мм	146,0	147,0	148,0	162,1	119,0	129,0	170,0	130,0	131,0	167,0	168,0	169,0
Масса контейнера без крышки, г	67,0	68,0	69,0	73,9	85,2	90,0	103,0	92,0	94,0	99,0	100,0	102,0
Масса контейнера с крышкой, г	111,0	112,0	113,0	126,0	128,0	133,0	150,0	134,0	135,0	139,0	141,0	143,0
Грузоподъемность контейнера, кг	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
Высота крышки, мм	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	10,0	10,0	13,0	13,0	13,0
Высота фиксатора заглушки, мм	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Длина фиксатора заглушки, мм	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Ширина фиксатора заглушки, мм	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Высота заглушки, мм	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Длина заглушки, мм	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Ширина заглушки, мм	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Объем, л	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,3	6,5
Высота, мм	158,0	159,6	173,0	174,0	175,0	176,0	183,0	187,0	193,0	194,0	198,0	260,0
Диаметр горловины (крышки), мм	188,0	190,0	182,0	183,0	184,0	185,0	199,0	203,0	209,0	210,0	214,0	193,0
Диаметр дна, мм	156,6	158,0	166,0	167,0	168,0	169,0	175,0	178,8	190,0	191,0	195,0	159,0
Масса контейнера без крышки, г	145,0	146,5	99,0	100,0	101,0	102,0	180,0	184,0	154,0	155,0	158,0	270,0
Масса контейнера с крышкой, г	172,0	174,0	173,0	174,0	148,0	149,0	206,0	210,0	217,0	219,0	223,0	402,0
Грузоподъемность контейнера, кг	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,3	6,5
Высота крышки, мм	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Высота фиксатора заглушки, мм	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Длина фиксатора заглушки, мм	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Ширина фиксатора заглушки, мм	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Высота заглушки, мм	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Длина заглушки, мм	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Ширина заглушки, мм	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Объем, л	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0	10,0	10,0	10,5	10,7	11,0	11,4
Высота, мм	269,0	270,0	278,0	286,3	210,0	214,0	238,0	240,0	210,7	215,0	219,3	222,6
Диаметр горловины (крышки), мм	199,2	200,0	206,0	212,2	270,0	275,0	255,0	250,0	270,5	276,0	281,5	286,0
Диаметр дна, мм	164,0	165,0	170,0	175,1	249,0	254,0	235,0	230,0	249,9	255,0	260,0	264,0
Масса контейнера без крышки, г	288,0	297,0	310,0	316,5	298,0	242,0	312,0	318,0	324,0	329,0		

Масса контейнера с крышкой, г	415,0	417,0	429,0	441,0	396,0	404,0	386,0	328,5	408,0	412,0	420,0	426,0
Грузоподъемность контейнера, кг	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0	10,0	10,0	10,5	10,7	11,0	11,4
Высота крышки, мм	18,0	18,0	18,0	18,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Высота фиксатора заглушки, мм	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Длина фиксатора заглушки, мм	10,0	10,0	10,0	10,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Ширина фиксатора заглушки, мм	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Высота заглушки, мм	8,0	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Длина заглушки, мм	107,0	107,0	107,0	107,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Ширина заглушки, мм	60,0	60,0	60,0	60,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Объем, л	11,5	12,0	13,9	15,00	18,0	20,0	33,0	35,0				
Высота, мм	225,0	248,3	256,0	261,0	310,0	331,0	388,0	395,0				
Диаметр горловины (крышки), мм	289,0	269,7	278,0	283,6	300,0	311,0	357,8	365,0				
Диаметр дна, мм	267,0	245,4	253,0	258,0	270,0	280,0	320,0	326,0				
Масса контейнера без крышки, г	333,0	352,0	363,0	370,0	621,0	645,0	849,0	865,0				
Масса контейнера с крышкой, г	430,0	435,0	448,0	456,0	758,0	777,0	1040,0	1060,0				
Грузоподъемность контейнера, кг	11,5	12,0	13,9	15,00	18,0	20,0	25,0	25,0				
Высота крышки, мм	15,0	15,0	14,0	14,0	14,0	14,0	17,0	17,0				
Высота фиксатора заглушки, мм	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0				
Длина фиксатора заглушки, мм	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0				
Ширина фиксатора заглушки, мм	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0				
Высота заглушки, мм	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0				
Длина заглушки, мм	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
Ширина заглушки, мм	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				

Таблица 2 – Технические характеристики Контейнера МК-02 «ЧЗП»

Объем, л	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,65	0,75	0,75	0,8	1,0	1,0	1,0
Высота, мм	90,0	99,0	79,0	113,5	100,0	101,0	96,0	167,0	123,0	118,0	138,0	117,0
Диаметр горловины (крышки), мм	100,2	110,0	115,0	111,3	111,0	111,1	120,0	92,0	107,0	127,0	128,0	120,0
Диаметр дна, мм	75,8	83,0	102,0	85,0	84,0	84,9	108,0	78,0	91,0	103,0	93,0	100,0
Высота крышки, мм	8,0	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0
Масса контейнера без крышки, г.	36,0	39,6	24,0	28,0	40,0	40,5	33,0	36,0	36,0	66,0	54,0	36,0
Масса контейнера с крышкой, г.	60	54,0	39,0	39,0	55,0	56,0	40,0	50,0	58,0	83,0	68,5	54,0
Грузоподъемность контейнера, кг	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,65	0,75	0,75	0,8	1,0	1,0	1,0
Объем, л	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
Высота, мм	285,0	119,0	120,0	131,	149,0	180,0	150,0	151,0	165,4	137,0	131,1	138,0
Диаметр горловины (крышки), мм	104,0	127,5	128,0	122,0	127,0	138,0	128,0	129,0	141,1	163,0	155,8	164,0
Диаметр дна, мм	88,0	103,0	104,7	105,0	106,0	102,0	107,0	108,0	117,9	139,0	133,0	140,0
Высота крышки, мм	10,0	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0

Масса контейнера без крышки, г	58,0	66,5	67,5	40,0	78,5	66,9	79,0	79,5	81,0	64,5	62,0	65,0
Масса контейнера с крышкой, г	75,8	83,0	84,0	50,0	98,0	80,0	96,0	97,0	98,0	81,0	82,0	83,0
Грузоподъемность контейнера, кг	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
Объем, л	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,0
Высота, мм	117,0	139,0	140,0	142,0	129,0	130,0	132,0	143,3	182,3	200,0	202,0	138,0
Диаметр горловины (крышки), мм	176,0	165,0	167,0	168,0	163,0	165,0	166,0	181,7	145,4	159,0	161,0	184,0
Диаметр дна, мм	162,0	141,0	143,0	144,0	146,0	147,0	148,0	162,1	119,0	129,0	130,0	170,0
Высота крышки, мм	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Масса контейнера без крышки, г	72,0	65,5	67,0	68,0	67,0	68,0	69,0	73,9	85,2	90,0	92,0	103,0
Масса контейнера с крышкой, г	96,0	84,0	85,0	86,0	88,0	89,0	90,0	103,0	105,0	110,0	111,0	130,0
Грузоподъемность контейнера, кг	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,0
Объем, л	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,5	5,0
Высота, мм	203,0	153,0	154,0	155,0	158,0	159,6	173,0	174,0	175,0	176,0	183,0	187,0
Диаметр горловины (крышки), мм	163,0	182,0	184,0	185,0	188,0	190,0	182,0	183,0	184,0	185,0	199,0	203,0
Диаметр дна, мм	131,0	167,0	168,0	169,0	156,6	158,0	166,0	167,0	168,0	169,0	175,0	178,8
Высота крышки, мм	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Масса контейнера без крышки, г	94,0	99,0	100,0	102,0	172,0	174,0	99,0	100,0	101,0	102,0	180,0	184,0
Масса контейнера с крышкой, г	112,0	116,0	118,0	120,0	122,0	123,0	150,0	151,0	125,0	126,0	183,0	187,0
Грузоподъемность контейнера, кг	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,5	5,0
Объем, л	5,5	6,0	6,3	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0	10,0	10,0
Высота, мм	193,0	194,0	198,0	260,0	269,0	270,0	278,0	286,3	210,0	214,0	238,0	240,0
Диаметр горловины (крышки), мм	209,0	210,0	214,0	193,0	199,2	200,0	206,0	212,2	270,0	275,0	255,0	250,0
Диаметр дна, мм	190,0	191,0	195,0	159,0	164,0	165,0	170,0	175,1	249,0	254,0	235,0	230,0
Высота крышки, мм	10,0	10,0	10,0	10,0	18,0	18,0	18,0	18,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Масса контейнера без крышки, г	154,0	155,0	158,0	270,0	278,0	280,0	288,0	297,0	310,0	316,5	298,0	242,0
Масса контейнера с крышкой, г	194,0	196,0	223,0	379,0	392,0	394,0	406,0	418,0	373,0	381,0	374,0	302,0
Грузоподъемность контейнера, кг	5,5	6,0	6,3	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0	10,0	10,0
Объем, л	10,5	10,7	11,0	11,4	11,5	12,0	13,9	15,0	18,0	20,0	33,0	35,0
Высота, мм	210,7	215,0	219,3	222,6	225,0	248,3	256,0	261,0	310,0	331,0	388,0	395,0
Диаметр горловины (крышки), мм	270,5	276,0	281,5	286,0	289,0	269,7	278,0	283,6	300,0	311,0	357,8	365,0
Диаметр дна, мм	249,9	255,0	260,1	264,0	267,0	245,4	253,0	258,0	270,0	280,0	320,0	326,0
Высота крышки, мм	14,0	14,0	14,0	14,0	15,0	15,0	14,0	14,0	14,0	14,0	17,0	17,0
Масса контейнера без крышки, г	312,0	318,0	324,0	329,0	333,0	352,0	363,0	370,0	621,0	645,0	849,0	865,0
Масса контейнера с крышкой, г	385,0	389,0	397,0	403,0	407,0	412,0	425,0	433,0	735,0	754,0	1032,0	1052,0
Грузоподъемность контейнера, кг	10,5	10,7	11,0	11,4	11,5	12,0	13,9	15,0	18,0	20,0	25,0	25,0

5.1.9 Крепление контейнера с ручками прочное и выдерживает нагрузку возникающую при заполнении контейнера водой или сыпучим материалом массой равной грузоподъемности контейнера, указанной в таблицах 1 и 2.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru
Меры профилактики к дезинфицирующим средствам, используемым при обращении с учреждениями здравоохранения.

5.1.11 Цвет контейнеров соответствует классу опасности медицинских отходов, в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Класс отходов «А» (белый цвет) – эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО.

Класс отходов «Б» (желтый цвет) – эпидемиологически опасные отходы.

Класс отходов «В» (красный цвет) – эпидемиологически опасные отходы.

Класс отходов «Г» (черный цвет) – токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности.

5.1.12 Контейнер при эксплуатации устойчив к воздействию климатических факторов при воздействии температур от минус 25°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 100% при температуре плюс 25°C.

5.1.13 Контейнер при транспортировании и хранении устойчив к воздействию климатических факторов при воздействии температур от минус 50°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.

5.1.14 Контейнер в транспортной упаковке устойчив к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании, и обладать вибропрочностью и ударопрочностью при вибрационных нагрузках в диапазоне 10-55 Гц, амплитуде перемещения 0,15 мм.

5.1.15 Контейнер, заполненный отходами, массой равной грузоподъемности контейнера, указанной в таблицах 1 и 2 устойчив к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании при вибрационных нагрузках в диапазоне 10-55 Гц и амплитуде перемещения 0,15 мм.

5.2 Описание и принцип работы

5.2.1 Контейнер выполнен в виде пластиковой емкости с герметичной крышкой круглой или прямоугольной формы, которая позволяет безопасно отложить, собирать и хранить медицинские отходы.

5.3 Порядок работы с Контейнером одноразовым для сбора острого инструментария классов Б, В, Г МК-01 «ЧЗП»

1. Разместите контейнер перед собой

2. Сборка контейнера (при поставке в разобранном виде): корпус контейнера закройте крышкой плотно, надавливая на крышку до щелчка, крышка в закрытом состоянии должна быть ровным по всей поверхности.

3. Возьмите маркировочную этикетку и заполните графы: «Название ЛПУ», «код подразделения ЛПУ», «Дата сбора отходов»; «Ответственный за сбор отходов», в целях соблюдения СанПиН 2.1.3684-21.

4. Наклейте заполненную маркировочную этикетку на контейнер;

5. Заполните контейнер на 2/3 дезинфицирующим раствором, согласно инструкции по применению дезинфицирующего средства

6. Крышку зафиксируйте на контейнере, закрыв ее плотно до щелчка, отверстие для снятия игл при этом должно быть открытым. Контейнер готов к использованию!

7. Собирайте отходы до заполнения контейнера, но не более чем на $\frac{3}{4}$ объема и общий вес заполненного контейнера не должен превышать 25 кг.

Отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) необходимо собирать в контейнер с емкостью желтого цвета.

Отходы класса В (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы) необходимо собирать в контейнер красного цвета.

Отходы класса Г (токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности) необходимо собирать в контейнер черного цвета.

8. Выполните инъекцию, поднесите шприц с иглой к контейнеру. В процессе сбора игл заглушка должна находиться в верхнем положении.

9. Опустите кончик иглы в дезинфицирующий раствор, находящийся внутри контейнера и потяните поршень шприца на себя;

10. Подденьте канюлю иглы за подходящее отверстие на крышке и отделите иглу от шприца, чтобы игла попала в дезинфицирующий раствор в контейнере;

11. Выпустите дезинфицирующий раствор, набранный ранее в шприц через иглу, обратно в контейнер;

12. После заполнения контейнера иглами, но не более чем на $\frac{3}{4}$, прикройте отверстие для игл и выдержите время экспозиции дезинфицирующего средства, после чего жидкость слейте через

13. Закройте отверстие для снятия игл заглушкой. Проследите за тем, чтобы при закрытии заглушки она была полностью утоплена в отверстии.

14. Контейнер готов к транспортировке с места образования отходов на место временного хранения на территории ЛПУ.

15. Контейнер объемом 33 и 35 л перемещать на тележке для транспортировки бака, контейнера (колесная опора для бака) с максимально допустимой нагрузкой не менее 25 кг.

5.3 Порядок работы с Контейнером одноразовым для сбора органических отходов классов А, Б, В, Г МК-02 «ЧЗП»

1. Разместите контейнер перед собой

2. Сборка контейнера (при поставке в разобранном виде): корпус контейнера закройте крышкой плотно, надавливая на крышку до щелчка, крышка в закрытом состоянии должна быть ровным по всей поверхности.

3. Возьмите маркировочную этикетку и заполните графы: «Название ЛПУ», «код подразделения ЛПУ», «Дата сбора отходов»; «Ответственный за сбор отходов», в целях соблюдения СанПиН 2.1.3684-21.

4. Наклейте заполненную маркировочную этикетку на контейнер;

5. Заполните контейнеры дезинфицирующим раствором в требуемом для дезинфекции медицинских отходов объеме, согласно инструкции по применению дезинфицирующего средства.

6. Собирайте отходы до заполнения контейнера, но не более чем на $\frac{3}{4}$ объема и общий вес заполненного контейнера не должен превышать 25 кг..

Отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО) необходимо собирать в контейнер с емкостью белого цвета.

Отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) необходимо собирать в контейнер с емкостью желтого цвета.

Отходы класса В (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы) необходимо собирать в контейнер красного цвета.

Отходы класса Г (токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности) необходимо собирать в контейнер черного цвета.

7. Закройте контейнер крышкой (при закрытии крышкой убедитесь, что произошел глухой щелчок).

8. Контейнер готов к транспортировке с места образования отходов на место временного хранения на территории ЛПУ.

9. Контейнер объемом 33 и 35 л перемещать на тележке для транспортировки бака, контейнера (колесная опора для бака) с максимально допустимой нагрузкой не менее 25 кг.

5.4 Описание способов утилизации отходов классов А, Б, В, Г

1. Отходы класса А, кроме пищевых, могут удаляться из структурных подразделений с помощью мусоропровода или пневмотранспорта. Не допускается сброс в мусоропровод предметов, которые могут привести к механическому перекрытию (засору) ствола мусоропровода. Сброс отходов в мусоропровод должен осуществляться в упакованном виде.

2. Отходы класса Б подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции)/обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/обезвреживания определяется возможностями организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, и выполняется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами.

В случае отсутствия в организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, участка по обеззараживанию/обезвреживанию отходов класса Б или централизованной системы обезвреживания медицинских отходов принятой на административной территории, отходы класса Б обеззараживаются

3. Отходы класса В подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции) физическими методами (термические, микроволновые, радиационные и другие). Применение химических методов дезинфекции допускается только для обеззараживания пищевых отходов и выделений больных, а также при организации первичных противоэпидемических мероприятий в очагах. Выбор метода обеззараживания (дезинфекции) осуществляется при разработке схемы сбора и удаления отходов. Вывоз необеззараженных отходов класса В за пределы территории организации не допускается.

4. Вывоз отходов класса Г для обезвреживания или утилизации осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 Комплект поставки должен включать:

- Корпус – 1 шт.
- Крышка – 1 шт.
- Заглушка (для модели МК-01 «ЧЗП») – 1 шт.
- Этикетка маркировочная, класс «А» (для модели МК-02 «ЧЗП») – 1 шт. (при необходимости).
- Этикетка маркировочная, класс «Б» – 1 шт. (при необходимости).
- Этикетка маркировочная, класс «В» – 1 шт. (при необходимости).
- Этикетка маркировочная, класс «Г» – 1 шт. (при необходимости).
- Инструкция по применению – 1 шт.

Допускается поставка контейнеров в разобранном виде (крышка и заглушка (для контейнеров МК-01 «ЧЗП») не вставлена на корпус) в одной транспортной упаковке.

7 МАРКИРОВКА

7.1 Маркировка нанесена методом формования, тиснения, печати, штампа, гравировкой в форме. В случае технологической невозможности нанесения маркировки в процессе его изготовления, допускается маркировку указывать на маркировочной этикетке типографским способом.

7.2 Каждый контейнер (маркировочная этикетка) имеет информацию следующего содержания:

- наименование и/или товарный знак, адрес и контактные данные предприятия-изготовителя;
- вариант исполнения контейнера;
- объём контейнера;
- обозначение ТУ 32.50.50-002-41224763-2020;
- номер и дату регистрационного удостоверения;
- номер партии;
- класс опасности отходов;
- надписи: «Название ЛПУ», «код подразделения ЛПУ», «Дата сбора отходов»; «Ответственный за сбор отходов»;
- надписи: «Отходы класса Б, обеззараженные» или «Отходы класса В, обеззараженные», «Дата обеззараживания»;
- надпись «Повторное использование ЗАПРЕЩЕНО» или символ «Запрет на повторное применение» по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014;
- символ «Нестерильно» по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014;

7.3 На групповую (транспортную) упаковку типографским способом нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак, адрес и контактные данные предприятия-изготовителя;
- наименование и вариант исполнения контейнера;
- объём контейнера;
- обозначение ТУ 32.50.50-002-41224763-2020;
- номер и дату регистрационного удостоверения;
- номер партии и дату изготовления (месяц, год);
- количество контейнеров в упаковке;
- класс опасности отходов;
- надпись «Повторное использование ЗАПРЕЩЕНО» или символ «Запрет на повторное применение» по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014;
- символ «Нестерильно» по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014;
- штамп отдела технического контроля;
- гарантийный срок хранения;
- манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно», по ГОСТ 14192.

8 УПАКОВКА

8.1 Контейнер упакован в групповую (транспортную) упаковку, изготовленную из гофрированного картона по ГОСТ 9142-2014 или мешок из полиэтиленовой плёнки по ГОСТ 10354-82.

1.5.2 Групповая (транспортная) упаковка оклеена полиэтиленовой лентой с липким слоем так, что исключает возможность вскрытия ее без нарушения целостности упаковки.

9 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 Перед использованием прочесть инструкцию по применению.

9.2 Контейнер, транспортируемый при температуре ниже 0 °С, перед применением следует выдержать при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С в течение суток.

9.3 Строго следовать нормативам, установленных СанПиН 2.1.3684-21;

9.4 При сборе и дальнейшем обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать медицинские отходы классов Б и В, в целях их обеззараживания;
- снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции;

- прессовать контейнеры с иглами, конструкция которых допускает рассыпание игл после прессования;

- пересыпать (перегружать) неупакованные медицинские отходы классов Б и В из одной емкости в другую;

- утрамбовывать медицинские отходы классов Б и В;

- осуществлять любые манипуляции с медицинскими отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;

- использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;

- устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для сбора медицинских отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов.

9.5 В случае получения работником при обращении с медицинскими отходами травмы (укол, порез с нарушением целостности кожных покровов и (или) слизистых), персоналу медицинской организации необходимо принять меры экстренной профилактики.

9.6 Запрещается работать с контейнером без специальной защитной одежды и средств индивидуальной защиты.

9.7 Контейнер одноразового применения, техническое обслуживание и ремонт не требуется.

10 ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

10.1 Показание к применению – использовать Контейнер в соответствии с его назначением, а именно для сбора, хранения, обеззараживания и транспортирования острого инструментария и органических отходов классов А, Б, В, Г.

10.2 Противопоказание – Контейнер не имеет медицинских противопоказаний к применению.

10.3 Возможные побочные эффекты – отсутствуют.

11 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

11.1 При работе следует соблюдать меры предосторожности.

11.2 Не использовать Контейнер с механическими повреждениями.

11.3 При сборе и дальнейшем обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать медицинские отходы классов Б и В, в целях их обеззараживания;
- снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции;

- прессовать контейнеры с иглами, конструкция которых допускает рассыпание игл после прессования;

- пересыпать (перегружать) неупакованные медицинские отходы классов Б и В из одной емкости в другую;

- утрамбовывать медицинские отходы классов Б и В;

- осуществлять любые манипуляции с медицинскими отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;

- использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;

- устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для сбора медицинских отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов.

11.4 В случае получения работником при обращении с медицинскими отходами травмы (укол, порез с нарушением целостности кожных покровов и (или) слизистых), персоналу медицинской организации необходимо принять меры экстренной профилактики.

11.5 Повторное использование запрещено.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ С КОНТЕЙНЕРОМ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

12 СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

12.1 Контейнер транспортируют всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- температура от минус 50°C до плюс 40°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.

12.3 Хранение Контейнера должно проводиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских вентилируемых помещениях с исключением воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков и агрессивных сред.

12.4 Условия хранения Контейнера – по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69:

- температура от минус 50°C до плюс 40°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.

13 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ (УНИЧТОЖЕНИИ)

13.1 Контейнер подлежит утилизации (уничтожению) в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 в зависимости от класса собранных в них отходов.

13.2 Контейнер, не поступивший в эксплуатацию, по истечении срока хранения подлежит вторичной переработке, либо подлежит утилизации (уничтожению) как твёрдые бытовые отходы класса А в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

14 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

14.1 В процессе изготовления Контейнера исключена возможность загрязнения окружающей среды отходами производства. Отходы, образующиеся при производстве продукции, утилизируются или перерабатываются во вторичное сырьё на предприятии.

14.2 Процесс производства соответствует требованиям ГОСТ 12.3.002-2014 и санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.2.1327-03.

14.3 Производственные помещения, где ведутся работы, оснащены местной вытяжной вентиляцией, а помещения – общеобменной вентиляцией в соответствии с ГОСТ 12.4.021-75.

14.4 Технологический режим производства осуществляется с соблюдением правил пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.

14.5 При транспортировании, хранении и эксплуатации Контейнер не наносит вред окружающей среде и не требует специальных мер защиты окружающей среды.

15 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

– ГОСТ 31508-2012 «Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования»;

– Приказ Минздрава России от 06.06.2012г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»;

– ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

– СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

– ГОСТ 3282-74 «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия»;

– ГОСТ 17305-91 «Проволока из углеродистой конструкционной стали. Технические условия»;

– ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014

«Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»;

– ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»;

– ГОСТ 9142-2014 «Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия»;

– ГОСТ 10354-82 «Пленка полиэтиленовая. Технические условия»;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»;

– ГОСТ 12.4.021-75 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные.

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ 25336-82 «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры»;
- ГОСТ 177-88 «Водорода перекись. Технические условия»;
- ГОСТ 14193-78 «Монохлорамин ХБ технический. Технические условия»;
- ГОСТ 2.103-2013 «Единая система конструкторской документации. Стадии разработки»;
- ГОСТ Р 15.301-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство»;
- ГОСТ 12.3.030-83 «Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требования безопасности»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

16 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16.1 Изготовитель гарантирует соответствие Контейнера требованиям ТУ 32.50.50-002-41224763-2020 при соблюдении условий упаковки, транспортирования, хранения и эксплуатации.

16.2 Гарантийный срок хранения – 15 месяцев с даты изготовления.

17 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Пакет соответствует ТУ 32.50.50-002-41224763-2020 и признан годным для эксплуатации.

ОТК _____

Дата изготовления _____

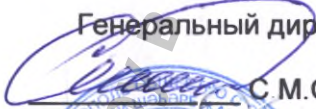
18 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются по адресу предприятия-изготовителя:

422980, Россия, Республика Татарстан, г.Чистополь, ул.Промышленная, зд.27, оф.1, тел.: +7(843)537-10-46, +7(843)537-10-56, e-mail: z-plast@inbox.ru, ООО «ЧЗП»

В данном документе
прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
13 листа(ов)

Генеральный директор


С.М.Степанов

