

Руководство по применению изделия медицинского назначения

Лейкопластырь Верофарм

Описание

Лейкопластырь Верофарм представляет собой полосу основы с клеевым слоем с защитным покрытием или без него, намотанную на картонную или пластмассовую шпулю (катушку) или полосу основы с клеевым слоем с защитным покрытием или без него в виде бобины или полосу основы с клеевым слоем и перфорацией с защитным покрытием или полосу основы с клеевым слоем и перфорацией с защитным покрытием, намотанную на картонную или пластмассовую шпулю (катушку) или полосу основы с клеевым слоем с защитным покрытием или две полосы основы с клеевым слоем на одном защитном покрытии.

Показания к применению

Лейкопластырь предназначен для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах.

Противопоказания

нет

Способ применения

Перед употреблением от лейкопластыря отрезают полосу необходимого размера. Клейкой стороной накладывают на повязку. Края полосы прижимают к коже.

Форма выпуска

Лейкопластырь в катушках с защитным покрытием или без него длиной от 250 до 2000 см и шириной от 1 до 10 см или лейкопластырь перфорированный с защитным покрытием в катушках длиной от 250 до 500 см и шириной от 10 до 18 см или в виде пластин 10 x 18 см, или лейкопластырь в мелкой расфасовке с защитным покрытием размером 3,8x3,8 см, 4x10 см, 6x10 см, 6x18 см.

Срок годности

4 года.

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте.

Заместитель генерального
директора ОАО «ВЕРОФАРМ»



Т.Х. Чибилев