

Инструкция по применению изделия медицинского назначения

СИСТЕЙН® УЛЬТРА монодозы

СРЕДСТВО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ

Регистрационное удостоверение № ФСЗ _____ от _____

ОПИСАНИЕ

СИСТЕЙН® УЛЬТРА монодозы средство офтальмологическое - стерильный раствор, содержащий полиэтиленгликоль 0,4%, пропиленгликоль 0,3%, гидроксипропилгуар 0,16%-0,19%, кислоту бора 0,7%, калия хлорид 0,12%, натрия хлорид 0,1%, сорбитол 1,4%, 2-амино-2-метилпропанол 0,57%, кислоту хлористоводородную и/или натрия гидроксид (для доведения pH), воду очищенную (до объема 100%).

ПОКАЗАНИЯ

СИСТЕЙН® УЛЬТРА монодозы средство офтальмологическое обеспечивает временное облегчение симптомов синдрома «сухого глаза», таких как чувство жжения и раздражение.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам продукта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

СИСТЕЙН® УЛЬТРА монодозы средство офтальмологическое может применяться по мере необходимости на протяжении дня. Может быть использовано до и после ношения контактных линз. Переверните тубик-капельницу с монодозой, закапайте в глаз и поморгайте. Опустошите тубик-капельницу после использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не прикасайтесь к кончику тубик-капельницы, так как это может привести к загрязнению раствора.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ

Безопасность и эффективность применения во время беременности и лактации не исследовались. Возможно применение при беременности и в период лактации по назначению лечащего врача, если ожидаемый эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕДИАТРИИ

Не рекомендуется применение в детском возрасте до 18 лет, так как безопасность и эффективность применения у детей не установлены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


Следуйте рекомендациям Вашего врача-офтальмолога и инструкции по применению. При продолжающемся дискомфорте, слезотечении, изменении зрения, покраснении глаз, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- При комнатной температуре, в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор после окончания срока годности, указанного на упаковке. 
- Не использовать раствор, если упаковка вскрыта или повреждена.
- Оставшийся в тубик-капельнице раствор не подлежит повторному использованию. Не храните раствор в открытой тубик-капельнице. 

ФОРМА ВЫПУСКА

СИСТЕЙН® УЛЬТРА монодозы средство офтальмологическое выпускается в одноразовых стерильных пластиковых тубик-капельницах по 0,7 мл (упаковывается в стрипы по 4 тубик-капельницы или более).

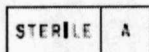

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Laboratoires Alcon S.A., Франция
21-23, rue Georges Ferrenbach,
68240 Kayserberg, France

**Владелец регистрации на территории Российской Федерации
ООО «Алкон Фармацевтика»**

Адрес компании ООО «Алкон Фармацевтика» и принятия претензий:
Россия, 109004, Москва, ул. Никольямская, 54
Тел. (495) 961-13-33

© 2012 Novartis



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору
www.roszdravnadzor.ru

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.ru

ВСЕГО
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
2 ЛИСТА

