

Registered No. 20 / 52

NOTARIAL CERTIFICATE

Busan International Law & Notary Offices.

(Geoje-dong, Busan Judicial Offices Town Bldg)
#205, 28, Beobwon-ro, Yeonje-gu,
Busan, Korea





Instruction For Use

Attn: Federal Service of Health Care and Social Development Control of Russia

We, **OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.**, hereby declare that the **instruction for use** provided to Federal Service of Health Care and Social Development Control of Russia for Imported Medical Product Recordation is complete, consistent and authentic.

Signature: _____

Name: Eom Tae Gwan

Title: President

OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.

66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan, Korea



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ

ОПИСАНИЕ

Это инструкция по применению абатментов TS Link Abutment for Cerec, TS Link Abutment for Public, и TS Pre-milled Abutment.

Абатменты TS Link Abutment for Cerec, TS Link Abutment for Public, и TS Pre-milled Abutment - это детали зубных имплантатов, используемые для зубных протезов, проектируемых индивидуально для каждого отдельного пациента с использованием цифровых данных, таких как информация о местоположении десны и имплантата, подлежащего имплантированию, получаемых через 3-мерное сканирование поверхности полости рта (или модели).

Корпус для сканирования (scan body) и абатмент временный (scan post) - это продукт для компьютерных программ проектирования и моделирования (CAD/CAM), поставляемых с интерфейсом, связанным с секцией присоединения имплантатов.

Винт абатмента для крепления последнего к имплантату, а также изделия для сканирования (scan body, scan post) задействованные в процессе сканирования, используются совместно.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Абатменты трехкомпонентные, двухкомпонентные TS Abutment System

Варианты исполнения: см Приложение 1 к инструкции.

НАЗНАЧЕНИЕ

Абатмент - это одноразовое медицинское изделие, предназначенное для обеспечения постоянного промежуточного уровня между дентальным имплантатом и окончательным протезом/реставрацией (например, мостом, одним зубом, покрывным протезом).

Условия применения: абатмент предназначен для использования в стоматологических клиниках.

Класс потенциального риска применения - IIb, согласно Правилам 8 Классификационных критериев, Приложение IX, MDD 93/42/EEC с поправками 2007/47/EC.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:

Абатмент, предварительно фрезерованный абатмент - это материал для имплантации в области стоматологии, который используется при конструкции протеза в зависимости от особенностей пациента. Протезирование осуществляется после получения цифровой информации о расположении изделия, десны. Цифровые данные получают путем 3D сканирования полости рта (или моделирования полости рта). Абатмент - это изделие для CAD/CAM, включая интерфейс в сочетании с соединительным участком крепления. Используется скан, связанный с процессом сканирования и винтом абатмента для фиксации абатмента на креплении.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Абатменты используются для восстановления одного или нескольких зубов, утраченных пациентом в нижнечелюстной/верхнечелюстной ветви либо при полном отсутствии зубов на челюсти пациента, а также для выполнения временных или постоянных протезов с креплением на цементе или на винте.

Абатмент используются совместно с имплантатом, служа опорой для ортопедических реставраций, таких как коронки, мосты или съемные протезы с фиксацией на имплантатах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Абатмент нельзя использовать непосредственно для отливки/обжига.

- Пациенты, у которых имеются проблемы в отношении костей и заживления ран
- Пациенты с неконтролируемым диабетом, заболеваниями тканей, которые воздействуют на состояние кости или заживление ран; заядлые курильщики или лица, злоупотребляющие спиртными напитками
- Пациенты, иммунная система которых нарушена из-за химиотерапии и/или радиотерапии
- Пациенты с инфекциями или воспалениями полости рта (несоответствующая гигиена полости рта, бруксизм)
- Пациенты с нарушением прикуса/смыкания, не поддающимся лечению, недостаточным пространством зубной дуги

- Пациенты с недостаточной высотой или шириной кости

- Любые пациенты, которые не соответствуют условиям для выполнения операции

Внимание! Для установки протезов с использованием абатментов TS Link Abutment for Cerec, TS Link Abutment for Public, и TS Pre-milled Abutment, необходимо применять имплантаты, поставляемые компанией OSSTEM IMPLANT.

Программное обеспечение, фрезервальное оборудование и материалы должны отвечать указаниям производителей.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИЗДЕЛИЯ

- Материалы

Абатменты TS Link Abutment for Public, Абатменты TS Link Abutment for Cerec, Абатменты TS Pre-Milled Abutment изготовлены из **титанового сплава марки Ti-6AL-4V**.

Корпус для сканирования (scan body) (артикул TSCSB) изготовлен из **АБС пластика, марки CAS**.

Корпус для сканирования (scan body) (артикулы TSPSBR, TSPSBM) изготовлен из **полиэфирного материала эфиро оксикетона (PEEK), марки: DIN EN ISO 527, DIN EN ISO 180 (Izod)**

- Конструкция

Индивидуальные абатменты следует изготавливать с применением цифровых технологий, используя зубоорточное ПО CAD, и они должны соответствовать базовым правилам.

Абатмент временный (scan post) и корпус для сканирования (scan body) применяются для записи в цифровом формате местоположения абатментов или имплантатов, и управляются от сканера (цифровое изготовление слепка).

С помощью данной технологии можно проектировать коронку/абатмент на основе библиотеки, зарегистрированной в ПО.

Зарегистрированную библиотеку нельзя произвольно изменять или дорабатывать.

Профиль выступления следует формировать плавным, вдоль края мягких тканей, на основе анатомической структуры. Если вы хотите увеличить выступание над краем области заживления десны, то сначала необходимо проконсультироваться с лечащим дантистом.

Для того чтобы обеспечить эстетичный вид зубов и сделать более удобным удаление цемента на стыке, участок запаса обычно располагается несколько ниже края десны вдоль контура десны в полости рта.

Толщина стенки должна быть 0,35 мм или больше, диаметр абатмента не должен быть менее Ø4,0 мм, а угол - более 30°.

Его следует формировать плавным повсюду, и не допускать заостренных кромок или ребер.

(Однако для абатмента TS Link Abutment for Cerec необходимо использовать специальные сканер, ПО и фрезервальное оборудование, имеющиеся в наличии у компании Sirona. Максимальный угол при проектировании абатмента ограничен значением 20°.)

- Фрезерование и полировка

Для изготовления абатмента по цифровой модели инструменты должны быть чистыми, не иметь повреждений; во время обработки на основе проектного файла (CAM) следует обеспечивать надлежащее охлаждение обрабатывающего оборудования).

Следите за тем, чтобы на обрабатываемой детали не было заусенцев или заостренных кромок.

Не изменяйте произвольно угол, толщину стенки или высоту TS Link абатмента.

Кроме того, удостоверьтесь, что соблюдаются инструкции производителей используемых материалов и оборудования.

- Формование и обжиг керамических материалов

Керамические материалы, включая циркониевую керамику, следует формовать и обжигать до связывания с абатментом, а также использовать надлежащие материалы, основываясь на указаниях производителя.

- Соединение

Для того чтобы соединить керамику, например, циркониевую, с абатментом, рекомендуются композиционные цементы для абатментов PANA VIA F 2.0 (Kuraray Europe) или Multilink (Ivoclar

Следует придерживаться инструкций производителя. Для защиты соединения с имплантатом, выполненным на абатменте, и удобства обработки, абатмент следует монтировать на Lab Analog.

Закрыв вход резьбового отверстия воском, произведите обработку поверхности сопряжения абатмента струей частиц Al₂O₃ размером 50 мкм под давлением 2 бара или менее и очистите ее полностью (не допустимо наличие остатков посторонних субстанций).

Нанесите клей на поверхность абатмента, нажимайте на керамические материалы, например, циркониевую керамику, до тех пор, пока не почувствуете сопротивление, и установите абатмент в правильном направлении.

Удостоверьтесь, что он правильно установлен, и сотрите клей, оставшийся на поверхности.

- Финишная обработка

После того, как клей полностью отвердеет, осторожно воспользуйтесь инструментом для удаления остатков клея, затем проверьте изнутри отверстие для винта и осторожно удалите оттуда остатки клея.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Изделия транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах.

Условия хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя: хранить в сухом месте при комнатной температуре.

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хирургическая технология зубной имплантации требует наличия опыта; это сложная процедура, которая требует официального обучения для выполнения имплантации.

Важно учитывать анатомию и пригодность имеющейся кости для размещения абатмента. Подготовьте абатмент, учитывая ожидаемые ситуации и предостережения. Визуальный осмотр, а также панорамные и периферийные рентгеновские снимки, важны для определения анатомических ориентиров, состояния прикуса, состояния периодонта и удовлетворительного качества кости. Также могут быть полезны латеральные цефалометрические рентгеновские снимки, КТ-исследования и томограммы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Для минимизации повреждения клеточных тканей пациента при применении системы OSSTEM IMPLANT необходимо обращать особое внимание на температуру и хирургические заболевания, а также на устранение первопричин загрязнения и инфекции.

Все приборы и инструменты, используемые при операции, должны содержаться в рабочем состоянии.

Кроме того, поскольку компоненты абатментов имеют малый размер, необходимо следить за тем, чтобы не дать пациенту проглотить или вдохнуть их.

При выполнении протезирования важно обеспечить надлежащее распределение нагрузки, проверив согласование между протезом и смежными зубами, а также прикус.

Поскольку в ходе выполнения протезирования могут создаваться металлические и неметаллические аэрозоли и пыль, вредные для организма человека, настоятельно рекомендуется при таких окружающих условиях надевать защитные перчатки и маску, а в окружении иметь пылесборник.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Содержите полость рта в чистоте.

Следите за тем, чтобы к вылеченной области не прилагались слишком большое напряжение до тех пор, пока не будет установлен последний протез, и следуйте указаниям, выдаваемым компетентным дантистом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вариант А: интраоральное сканирование (для трехкомпонентных абатментов)

1) Соединение абатмента. Присоедините абатмент к креплению в полости рта. Присоедините абатмент.

2) Стяжной винт. Закрепите винт, используя динамометрический ключ (крутящий момент ключа: ручной крутящий момент, 5 ~ 10Ncm).

3) Подключите scan body. Присоедините scan body к абатменту, используя оральный сканер, scan body (в полости рта).

4) Просканируйте scan body на рабочей модели с использованием стоматологического лабораторного сканера. Рекомендуется использовать стоматологическую систему компании 3 Shape.

5) Импорт данных сканирования. Импортируйте данные сканирования в программное обеспечение CAD. Программное обеспечение CAD рекомендуется стоматологической системы компании 3 Shape

6) Дизайн. Используйте программное обеспечение CAD. Рекомендуется проектирование программного обеспечения CAD 3Shape компании Dental System

7) Фрезерование. Используйте широко используемый стоматологический фрезерный станок (для коронок и слепков).

8) Завершение коронок и слепков. Завершите коронку и слепок обычным методом.

10) Примерка. Примерьте на соединительную часть абатмента

11) Винт фиксации абатмента. Соедините, проверьте протез и рекомендуемое затягивание крутящего момента. Установите крутящий момент на 20 Нсм для мини соединения и 30 Нсм для обычного соединения. и присоедините окончательный протез. Для проверки точности соединения важно взять периапикальный рентген.

12) Цементная коронка. Цемент на внутренней части упора

13) Установка коронки. Расположите протез и проверьте соединительную часть. Сожмите протез на минуту.

14) Удалите цемент. Удалите остаточный цемент с помощью соответствующего инструмента

15) Выполненный протез. Проверьте протез

Вариант В: сканирование рабочей модели (для трехкомпонентных абатментов)

1) Подключение scan body

2) Сканирование. Просканируйте scan body с использованием стоматологического лабораторного сканера.

3) Импорт данных сканирования. Импортируйте данные сканирования в программное обеспечение CAD.

4) Дизайн. Используйте программное обеспечение CAD

5) Фрезерование. Используйте широко используемый стоматологический фрезерный станок (для коронок и слепков).

6) Завершение коронок и слепков. Завершите коронку и слепок обычным методом.

7) Цементация. Цемент используется на соединительной части абатмента

8) Примерка. Примерьте на соединительную часть абатмента

9) Винт фиксации абатмента. Соедините, проверьте протез и рекомендуемое затягивание крутящего момента. Установите крутящий момент на 20 Нсм для мини соединения и 30 Нсм для обычного соединения. и присоедините окончательный протез. Для проверки точности соединения важно взять периапикальный рентген.

10) Цементная коронка. Цемент на внутренней части упора

11) Установка коронки. Расположите протез и проверьте соединительную часть. Сожмите протез на минуту.

12) Удалите цемент. Удалите остаточный цемент с помощью надлежащего инструмента

13) Выполненный протез. Проверьте протез

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Эта проблема может возникнуть после установки абатмента (потеря стабильности имплантата, потеря протеза и т.д.). Недостаточное качество и количество остающейся кости, инфекция, несоответствующая гигиена полости рта или отсутствие сотрудничества со стороны пациента, подвижность абатмента, частичное повреждение ткани и неправильное положение и размещение абатмента могут стать причиной его нестабильности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Абатмент и компоненты абатмента Osstem совместима только с имплантатами OSSTEM. Их нельзя использовать с другими имплантатами. Смотрите инструкцию по применению Osstem (см. Приложение 2), каталог или наш веб-сайт (www.osstem.com) для получения более подробной информации. Относительно кода изделия, спецификации, даты выпуска и даты окончания срока действия смотрите этикетку изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки абатментов входит:

- абатмент;
- корпус для сканирования (только для трехкомпонентных абатментов);
- винт
- инструкция (в сокращенном виде).
- наклейка пациента идентификационная.

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Изделия поставляются в нестерильном состоянии.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Перед установкой в полость рта пациента дезинфицируйте абатменты в автоклаве при 132 °C в течение 15 минут и полностью высушите их.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Врач обязан сообщить пациенту о возможных побочных эффектах, противопоказаниях, и мерах предосторожности.

ГИГИЕНА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА АБАТМЕНТАМИ

Срок службы абатмента напрямую зависит от гигиенического состояния полости рта. Пациент должен знать о том, как поддерживать гигиену полости рта. Пациенту рекомендовано периодическое посещение стоматолога для профилактического осмотра и профессиональной чистки.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям данного документа при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Срок годности – 8 лет с даты изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Требования к санитарной охране атмосферного воздуха, почвы и водных объектов должны соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, установленным в законодательстве РФ.

Технология производства абатментов не предполагает образование жидких отходов.

Утилизация или уничтожение технологических потерь, образующихся при производстве абатментов не предполагает, а также готовой продукции, при ее несоответствии требованиям настоящего документа, должны проводиться в соответствии с действующими нормами и требованиями.

Абатменты, вживленные в челюсть человека, не подлежат утилизации в связи со сроком службы соизмеримым со сроком жизни человека.

Отторгнутые организмом человека абатменты, использованные абатменты, включая корпус для сканирования, винт, могут представлять биологическую опасность, с ними следует обращаться и утилизировать в соответствии с медицинской практикой и региональными или государственными нормативно-правовыми актами.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Абатменты являются изделиями одноразового применения, в этой связи не подлежат техобслуживанию и ремонту.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

«Осстем Имплант Ко., Лтд.» (Osstem Implant Co., Ltd.), Корея, 66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan, Korea 48002. Тел: +82 70 4394 9619. Факс: +82 70 4394 0404

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ

Общество с ограниченной ответственностью «Осстем» (ООО «Осстем»), 115432, Россия, г.Москва, проспект Андропова, д. 18, корпус 7, этаж 8, офис 1. Тел: (495) 739-99-25

РЕКЛАМАЦИИ

При выявлении побочных действий, не указанных в инструкции по применению медицинского изделия «Абатменты трехкомпонентные, двухкомпонентные TS Abutment System, варианты исполнения», нежелательных реакций при применении, особенностей взаимодействия между абатментов, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении медицинского изделия «Абатменты трехкомпонентные, двухкомпонентные TS Abutment System, варианты исполнения», необходимо направлять сообщения, содержащее указанные сведения, в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с действующим законодательством.

Рекламации и вопросы направляйте по адресу: ООО «Осстем», 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корпус 7, этаж 8, офис 1, Тел. +7-495-739-99-25.

РАСШИФРОВКА ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ МАРКИРОВКЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Описание	Символ	Описание	Символ
Не использовать повторно		Знак декларирования	
Использовать до (Годеи до)		Номер по каталогу	
Меры предосторожности: Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению		Дата изготовления	
Производитель		Не стерильно	

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Стандарт	Описание
EN 1642:2011	Стоматология - Медицинские приборы для стоматологии - Зубные имплантаты
EN 1041:2008	Информация, предоставленная производителем медицинских изделий
EN 980:2008	Символы для использования при маркировке медицинских устройств
EN 1641:2009	Стоматология - Медицинские приборы для стоматологии - Материалы
EN ISO 10993-1: 2009	Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 1. Оценка и

	тестирование в процессе управления рисками
EN ISO 10993-5:2009	Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 5. Тесты на цитотоксичность in vitro
EN ISO 10993-11:2009	Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 11. Тесты на системную токсичность
EN ISO 13485:2012	Медицинские приборы - Системы управления качеством - Требования к нормативным целям
EN ISO 14971:2012	Медицинские приборы - Применение управления рисками к медицинским устройствам
ISO 10993-10:2010	Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 10. Тесты на раздражение и гиперчувствительность замедленного типа.
ISO 14801:2007	Стоматология - Имплантаты - Тест на динамическую усталость для эндоскопических имплантатов
ISO 5832-2:1999	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Нелегированный титан
ISO 5832-4:2014	Имплантаты для хирургии - Металлические материалы - Часть 4: сплав лития из кобальта и хрома-молибдена
ISO 7405:2008	Стоматология - Оценка биосовместимости медицинских приборов, используемых в стоматологии
ASTM D792-13	Стандартные методы испытаний на плотность и удельную плотность (относительную плотность) пластмасс путем смещения
ASTM F136-13	Стандартная спецификация для сплава титана-6 Алюминий-4 ванадия ELI (сверхнизкий интерстициальный) сплав для применения в хирургических имплантатах (UNS R56401)
ASTM F1839-08	Стандартная спецификация для жесткой полиуретановой пены для использования в качестве стандартного материала для тестирования ортопедических устройств и приборов
ISO 15223-1	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

Сведения о совместимости абатментов с имплантатами Osstem

Таблица 2.1

Наименование	Артикул/код	Имплантаты Osstem																			
		BS2M3508S	BS2M3510S	BS2M3511S	BS2M3513S	BS2M3515S	BS3M3508S	BS3M3510S	BS3M3511S	BS3M3513S	BS3M3515S	TS2M3508S	TS2M3510S	TS2M3511S	TS2M3513S	TS2M3515S	TS3M3508S	TS3M3510S	TS3M3511S	TS3M3513S	TS3M3515S
Абатменты																					
Абатмент TS Link	TSCTBM	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSCTBMN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSCTBMWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSCTBMNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB431MN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB431M	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB432MN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB432M	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB451MN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB451M	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB452MN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB452M	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB431MNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSCTBMN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB431MWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB432MNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB432MWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB451MNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB451MWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB452MNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB452MWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSLA40M	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSLA40MN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSLA40MNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSLA40MWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10ARMWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10ARMNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10CAMWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10CAMNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10UKMWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10UKMNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10HUMWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10HUMNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10ARMWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPTB432MNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSLA40M	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSLA40MN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSLA40MNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSLA40MWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10ARMWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10ARMNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10HUMNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM07ARMNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM07ARMWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM14ARMNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM14ARMWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM07CAMNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM07CAMWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM14CAMNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM14CAMWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM07ZKMNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM07ZKMWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10ZKMNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Наименование	Артикул/код																
		BTS2M3508S	BTS2M3510S	BTS2M3511S	BTS2M3513S	BTS2M3515S	BTS3M3508S	BTS3M3510S	BTS3M3511S	BTS3M3513S	BTS3M3515S	TS2M3508S	TS2M3510S	TS2M3511S	TS2M3513S	TS2M3515S	TS3M3508S
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10ZKMWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM14ZKMNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM14ZKMWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM07MXMNH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM07MXMWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10MXMNH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10MXMWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM14MXMNH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM14MXMWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM07ZKMWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10ZKMNH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10ZKMWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM14ZKMNH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM14ZKMWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM07MXMNH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM07MXMWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10MXMNH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 2.2

Наименование	Артикул/код	Имплантаты Osstem																			
		BTS2S4007S	BTS2S4008S	BTS2S4010S	BTS2S4011S	BTS2S4013S	BTS2S4015S	BTS2S4507S	BTS2S4508S	BTS2S4510S	BTS2S4511S	BTS2S4513S	BTS2S4515S	BTS2S5006S	BTS2S5007S	BTS2S5008S	BTS2S5010S	BTS2S5011S	BTS2S5013S	BTS2S5015S	BTS2S5007S
Абатменты																					
Абатмент TS Link	TSCTBR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSCTBRN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSCTBRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSCTBRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB431RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB431R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB432RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB432R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB451RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB451R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB452RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB452R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB431RNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB431RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB432RNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB432RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB451RNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB451RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB452RNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB452RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSLA45R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSLA45RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSLA45RNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSLA45RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10ARRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10ARRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10CARWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10CARNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10UKRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10UKRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Наименование	Артикул/код																				
		B1S2S4007	B1S2S4008	B1S2S4010	B1S2S4011	B1S2S4011	B1S2S4011	B1S2S4011	B1S2S4011	B1S2S4011	B1S2S4011	B1S2S4011	B1S2S4011	B1S2S4011	B1S2S4011	B1S2S4011	B1S2S4011	B1S2S4011	B1S2S4011	B1S2S4011	B1S2S4011
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10HURWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10HURNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM07ARRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM07ARRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM14ARRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM14ARRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM07CARNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM07CARWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM14CARNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM14CARWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM07ZKRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM07ZKRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10ZKRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10ZKRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM14ZKRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM14ZKRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM07MXRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM07MXRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10MXRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM10MXRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM14MXRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPM14MXRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSCTBR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSCTBRN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPTB431RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPTB431R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPTB432RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPTB432R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPTB451RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPTB451R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPTB452RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPTB452R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSPTB451RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSLA45R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSLA45RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSLA45RNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-milled	TSLA45RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 2.3

Наименование		Артикул/код	Имплантаты Osstem																			
			TS3S5011S	TS3S5015S	TS3S6006S	TS3S6007S	TS3S6008S	TS3S6010S	TS3S6011S	TS3S5013S	TS3S5010S	TS3S5008S	TS3S5007S	TS3S5006S	TS3S5005S	TS3S4515S	TS3S4513S	TS3S4511S	TS3S4510S	TS3S4508S	TS3S4507S	TS3S4501S
Абатменты																						
Абатмент TS Link	TSCTBR		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSCTBRN		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSCTBRWH		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSCTBRNWH		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB431RN		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB431R		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB432RN		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB432R		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB451RN		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB451R		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Наименование	Артикул/код	TS36013S	TS367006S	TS3S7007S	TS3S7006S	TS3S7610S	TS3S7011S	TS3S7013S	TS4S4007S	TS4S4008S	TS4S4010S	TS4S4011S	TS4S4013S	TS4S4015S	TS4S4016S	TS4S4018S	TS4S4019S	TS4S4020S	TS4S4021S	TS4S4022S	TS4S4023S	TS4S4024S	TS4S4025S	TS4S4026S	TS4S4027S	TS4S4028S	TS4S4029S	TS4S4030S	TS4S4031S
Абатменты																													
Абатмент TS Link	TSCTBR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSCTBRN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSCTBRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSCTBRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB431RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB431R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB432RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB432R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB451RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB451R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB452RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB452R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB431RNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB431RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB432RNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB432RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB451RNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB451RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB452RNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB452RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSLA45R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSLA45RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSLA45RNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSLA45RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10ARRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10ARRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10CARWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10CARNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10UKRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10UKRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10HURWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10HURNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07ARRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07ARRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14ARRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14ARRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07CARNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07CARWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14CARNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14CARWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07ZKRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07ZKRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10ZKRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10ZKRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14ZKRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14ZKRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07MXRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07MXRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10MXRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10MXRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14MXRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14MXRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Pre-Milled	TSCTBR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Наименование	Артикул/код																
		IS4S5011S	IS4S5013S	IS2S4007S	IS2S4008S	IS2S4010S	IS2S4011S	IS2S4013S	IS2S4015S	IS2S4507S	IS2S4508S	IS2S4510S	IS2S4511S	IS2S4513S	IS2S4515S	IS2S5006S	IS2S5007S
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10ARRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07ARRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07ARRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14ARRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14ARRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07CARNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07CARWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14CARNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14CARWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07ZKRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07ZKRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10ZKRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10ZKRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14ZKRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14ZKRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07MXRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07MXRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10MXRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10MXRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14MXRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14MXRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSCTBR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSCTBRN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB431RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB431R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB432RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB432R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB451RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB451R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB452RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB452R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB431RNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB451RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSLA45R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSLA45RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSLA45RNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSLA45RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 2.6

Наименование	Артикул/код	Имплантаты Osstem																			
		IS2S5015S	IS3S4007S	IS3S4008S	IS3S4010S	IS3S4011S	IS3S4013S	IS3S45013S	IS4S5011S	IS4S5010S	IS4S5008S	IS4S5007S	IS3S4006S	IS3S4010S	IS3S4011S	IS3S4013S	IS3S4015S	IS3S4507S	IS3S4506S	IS3S4510S	IS3S4511S
Абатменты																					
Абатмент TS Link	TSCTBR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSCTBRN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSCTBRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSCTBRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB431RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB431R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB432RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB432R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Абатмент TS Link	TSPTB451RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Наименование	Артикул/код	BTS3S4513S	BTS3S4515S	BTS3S5005S	BTS3S5006S	BTS3S5007S	BTS3S5008S	BTS3S5010S	BTS3S5011S	BTS3S5013S	BTS3S5015S	BTS3S6006S	BTS3S6007S	BTS3S6008S	BTS3S6010S	BTS3S6011S	BTS3S6013S	BTS3S7006S	BTS3S7007S	BTS3S7008S	BTS3S7010S
Абатмент TS Pre-Milled	TSCTBR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSCTBRN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB431RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB431R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB432RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB432R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB451RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB451R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB452RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB452R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB451RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSLA45R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSLA45RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSLA45RNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSLA45RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 2.8

Наименование	Артикул/код	Имплантаты Osstem											
		BTS3S7011S	BTS3S7013S	BTS4S4007S	BTS4S4008S	BTS4S4010S	BTS4S4011S	BTS4S4013S	BTS4S4507S	BTS4S4508S	BTS4S4510S	BTS4S4511S	BTS4S4513S
Абатменты													
Абатмент TS Link	TSCTBR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSCTBRN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSCTBRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSCTBRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB431RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB431R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB432RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB432R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB451RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB451R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB452RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB452R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB431RNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB431RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB432RNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB432RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB451RNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB451RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB452RNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSPTB452RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSLA45R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSLA45RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSLA45RNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Link	TSLA45RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10ARRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10ARRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10CARWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10CARNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10UKRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10UKRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10HURWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Наименование	Артикул/код	BTS3S7011S	BTS3S7013S	BTS4S4007S	BTS4S4008S	BTS4S4010S	BTS4S4011S	BTS4S4013S	BTS4S4507S	BTS4S4508S	BTS4S4510S	BTS4S4511S	BTS4S4513S
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10HURNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07ARRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07ARRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14ARRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14ARRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07CARNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07CARWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14CARNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14CARWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07ZKRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07ZKRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10ZKRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10ZKRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14ZKRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14ZKRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07MXRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM07MXRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10MXRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM10MXRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14MXRNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPM14MXRWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSCTBR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSCTBRN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB431RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB431R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB432RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB432R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB451RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB451R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB452RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB452R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSPTB451RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSLA45R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSLA45RN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSLA45RNWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Абатмент TS Pre-Milled	TSLA45RWH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Основные характеристики и общий вид изделий

Описание	Артикул / код	Длина, мм*	Диаметр, мм**	Вес, г***	Общий вид
Абатмент	TSPTB431M	6.4	4.0	0.090	
Абатмент	TSPTB451M	8.2		0.113	
Абатмент	TSPTB432M	7.8		0.122	
Абатмент	TSPTB452M	9.6		0.145	
Абатмент	TSPTB431R	6.3	4.5	0.118	
Абатмент	TSPTB451R	8.1		0.147	
Абатмент	TSPTB432R	7.7		0.166	
Абатмент	TSPTB452R	9.5		0.195	
Абатмент	TSPTB431MN	6.4	4.0	0.087	
Абатмент	TSPTB451MN	8.2		0.109	
Абатмент	TSPTB432MN	7.8		0.118	
Абатмент	TSPTB452MN	9.6		0.141	
Абатмент	TSPTB431RN	6.3	4.5	0.118	
Абатмент	TSPTB451RN	8.1		0.147	
Абатмент	TSPTB432RN	7.7		0.166	
Абатмент	TSPTB452RN	9.5		0.196	
Абатмент	TSCTBM	7.9	4.5	0.140	
Абатмент	TSCTBMN	7.9		0.130	
Абатмент	TSCTBR	7.8		0.140	
Абатмент	TSCTBRN	7.8		0.140	
Абатмент временный (scan post) (Mini)	TSCSPM	12.7	5.0	0.340	
Абатмент временный (scan post) (Regular)	TSCSPR	12.7		0.340	
Абатмент	TSPM10CAM	30	10	10.76	
Абатмент	TSPM10CAMN	30		10.76	
Абатмент	TSPM10CAR	30		10.74	
Абатмент	TSPM10CARN	30		10.74	
Абатмент	TSPM07CAM	30	7	9.26	
Абатмент	TSPM07CAMN	30		9.26	
Абатмент	TSPM07CAR	30		9.24	
Абатмент	TSPM07CARN	30		9.24	
Абатмент	TSPM14CAM	30	14	12.26	
Абатмент	TSPM14CAMN	30		12.26	
Абатмент	TSPM14CAR	30		12.24	
Абатмент	TSPM14CARN	30		12.24	
Абатмент	TSPM10ARM	26	10	7.16	
Абатмент	TSPM10ARMN	26		7.16	
Абатмент	TSPM10ARR	26		7.14	
Абатмент	TSPM10ARRN	26		7.14	
Абатмент	TSPM14ARM	26	14	8.66	
Абатмент	TSPM14ARMN	26		8.66	
Абатмент	TSPM14ARR	26		8.64	
Абатмент	TSPM14ARRN	26		8.64	
Абатмент	TSPM10HUM	27.7	10	8.34	
Абатмент	TSPM10HUMN	27.7		8.34	
Абатмент	TSPM10HUR	27.7		8.33	
Абатмент	TSPM10HURN	27.7		8.33	
Абатмент	TSPM10UKM	20	11.5	8.82	
Абатмент	TSPM10UKMN	20		8.82	
Абатмент	TSPM10UKR	20		8.80	
Абатмент	TSPM10UKRN	20		8.80	
Абатмент	TSPM07MXM	26	7	8.00	
Абатмент	TSPM07MXMN	26		8.00	
Абатмент	TSPM07MXR	26		7.98	
Абатмент	TSPM07MXRN	26		7.98	

Абатмент	TSPM10MXM	26	10	9.50	
Абатмент	TSPM10MXMN	26		9.50	
Абатмент	TSPM10MXR	26		9.48	
Абатмент	TSPM10MXRN	26		9.48	
Абатмент	TSPM14MXM	26	14	10.98	
Абатмент	TSPM14MXMN	26		10.98	
Абатмент	TSPM14MXR	26		10.96	
Абатмент	TSPM14MXRN	26		10.96	
Абатмент	TSPM10ZKM	30.9	10	7.92	
Абатмент	TSPM10ZKMN	30.9		7.92	
Абатмент	TSPM10ZKR	30.9		7.90	
Абатмент	TSPM10ZKRN	30.9		7.90	
Абатмент	TSPM07ZKM	30.9	7	6.42	
Абатмент	TSPM07ZKMN	30.9		6.42	
Абатмент	TSPM07ZKR	30.9		6.40	
Абатмент	TSPM07ZKRN	30.9		6.40	
Абатмент	TSPM14ZKM	30.9	14	9.42	
Абатмент	TSPM14ZKMN	30.9		9.42	
Абатмент	TSPM14ZKR	30.9		9.40	
Абатмент	TSPM14ZKRN	30.9		9.40	
Абатмент	TSPM07ARM	26	7	5.66	
Абатмент	TSPM07ARMN	26		5.66	
Абатмент	TSPM07ARR	26		5.64	
Абатмент	TSPM07ARRN	26		5.64	
Винт EbonyGold screw (Mini)	GSABSM	10.2	2.2	0.090	
Винт EbonyGold screw (Regular)	GSABSS	8.35	2.3	0.100	
Винт Laboratory Screw	GSABSML	10.2	2.2	0.090	
Винт Laboratory Screw	GSABSSL	8.35	2.3	0.100	
Корпус для сканирования (scan body)	TSPSBR	14.4	4.5	0.17	
	TSPSBM	14.4	4.0	0.15	
Корпус для сканирования (scan body)	TSCSB	6.5	4.3	0.030	

등부 2018 년 제 52 호

Registered No. 2018 - 52

인 증

Notarial Certificate

LEE KYUNG MIN

위 , 사용자설명서 에 기재된

attorney-in-fact of

오스템임플란트 주식회사

OSSTEM IMPLANT CO., LTD.

대표이사 엄 태 관

president EOM TAE GWAN.

의 대리인, 이 경 민 은

appeared before me and admitted said

본 공증인의 면전에서 위 본인이

principal's subscription to the attached

기명날인한 것임을 자인하였다.

Instruction For Use.

2018 년 1 월 9 일

This is hereby attested on this 9 th

이 사무소에서 위 인증한다.

day of January , 2018 at this office.

법무법인 국 제

Busan International Law & Notary Offices

소속 부산지방검찰청

Belong to Busan District Public Prosecutors' Office

부산 연제구 법원로 28, 205호

(Geoje-dong, Busan Judicial Offices Town Bldg)

(거제동, 부산법조타운빌딩)

#205, 28, Beobwon-ro, Yeonje-gu, Busan, Korea

공증담당

변 호 사


Park Kweon Byung



(Signature of the Notary Public)

Park Kweon Byung

This office has been authorized by the
Minister of Justice, the Republic of
Korea, to act as Notary Public since
Dec. 31, 1982 under Law No. 3594

Numbered, sewed and sealed 25 sheets in all



Eom Tae Gwan
OSSTEM IMPLANT Co., Ltd
President



66-16, Bansom-ro 513beon-21, Seundae-gu, Busan, Korea

OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.
President Taegwan Eom

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.gov.ru

НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Пусан Интернешенал Лоу энд Нотари Оффисес.
[Busan International Law & Notary Offices.]

(Геойе-донг, Пусан Джудишиал Оффисес Таун Билдинг)
[Geoje-dong, Busan Judicial Offices Town Bldg]
#205, 28, Беобвон-ро, Иеонье-гу,
г. Пусан, Корея
[#205, 28, Yeobwon-ro, Yeonje-gu,
Busan, Korea]

/Тисненная печать:
НОТАРИУС/

Кому: Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России

Мы, **ОССТЕМ ИМПЛАНТ Ко., Лтд. [OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.]**, настоящим заявляем, что данная **инструкция по применению**, предоставленная Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России для регистрации импортированных медицинских товаров, является полной, правильной и подлинной.

Подпись: /подпись/

Имя: Ом Тхэгван [Eom Tae Gwan]

Должность: президент

ОССТЕМ ИМПЛАНТ Ко., Лтд.

Республика Корея, город Пусан, район Хэундэ, 513-я улица Пансон 66-16
[66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-hu, Busan, Korea]

Нотариальное удостоверение

ЛИИ КИУНГ МИН [LEE KYUNG MIN], доверенное лицо доверенное лицо Президента ОМ ТХЭГВАНА [EOM TAE GWAN] компании ОССТЕМ ИМПЛАНТ КО., ЛТД., лично явился ко мне и подтвердил подпись указанного руководителя на прилагаемой Инструкции по применению.

Настоящий документ удостоверен 9 января 2018 года в указанной конторе.

Пусан Интернешенал Лоу энд Нотари Оффисес.
Относится к Районной прокуратуре г. Пусан
(Геойе-донг, Пусан Джудиишал Оффисес Таун Билдинг)
#205, 28, Беобвон-ро, Иеонье-гу, г. Пусан, Корея

/Подпись: Парк Квеон Биунг/
(Подпись нотариуса)

Парк Квеон Биунг [Park Kweon Byung]

Данное учреждение уполномочено Министром юстиции Республики Корея действовать в качестве нотариальной конторы с 31 декабря 1982 года согласно Закону № 3594.

/Подпись/

Ом Тхэгван
ОССТЕМ ИМПЛАНТ Ко., Лтд
Президент

/Штамп: Республика Корея, город Пусан, район Хэундэ, 513-я улица Пансон 66-16
ОССТЕМ ИМПЛАНТ Ко., Лтд.
Президент Таегван Еом/

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.gov.ru

Перевод данного текста выполнен переводчиком Фроловой Мариной Михайловной

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать второго января две тысячи восемнадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Фроловой Марины Михайловны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2018-

12-1641

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.

Г.Б. Акимов

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 29 лист(-а, -ов).

Нотариус:

Registered No. 20 /ℒ — **53**

NOTARIAL CERTIFICATE

Busan International Law & Notary Offices.

(Geoje-dong, Busan Judicial Offices Town Bldg)

#205, 28, Beobwon-ro, Yeonje-gu,
Busan, Korea





Instruction For Use

Attn: Federal Service of Health Care and Social Development Control of Russia

We, **OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.**, hereby declare that the **instruction for use** provided to Federal Service of Health Care and Social Development Control of Russia for Imported Medical Product Recordation is complete, consistent and authentic.

Signature: _____

Name: Eom Tae Gwan

Title: President

OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.

66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan, Korea





**Инструкция по применению
медицинского изделия
«Абатменты трехкомпонентные, двухкомпонентные
TS Abutment System»**

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ**

ОПИСАНИЕ

Это инструкция по применению абатментов TS Link Abutment for Cerec, TS Link Abutment for Public, и TS Pre-milled Abutment.

Абатменты TS Link Abutment for Cerec, TS Link Abutment for Public, и TS Pre-milled Abutment - это детали зубных имплантатов, используемые для зубных протезов, проектируемых индивидуально для каждого отдельного пациента с использованием цифровых данных, таких как информация о местоположении десны и имплантата, подлежащего имплантированию, получаемых через 3-мерное сканирование поверхности полости рта (или модели).

Корпус для сканирования (scan body) и абатмент временный (scan post) - это продукт для компьютерных программ проектирования и моделирования (CAD/CAM), поставляемых с интерфейсом, связанным с секцией присоединения имплантатов.

Винт абатмента для крепления последнего к имплантату, а также изделия для сканирования (scan body, scan post) задействованные в процессе сканирования, используются совместно.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Абатменты трехкомпонентные, двухкомпонентные TS Abutment System

Варианты исполнения: см Приложение 1 к Инструкции.

НАЗНАЧЕНИЕ

Абатмент - это одноразовое медицинское изделие, предназначенное для обеспечения постоянного промежуточного уровня между дентальным имплантатом и окончательным протезом/реставрацией (например, мостом, одним зубом, покрывным протезом).

Условия применения: абатмент предназначен для использования в стоматологических клиниках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Абатменты используются для восстановления одного или нескольких зубов, утраченных пациентом в нижнечелюстной/верхнечелюстной ветви либо при полном отсутствии зубов на челюсти пациента, а также для выполнения временных или постоянных протезов с креплением на цементе или на винте.

Абатмент и сопутствующие детали используются совместно с имплантатом, служа опорой для ортопедических реставраций, таких как коронки, мосты или съемные протезы с фиксацией на имплантатах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Абатмент нельзя использовать непосредственно для отливки/обжига.

Следует избегать лечения пациентов, имеющих следующие противопоказания:

- Пациенты с гемофилией
- Пациенты, у которых имеются проблемы в отношении костей и заживления ран
- Пациенты с неконтролируемым диабетом, заболеваниями тканей, которые воздействуют на состояние кости или заживление ран, заядлые курильщики или лица, злоупотребляющие спиртными напитками
- Пациенты, иммунная система которых нарушена из-за химиотерапии и/или радиотерапии
- Пациенты с инфекциями или воспалениями полости рта (несоответствующая гигиена полости рта, бруксизм)
- Пациенты с нарушением прикуса/смыкания, не поддающимся лечению, недостаточным пространством зубной дуги

- Пациенты с недостаточной высотой или шириной кости
- Любые пациенты, которые не соответствуют условиям для выполнения операции

Внимание! Для установки протезов с использованием абатментов TS Link Abutment for Cerec, TS Link Abutment for Public, и TS Pre-milled Abutment, необходимо применять имплантаты, поставляемые компанией OSSTEM IMPLANT.

Программное обеспечение, фрезервальное оборудование и материалы должны отвечать указаниям

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИЗДЕЛИЯ

- Материалы

Абатменты TS Link Abutment for Public, Абатменты TS Link Abutment for Cerec, Абатменты TS Pre-Milled Abutment изготовлены из титанового сплава марки Ti-6Al-4V.

Корпус для сканирования (scan body) (артикул TSCSB) изготовлен из АБС пластика, марки CAS.

Корпус для сканирования (scan body) (артикулы TSPSBR, TSPSBM) изготовлен из полиэфирного материала эфира оксикетона (PEEK), марки: DIN EN ISO 527, DIN EN ISO 180 (Izod)

- Конструкция

Индивидуальные абатменты следует изготавливать с применением цифровых технологий, используя зубоврачебное ПО CAD, и они должны соответствовать базовым правилам.

Абатмент временный (scan post) и корпус для сканирования (scan body) применяются для записи в цифровом формате местоположения абатментов или имплантатов, и управляются от сканера (цифровое изготовление слепка).

С помощью данной технологии можно проектировать коронку/абатмент на основе библиотеки, зарегистрированной в ПО.

Зарегистрированную библиотеку нельзя произвольно изменять или дорабатывать.

Профиль выступления следует формировать плавным, вдоль края мягких тканей, на основе анатомической структуры. Если вы хотите увеличить выступание над краем области заживления десны, то сначала необходимо проконсультироваться с лечащим дантистом.

Для того чтобы обеспечить эстетичный вид зубов и сделать более удобным удаление цемента на стыке, участок запаса обычно располагается несколько ниже края десны вдоль контура десны в полости рта.

Толщина стенки должна быть 0,35 мм или больше, диаметр абатмента не должен быть менее Ø4,0 мм, а угол - более 30°.

Его следует формировать плавным повсюду, и не допускать заостренных кромок или ребер.

(Однако для абатмента TS Link Abutment for Cerec необходимо использовать специальные сканер, ПО и фрезервальное оборудование, имеющиеся в наличии у компании Sirona. Максимальный угол при проектировании абатмента ограничен значением 20°.)

- Фрезерование и полировка

Для изготовления абатмента по цифровой модели инструменты должны быть чистыми, не иметь повреждений; во время обработки на основе проектного файла (CAM) следует обеспечивать надлежащее охлаждение обрабатываемого оборудования).

Следите за тем, чтобы на обрабатываемой детали не было заусенцев или заостренных кромок.

Не изменяйте произвольно угол, толщину стенки или высоту ниже TS Link абатмента.

Кроме того, удостоверьтесь, что соблюдаются инструкции производителей используемых материалов и оборудования.

- Формование и обжиг керамических материалов

Керамические материалы, включая циркониевую керамику, следует формовать и обжигать до связывания с абатментом, а также использовать надлежащие материалы, основываясь на указаниях производителя.

- Соединение

Для того чтобы соединить керамику, например, циркониевую, с абатментом, рекомендуются композиционные цементы для абатментов PANAVIA F 2.0 (Kuraray Europe) или Multilink (Ivoclar Vivadent).

Следует придерживаться инструкций производителя. Для защиты соединения с имплантатом, выполненным на абатменте, и удобства обработки, абатмент следует монтировать на Lab Analog.

Закрыв вход резбового отверстия воском, произведите обработку поверхности сопряжения абатмента струей частиц Al_2O_3 размером 50 мкм под давлением 2 бара или менее и очистите ее полностью (не допустимо наличие остатков посторонних субстанций).

Нанесите клей на поверхность абатмента, нажимайте на керамические материалы, например, циркониевую керамику, до тех пор, пока не почувствуете сопротивление, и установите абатмент в правильном направлении.

Удостоверьтесь, что он правильно установлен, и сотрите клей, оставшийся на поверхности.

- Финишная обработка

После того, как клей полностью отвердеет, осторожно воспользуйтесь инструментом для удаления остатков клея, затем проверьте изнутри отверстие для винта и осторожно удалите оттуда остатки клея.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Изделия транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах.

Условия хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя: хранить в сухом месте при комнатной температуре.

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хирургическая технология зубной имплантации требует наличия опыта; это сложная процедура, которая требует официального обучения для выполнения имплантации.

Важно учитывать анатомию и пригодность имеющейся кости для размещения абатмента. Подготовьте абатмент, учитывая ожидаемые ситуации и предостережения. Визуальный осмотр, а также панорамные и периферийные рентгеновские снимки, важны для определения анатомических ориентиров, состояния прикуса, состояния периодонта и удовлетворительного качества кости. Также могут быть полезны латеральные цефалометрические рентгеновские снимки, КТ-исследования и томограммы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

необходимо обращать особое внимание на температуру и хирургические заболевания, а также на устранение первоначальных загрязнений и инфекции.

Все приборы и инструменты, используемые при операции, должны содержаться в рабочем состоянии.

Кроме того, поскольку компоненты абатментов имеют малый размер, необходимо следить за тем, чтобы не дать пациенту проглотить или вдохнуть их.

При выполнении протезирования важно обеспечить надлежащее распределение нагрузки, проверив согласование между протезом и смежными зубами, а также прикус.

Поскольку в ходе выполнения протезирования могут создаваться металлические и неметаллические аэрозоли и пыль, вредные для организма человека, настоятельно рекомендуется при таких окружающих условиях надевать защитные перчатки и маску, а в окружении иметь пылесборник.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Содержите полость рта в чистоте.

Следите за тем, чтобы к вылеченной области не прилагалось слишком большое напряжение до тех пор, пока не будет установлен последний протез, и следуйте указаниям, выдаваемым компетентным дантистом.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Эта проблема может возникнуть после установки имплантата (потеря стабильности имплантата, потеря протеза и т.д.). Недостаточное качество и количество остающейся кости, инфекция, несоответствующая гигиена полости рта или отсутствие сотрудничества со стороны пациента, подвижность имплантата, частичное повреждение ткани и неправильное положение и размещение имплантата могут стать причиной его нестабильности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Абатмент и компоненты абатмента Osstem совместима только с имплантатом OSSTEM. Их нельзя использовать с другими имплантатами. Смотрите инструкцию по применению Osstem, каталог или наш веб-сайт (www.osstem.com) для получения более подробной информации. Относительно кода изделия, спецификации, даты выпуска и даты окончания срока действия смотрите этикетку изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки абатментов входит:

- абатмент;
- корпус для сканирования (только для трехкомпонентных абатментов);
- винт
- инструкция (в сокращенном виде).
- наклейка пациента идентификационная.

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Изделия поставляются в нестерильном состоянии.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Перед установкой в полость рта пациента дезинфицируйте абатменты в автоклаве при 132 ° C в течение 15 минут и полностью высушите их.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

«Осстем Имплант Ко., Лтд.» (Osstem Implant Co., Ltd.), Корея, 66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan, Korea 48002. Тел: +82 70 4394 9619. Факс: +82 70 4394 0404

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ

Общество с ограниченной ответственностью «Осстем» (ООО «Осстем»), 115432, Россия, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корпус 7, этаж 8, офис 1. Тел: (495) 739-99-25

РАСШИФРОВКА ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ МАРКИРОВКЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

№	Описание	Символ	№	Описание	Символ
1	Не использовать повторно		6	Знак декларирования	
2	Использовать до (Годен до)		7	Номер по каталогу	
3	Меры предосторожности: Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению		8	Дата изготовления	
4	Производитель		9	Не стерильно	
5	Код партии				

Абатменты трехкомпонентные, двухкомпонентные TS Abutment System, варианты исполнения:

I. Абатменты двухкомпонентные TS Abutment System

[illegible]

- Абатмент (TSPM10CAM)
- Винт EbonyGold screw (Mini) (GSABSM)
- Инструкция
- Наклейка пациента идентификационная

- Абзамент (TSPM07MXM)
- Винт EbonyGold screw (Mini) (GSABSM)
- Инструкция
- Наклейка пациента идентификационная

**1. Абатмент трехкомпонентный TS Link
Abutment for Public (TSPTB431MWH) в
составе:**

- Аббатмент (TSPTB431M)
- Винт EbonyGold screw (Mini) (GSABSM)
- Корпус для сканирования (scan body) (TSPSBM)
- Инструкция

- Абатмент (TSPTB451M)
- Винт EbonyGold screw (Mini) (GSABSM)
- Корпус для сканирования (scan body) (TSPSBM)
- Инструкция
- Наклейка пациента идентификационная

- Абатмент (TSPTB431MN)
- Винт EbonyGold screw (Mini) (GSABSM)
- Корпус для сканирования (scan body) (TSPSBM)

- Аббревиатура (TSPTB451MN)
- Винт EbonyGold screw (Mini) (GSABSM)
- Корпус для сканирования (scan body) (TSPSBM)
- Инструкция

- Абзамент (TSPTB432M)
- Винт EbonyGold screw (Mini) (GSABSM)
- Корпус для сканирования (scan body) (TSPSBM)
- Инструкция

- Абзамент (TSPTB452M)
- Винт EbonyGold screw (Mini) (GSABSM)
- Корпус для сканирования (scan body) (TSPSBM)
- Инструкция

- Абатмент (TSPTB432MN)

— Наклейка пациента идентификационная

- Абатмент (TSPTB452MN)
- Винт EbonyGold screw (Mini) (GSABSM)
- Корпус для сканирования (scan body) (TSPSBM)

**9. Абатмент трехкомпонентный TS Link
Abutment for Public (TSPTB431RWH) в
составе:**

- Абатмент (TSPTB431R)
- Винт EbonyGold screw (Regular) (GSABSS)
- Корпус для сканирования (scan body) (TSPSBR)

**10. Абатмент трехкомпонентный TS Link
Abutment for Public (TSPTB451RWH) в
составе:**

- Абатмент (TSPTB451R)
- Винт EbonyGold screw (Regular) (GSABSS)
- Корпус для сканирования (scan body) (TSPSBR)

11. Абатмент трехкомпонентный TS Link
Abutment for Public (TSPTB431RNWH) в
составе:

- Абзамент (TSPTB431RN)
- Винт EbonyGold screw (Regular) (GSABSS)
- Корпус для сканирования (scan body) (TSPSBR)

12. Абатмент трехкомпонентный TS Link
Abutment for Public (TSPTB451RNWH) в
составе:

- Абзамент (TSPTB451RN)
- Винт EbonyGold screw (Regular) (GSABSS)
- Корпус для сканирования (scan body) (TSPSBR)

13. Абатмент трехкомпонентный TS Link
Abutment for Public (TSPTB432RWH) в
составе:

- Абзамент (TSPTB432R)
- Винт EbonyGold screw (Regular) (GSABSS)
- Корпус для сканирования (scan body) (TSPSBR)

14. Абатмент трехкомпонентный TS Link
Abutment for Public (TSPTB452RWH) в

- Инструкция

**15. Абатмент трехкомпонентный TS Link
Abutment for Public (TSPTB432RNWH) в
составе:**

- Абатмент (TSPTB432RN)
- Винт EbonyGold screw (Regular) (GSABSS)
- Корпус для сканирования (scan body) (TSPSBR)

- Инструкция
- Наклейка пациента идентификационная

**16. Абатмент трехкомпонентный TS Link
Abutment for Public (TSPTB452RNWH) в
составе:**

- Абатмент (TSPTB452RN)
- Винт EbonyGold screw (Regular) (GSABSS)
- Корпус для сканирования (scan body) (TSPSBR)

- Инструкция
- Наклейка пациента идентификационная

**17. Абатмент трехкомпонентный TS Link
Abutment for Cerec (TSCTBMWH) в
составе:**

- Абатмент (TSCTBM)
- Винт EbonyGold screw (Mini) (GSABSM)
- Корпус для сканирования (scan body) (TSCSB)

- Инструкция
- Наклейка пациента идентификационная

18. Абатмент трехкомпонентный TS Link
Abutment for Cerec (TSCTBMNWH) в
составе:

- Винт Ebony Gold screw (Mini) (GSABSM)

- Корпус для сканирования (scan body) (TSCSB)

- Инструкция
- Наклейка пациента идентификационная

19. Абатмент трехкомпонентный TS Link
Abutment for Cerec (TSCTBRWH) в составе:

- Абатмент (TSCTBR)
- Винт EbonyGold screw (Regular) (GSABSS)
- Корпус для сканирования (scan body) (TSCSB)

- Инструкция
- Наклейка пациента идентификационная

20. Абатмент трехкомпонентный TS Link
Abutment for Cerec (TSCTBRNWH) в

составе:
- Абатмент (TSCTBRN)

- Винт EbonyGold screw (Regular) (GSABSS)
- Корпус для сканирования (scan body) (TSCSB)

- Инструкция
- Наклейка пациента идентификационная

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения



www.roszdravnadzor.gov.ru

등부 2018 년 제 53 호

Registered No. 2018 - 53

인 증

Notarial Certificate



LEE KYUNG MIN

위, 사용자설명서 에 기재된

attorney-in-fact of

오스템임플란트 주식회사

OSSTEM IMPLANT CO., LTD.

대표이사 엄 태 관

president EOM TAE GWAN.

의 대리인, 이 경 민 은

appeared before me and admitted said

본 공증인의 면전에서 위 본인이

principal's subscription to the attached

기명날인한 것임을 자인하였다.

Instruction For Use.

2018 년 1 월 9 일

This is hereby attested on this 9 th

이 사무소에서 위 인증한다.

day of January , 2018 at this office.

법무법인 국 제

Busan International Law & Notary Offices

소속 부산지방검찰청

Belong to Busan District Public Prosecutors' Office

부산 연제구 법원로 28, 205호

(Geoje-dong, Busan Judicial Offices Town Bldg)

(거제동, 부산법조타운빌딩)

#205, 28, Beobwon-ro, Yeonje-gu, Busan, Korea

공증담당

변 호 사

Park Kweon Byung

(Signature of the Notary Public)

Park Kweon Byung

This office has been authorized by the

Minister of Justice, the Republic of

Korea, to act as Notary Public since

Dec. 31, 1982 under Law No. 3594

Numbered, sewed and sealed 10 sheets in all



Eom Tae Gwan
OSSTEM IMPLANT Co., Ltd
President



Person
Long-1050
OSSTEM
President

Korea
Ltd.
Eom
Eom

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.gov.ru

НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Пусан Интернешенал Лоу энд Нотари Оффисес.
[Busan International Law & Notary Offices.]

(Геойе-донг, Пусан Джудишиал Оффисес Таун Билдинг)

[Geoje-dong, Busan Judicial Offices Town Bldg]

#205, 28, Беобвон-ро, Иеонье-гу,

г. Пусан, Корея

[#205, 28, Beobwon-ro, Yeonje-gu,
Busan, Korea]

/Тисненная печать:
НОТАРИУС/

Кому: Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России

Мы, **ОССТЕМ ИМПЛАНТ Ко., Лтд. [OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.]**, настоящим заявляем, что данная **инструкция по применению**, предоставленная Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России для регистрации импортированных медицинских товаров, является полной, правильной и подлинной.

Подпись: /подпись/

Имя: Ом Тхэгван [Eom Tae Gwan]

Должность: президент

ОССТЕМ ИМПЛАНТ Ко., Лтд.

Республика Корея, город Пусан, район Хэундэ, 513-я улица Пансон 66-16
[66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-hu, Busan, Korea]

Нотариальное удостоверение

ЛИИ КИУНГ МИН [LEE KYUNG MIN], доверенное лицо Президента ОМ ТХЭГВАНА [EOM TAE GWAN] компании ОССТЕМ ИМПЛАНТ КО., ЛТД., лично явился ко мне и подтвердил подпись указанного руководителя на прилагаемой Инструкции по применению.

Настоящий документ удостоверен 9 января 2018 года в указанной конторе.

Пусан Интернешенал Лоу энд Нотари Офисес.
Относится к Районной прокуратуре г. Пусан
(Геойе-донг, Пусан Джудишиал Оффисес Таун Билдинг)
#205, 28, Беобвон-ро, Иеонье-гу, г. Пусан, Корея

/Подпись: Парк Квеон Биунг/
(Подпись нотариуса)

Парк Квеон Биунг [Park Kweon Byung]

Данное учреждение уполномочено Министром юстиции Республики Корея действовать в качестве нотариальной конторы с 31 декабря 1982 года согласно Закону № 3594.

/Подпись/

Ом Тхэгван
ОССТЕМ ИМПЛАНТ Ко., Лтд.
Президент

/Штамп: Республика Корея, город Пусан, район Хэундэ, 513-я улица Пансон 66-16
ОССТЕМ ИМПЛАНТ Ко., Лтд.
Президент Таегван Еом/

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.roszdravnadzor.gov.ru

Перевод данного текста выполнен переводчиком Фроловой Мариной Михайловной

Российская Федерация
Город Москва

Двадцать второго января две тысячи восемнадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Фроловой Марины Михайловны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2018-12-1642

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.

Г.Б. Акимов

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 14 лист(-а,-ов).

Нотариус: