

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Крейт»

Кривицкая И.А.

01.09.22 2022 г.



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«БАНДАЖ ДЛЯ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА,
СОГРЕВАЮЩИЙ – «КРЕЙТ»»**

НЕСТЕРИЛЬНО

ТУ 9396 – 006 – 96814693 – 2009

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, для согревания пояснично-крестцового отдела позвоночника при радикулите, остеохондрозе и других заболеваниях позвоночника.

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Профилактика переохлаждения;
Радикулиты, невриты, миозиты;
Заболевания почек в неострый период.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

4. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж для пояснично-крестцового отдела позвоночника, согревающий - «Крейт»	1
Инструкция	1
Индивидуальная потребительская упаковка	1

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1. Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- 6.2. Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- 6.3. Не допускается применять по истечении срока хранения.
- 6.4. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- 6.5. Не использовать вблизи открытого пламени.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7.1. Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-3.

Таблица 1 - Размерный ряд и масса изделия Б-702

Размер	Обхват талии, см	Масса, г
		Б-702
№ 3	55-75	253,6
№ 4	75-95	299,9
№ 5	95-115	345,0
№ 6	115-135	366,2
№ 7	135-155	387,4
№ 8	155-175	408,6

Таблица 2- Размерный ряд и масса изделий Б-710, Б-714

Размер	Обхват талии, см	Масса, г	
		Б-710	Б-714
№ 1	60-67	84,6	94,9
№ 2	67-75	89,9	102,8
№ 3	75-81	95,0	106,1
№ 4	81-87	109,1	121,8
№ 5	87-98	112,6	132,9
№ 6	98-109	129,9	142,3
№ 7	109-120	139,9	153,2
№ 8	120-131	145,6	163,0
№ 9	131-142	151,3	172,8
№ 10	142-153	157,0	182,6

Таблица 3 - Размерный ряд и масса изделия Б-711

Размер	Обхват талии, см	Масса, г
		Б-711
№ 1	56-68	97,8
№ 2	68-81	112,4
№ 3	81-94	121,1
№ 4	94-107	126,6
№ 5	107-120	137,0
№ 6	120-133	149,0
№ 7	133-146	161,0
№ 8	146-159	173,0
№ 9	159-172	185,0
№ 10	172-185	197,0

7.2 Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- 8.1. Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- 8.2. Бандаж Б-702 надеть в положении лежа на спине, при этом ребра жесткости должны располагаться на одинаковом расстоянии от позвоночника. Плотно застегнуть бандаж.
- 8.3. Бандаж Б-710, Б-711 рекомендуется надевать через ноги.
- 8.4. Бандаж Б-714 расположить на теле и застегнуть на застежку-молнию.
- 8.5. СТИРКА И УХОД.
- 8.5.1. Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.
- 8.5.2. Отбеливание запрещено.

- 8.5.3. Не применять барабанную сушилку.
- 8.5.4. Глажение запрещено.
- 8.5.5. Чистка запрещена.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 9.1. Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- 9.2. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- 9.3. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- 9.4. Средний срок хранения не менее трех лет

10. УТИЛИЗАЦИЯ

- 10.1. Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 11.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 11.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.
- 11.3. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.
- 11.4.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.goszdravnadzor.gov.ru

1	прошито, пронумеровано и скреплено
печатью	<i>т.р.и</i> лист <i>а</i>
Должность: Генеральный директор ООО «Крейт»	
Кривицкая И.А.	
Подпись	<i>И.А. Кривицкая</i>
МП	
Дата:	

