



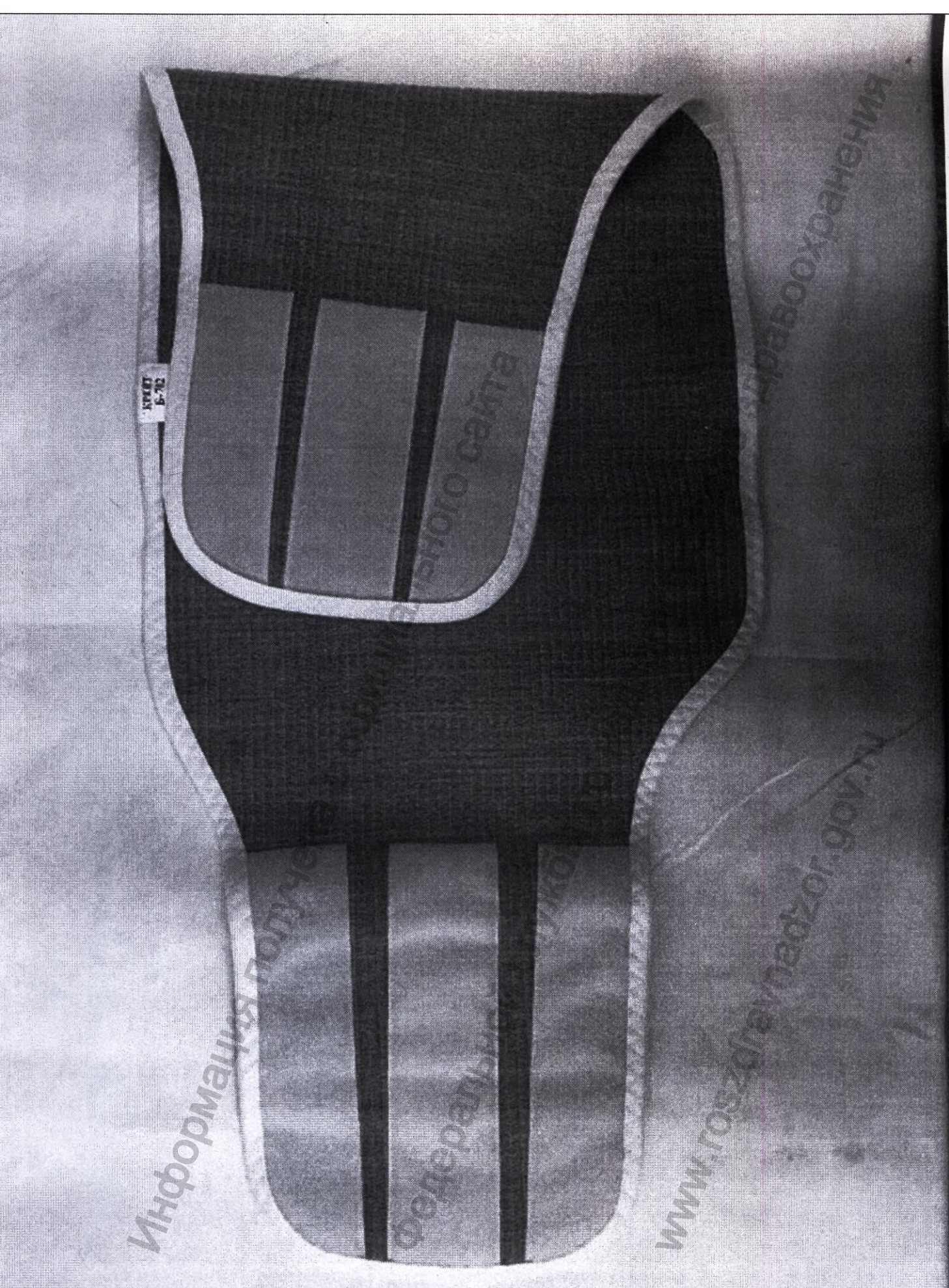


Бандаж для пояснично-крестцового отдела позвоночника, согревающий – «Крейт», Б-702

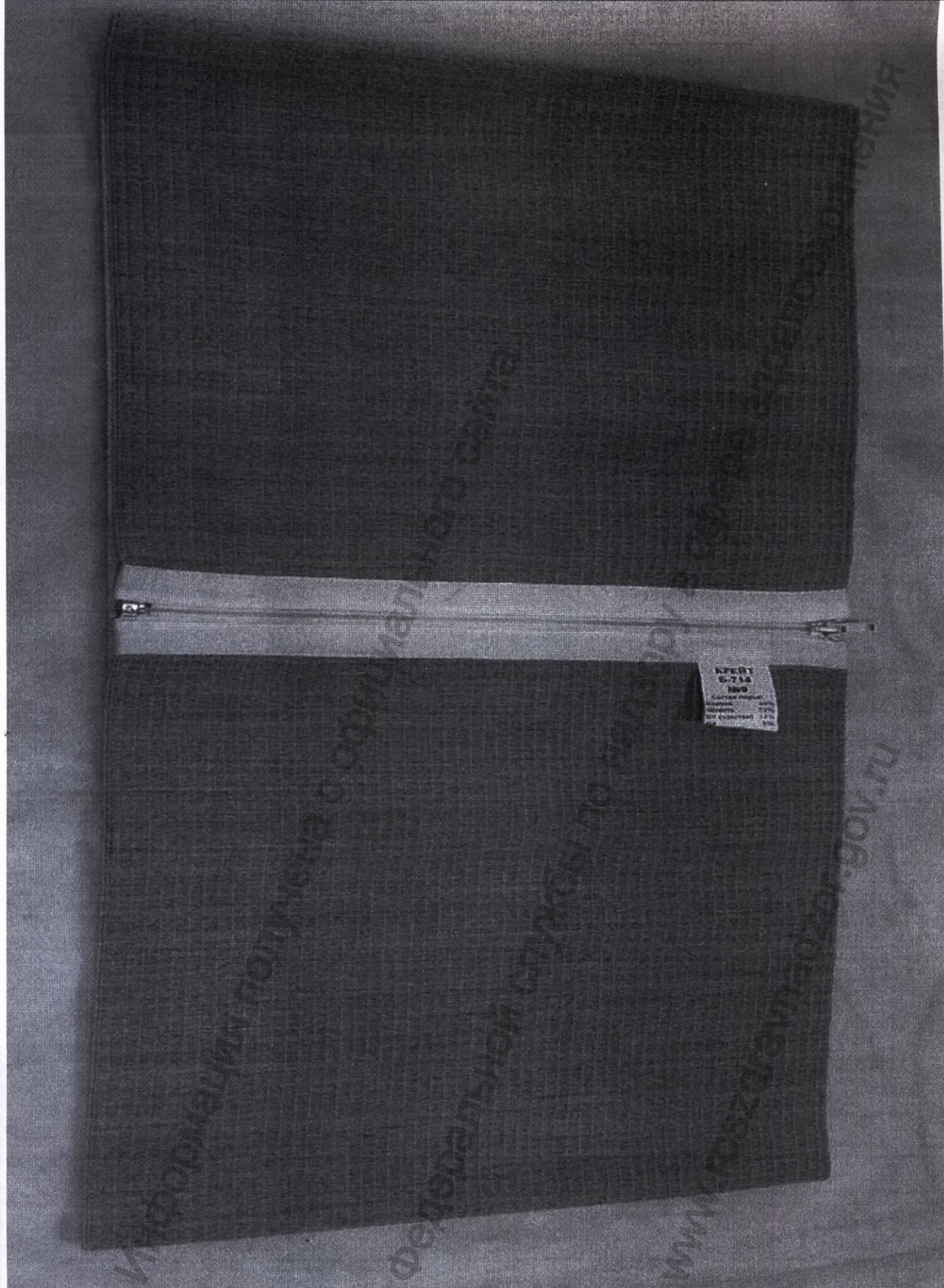

**Бандаж для пояснично-крестцового отдела позвоночника, согревающий – «Крейт», Б-714
(а также Б-710, Б-711)**

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 лист(ов) ⁹

Руководитель организации

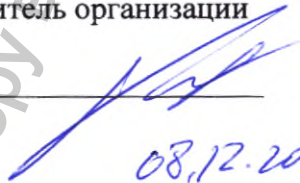

08.12.202



Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере


www.roszdravnadzor.gov.ru

Макет ярлыка для маркировки изделий

КРЕЙТ

Артикул

Размер

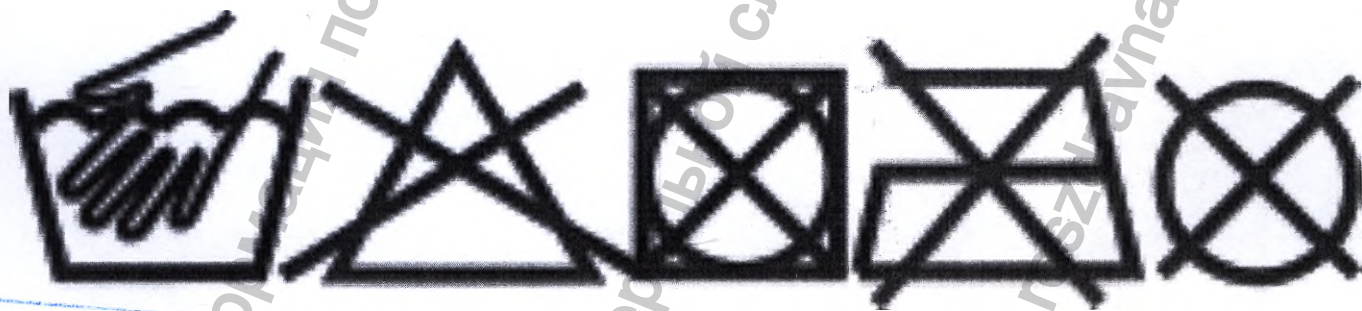

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Состав основного

материала изделия:



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



Размер	Обхват талии, см	Масса, г
№3		
№4		
№5		
№6		
№7		
№8		

Бандаж для пояснично-крестцового отдела позвоночника, согревающий – «Крейт»

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, для согревания пояснично-крестцового отдела позвоночника при радикулите, остеохондрозе и других заболеваниях позвоночника.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Профилактика переохлаждения, радикулиты, невриты, миозиты, заболевания почек в неострый период.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Бандаж для пояснично-крестцового отдела позвоночника, согревающий – «Крейт».

Инструкция – 1 шт.

Индивидуальная потребительская упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Бандаж Б-702 надеть в положении лежа на спине, при этом ребра жесткости должны располагаться на одинаковом расстоянии от позвоночника. Плотнo застегнуть бандаж. Бандаж Б-710, Б-711 рекомендуется надевать через ноги. Бандаж Б-714 расположить на теле и застегнуть на застежку-молнию.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20 ____ года.

№ ФСР

ТУ 9396 – 006-96814693–2009.

Производитель: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее трех лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

Номер партии:

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

Состав:

Дата изготовления:

20 ____ г.





Размер	Обхват талии, см	Масса, г
№1		
№2		
№3		
№4		
№5		
№6		
№7		
№8		
№9		
№10		

Бандаж для пояснично-крестцового отдела позвоночника, согревающий – «Крейт»

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, для согревания пояснично-крестцового отдела позвоночника при радикулите, остеохондрозе и других заболеваниях позвоночника.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Профилактика переохлаждения, радикулиты, невриты, миозиты, заболевания почек в неострый период.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Бандаж для пояснично-крестцового отдела позвоночника, согревающий – «Крейт».

Инструкция – 1 шт.

Индивидуальная потребительская упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Бандаж Б-702 надеть в положении лежа на спине, при этом ребра жесткости должны располагаться на одинаковом расстоянии от позвоночника. Плотно застегнуть бандаж. Бандаж Б-710, Б-711 рекомендуется надевать через ноги. Бандаж Б-714 расположить на теле и застегнуть на застежку-молнию.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20 ____ года.

№ ФСР _____

ТУ 9396 – 006-96814693-2009.

Производитель: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее трех лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

Номер партии: _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

Состав: _____

Дата изготовления: _____ 20 ____ г.



Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

www.roszdravnadzor.gov.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 лист(ов) ⁹

Руководитель организации

8.12.2017





Размер изделия:

Количество изделий:

Бандаж для пояснично-крестцового отдела позвоночника, согревающий – «Крейт»

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие

от 20 года.

№ ФСР

ТУ 9396 – 006–96814693–2009.

Производитель: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»), Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д.11, корп. 4, литер А, пом. 24 Н, тел. 8 (800) 700 - 68 -50, e-mail: torg@kreitspb.ru. www.kreitspb.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150 – 69, но для температуры от -40 °С до ± 40 °С. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (от -40 до +40) и не ближе, чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Средний срок хранения не менее 3-х лет.

Дата изготовления:

20

Номер партии:



При получении груза проверить целостность упаковки

КОПИЯ ВЕРНА

Получатель:

Адрес:

Телефон:

Номер заказа:

Вес брутто:



Отправитель: ООО «Крейт»

Адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова д. 10

Телефон: 8 (812) 748-25-00

