

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «КОСМЕТИК»
Мансурова Е.А.
«12» июня 2020 г.



ЭТИКЕТКА


на медицинское изделие

Аппарат медицинский лазерный Beauty Instrument™ Laser Prof модель DPL 2
по ТУ 26.60.13-001-06955800-2019

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.gov.ru

1) На каждом аппарате выполнена маркировка, где указано:

- наименование и модель изделия;
- наименование производителя;
- адрес и контактные данные производителя;
- серийный номер;
- дата производства;
- срок годности;
- тип рабочей части;
- длина волны лазерного излучения;
- защитное заземление;
- требования к электропитанию (напряжение, частота, потребляемая мощность, ток);
- символы «изготовитель», «серийный номер», «дата изготовления», «использовать до», «рабочая часть типа BF», «переменный ток», «диапазон влажности», «температурный диапазон», «обратитесь к инструкции по применению», «защитное заземление»;
- степень защиты от опасного проникновения твердых веществ и воды - IP21;
- предупреждающая маркировка: «Знак опасности» и поясняющая маркировка: «Лазерное излучение», «Избегайте облучения глаз или кожи прямым или рассеянным излучением», «Лазерная аппаратура класса 4»;
- предупреждающая маркировка: «Лазерная апертура» вблизи каждой апертуры, через которую испускается лазерное излучение (по ГОСТ IEC 60825-1-2013).

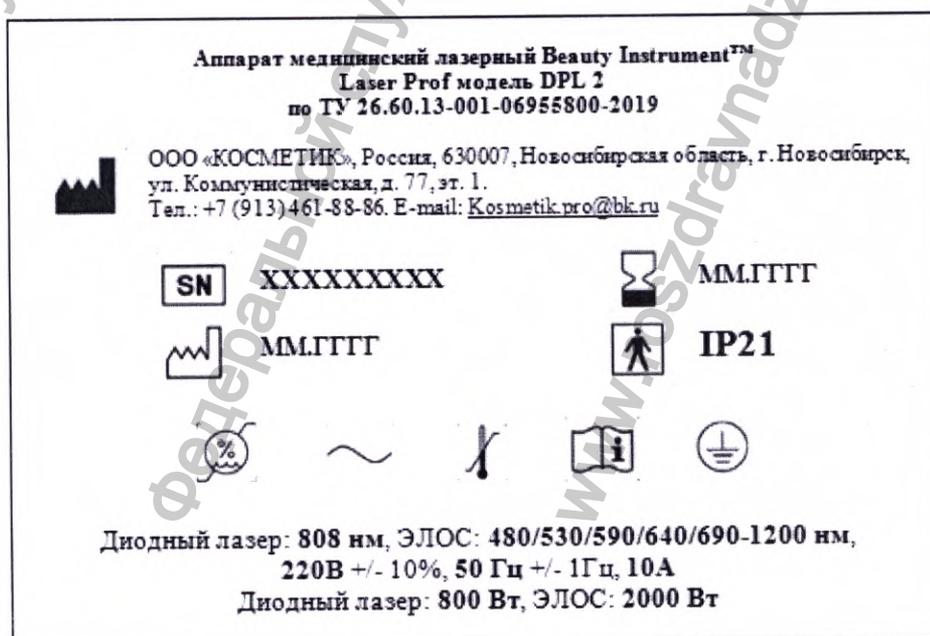



ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ОБЛУЧЕНИЯ ГЛАЗ
ИЛИ КОЖИ ПРЯМЫМ
ИЛИ РАССЕЯНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 4

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.gov.ru

- 2) На каждом потребительском ящике наклеен ярлык с указанием:
- наименование и модель изделия;
 - наименование производителя;
 - адрес и контактные данные производителя;
 - серийный номер;
 - дата производства;
 - срок годности;
 - длина волны лазерного излучения;
 - требования к электропитанию (напряжение, частота, потребляемая мощность, ток);
 - символы «изготовитель», «серийный номер», «дата изготовления», «использовать до», «диапазон влажности», «температурный диапазон», «беречь от влаги», «хрупкое. Осторожно», «верх», «обратитесь к инструкции по применению»;
 - номер и дата регистрационного удостоверения;
 - условия транспортировки и хранения;
 - содержимое упаковки.

Аппарат медицинский лазерный Beauty Instrument™
Laser Prof модель DPL 2
по ТУ 26.60.13-001-06955800-2019

 ООО «КОСМЕТИК», Россия, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, д. 77, эт. 1.
Тел.: +7 (913) 461-88-86. E-mail: [Kosmetik.pro@bk.ru](mailto:kosmetik.pro@bk.ru)

 SN XXXXXXXXX  ММ.ГГГГ
 ММ.ГГГГ

Регистрационное удостоверение № XXXXXXXX от XXXXXX

Диодный лазер: 808 нм, ЭЛОС: 480/530/590/640/690-1200 нм,
220В +/- 10%, 50 Гц +/- 1Гц, 10А
Диодный лазер: 800 Вт, ЭЛОС: 2000 Вт

Пояснение символов

Символ маркировки	Расшифровка
	Изготовитель
	Серийный номер
	Дата изготовления
	Использовать до
	Переменный ток
	Рабочая часть типа BF
	Защитное заземление
IP21	Степень защиты от опасного проникновения твердых веществ и воды IP21
	Диапазон влажности
	Температурный диапазон
	Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере э

www.goszdravnadzor.gov.ru

В документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5 листов

Ген. директор Мансуров С.И.

Дата: 23.04.2020г



Общество с ограниченной ответственностью
«КОСМЕТИК»

Российская Федерация, Новосибирская область, г.Новосибирск,
ул.Коммунистическая, д. 77, этаж 1
Телефон: +7 (913) 461-88-86, E-mail: Kosmetik.pro@bk.ru

Эксплуатационная документация на медицинское изделие. Руководство по эксплуатации	Аппарат медицинский лазерный Beauty Instrument™ Laser Prof модель DPL 2 по ТУ 26.60.13-001-06955800-2019	Стр. 1 из 17
		Версия 1
		Утверждено Генеральный директор ООО «КОСМЕТИК» Е.А. Мансурова «12» июня 2020 г.




Фотографическое изображение медицинского изделия

АППАРАТ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ BEAUTY
INSTRUMENT™ LASER PROF
МОДЕЛЬ DPL 2
по ТУ 26.60.13-001-06955800-2019

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.gov.ru

Москва 2020


1. Аппарат медицинский лазерный Beauty Instrument™ Laser Prof модель DPL 2 по ТУ 26.60.13-001-06955800-2019: Основной блок управления

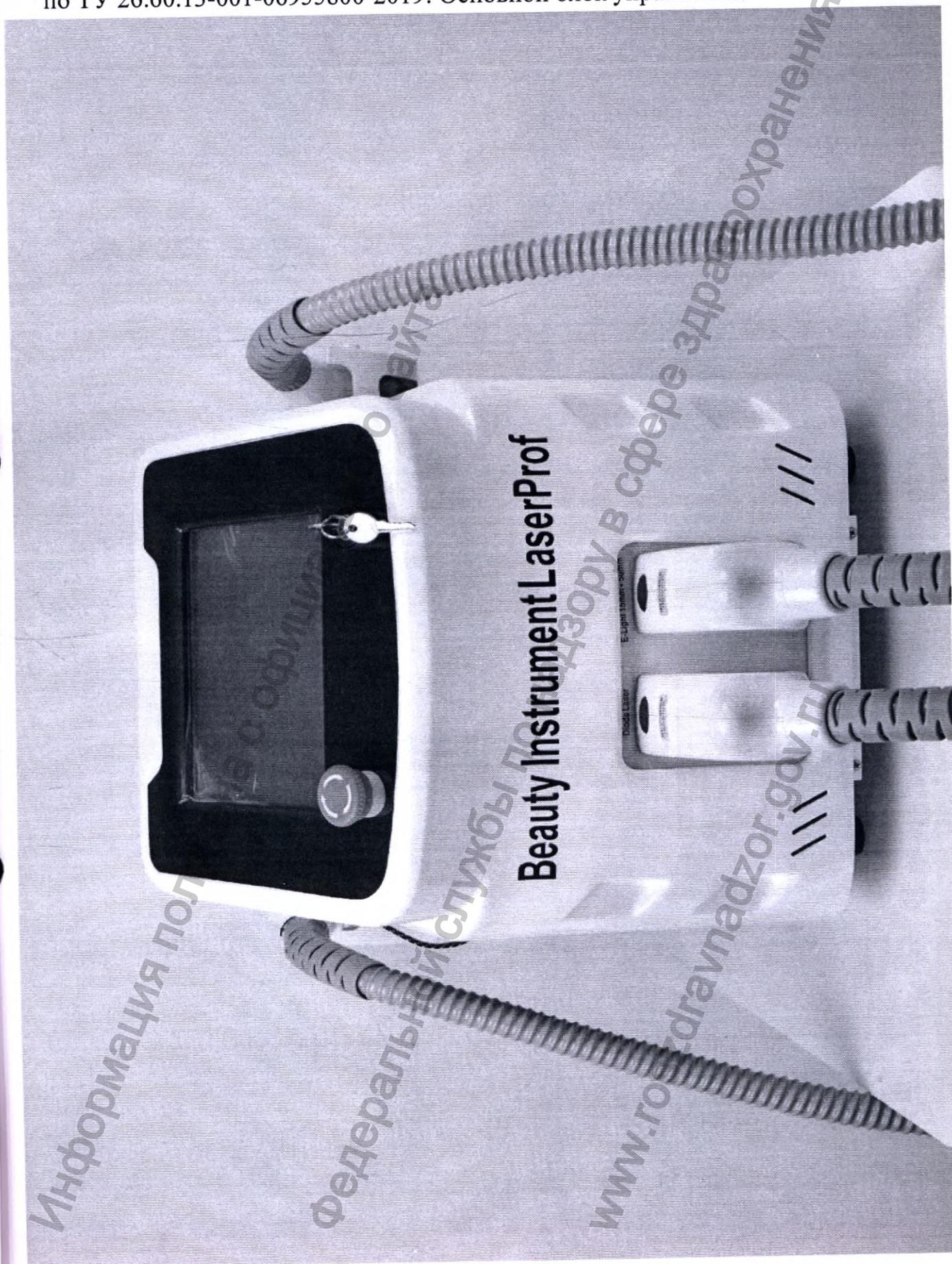


Педаль управления




Кабель электропитания

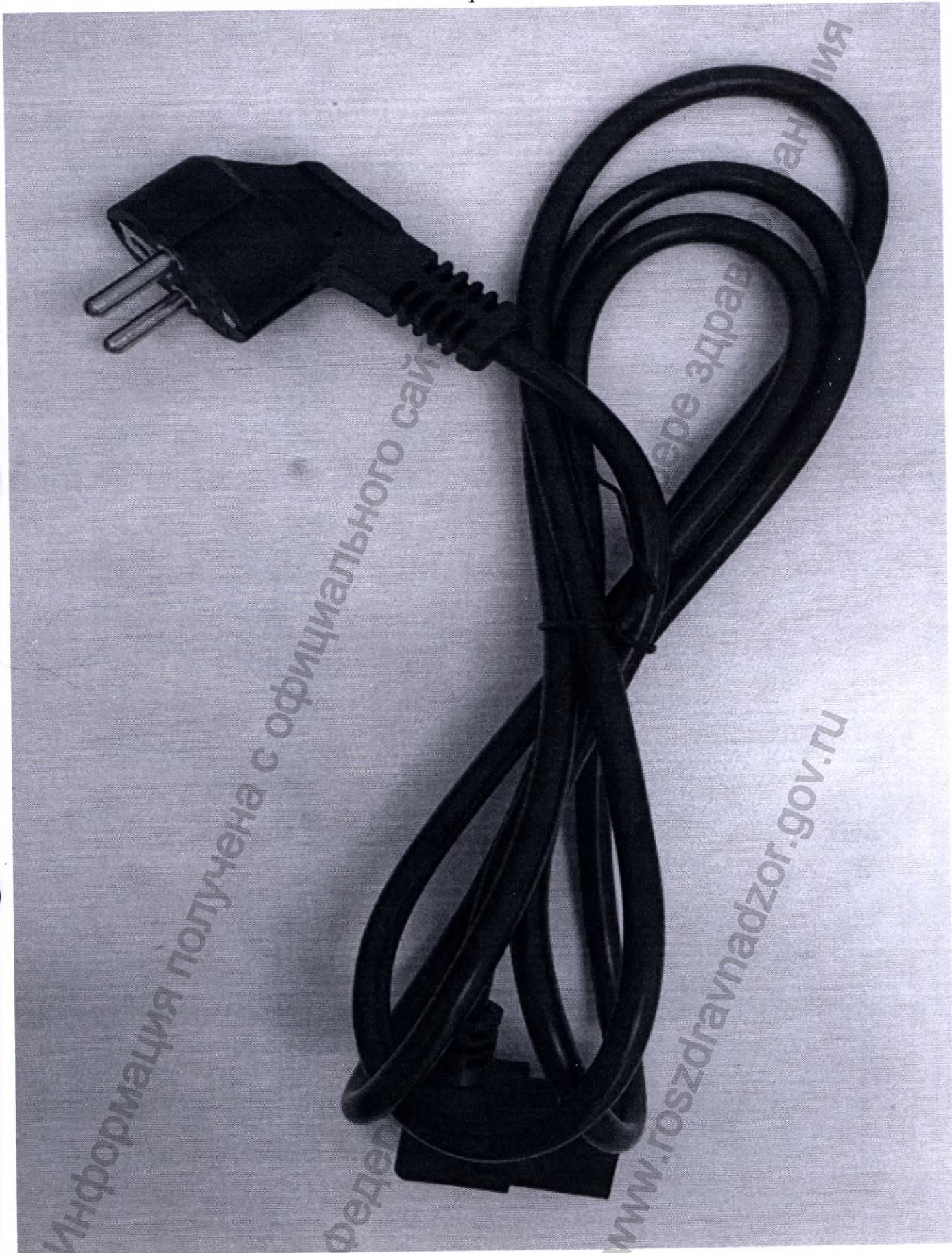

Ключи от основного блока

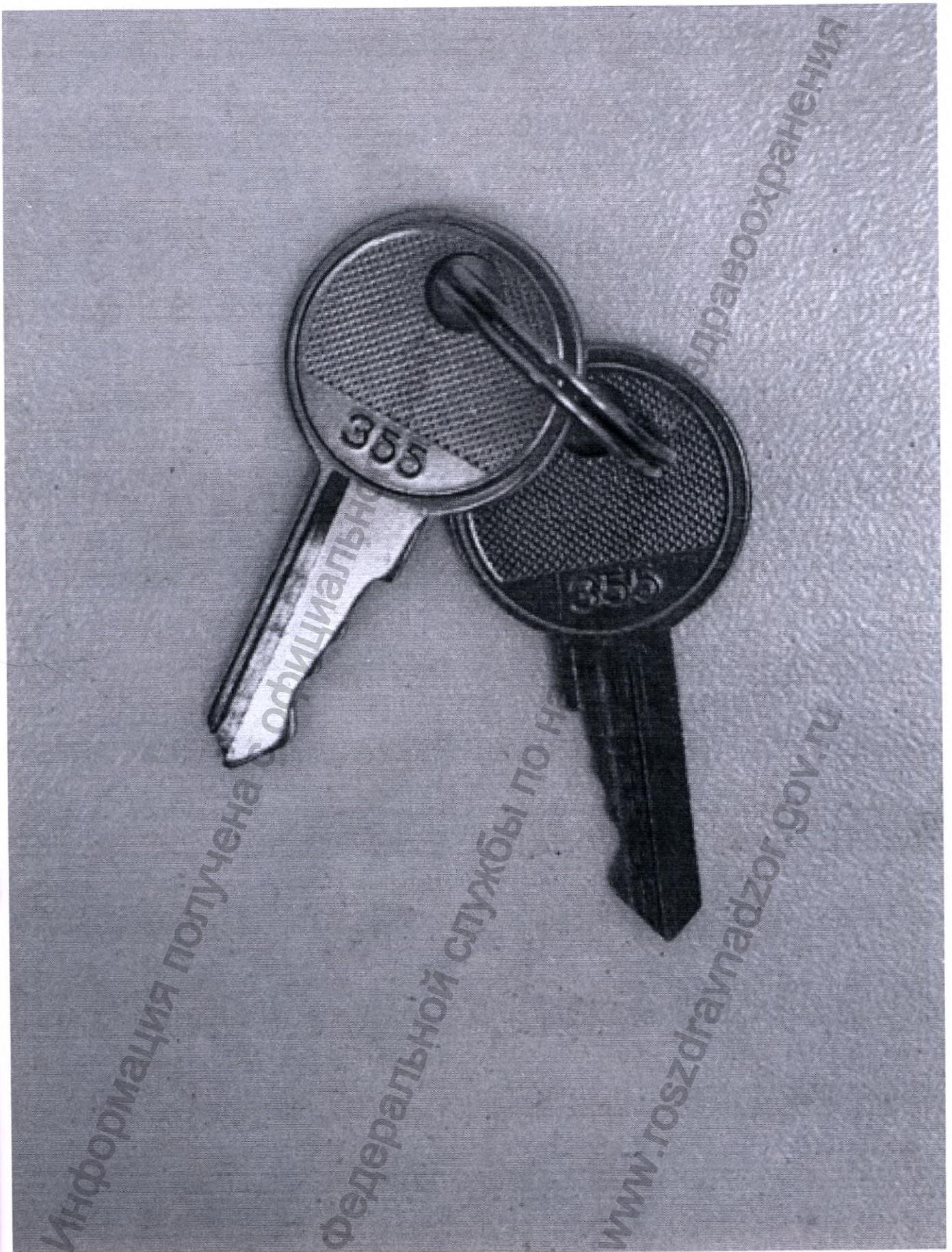

Воронка для залива воды с трубкой соединительной

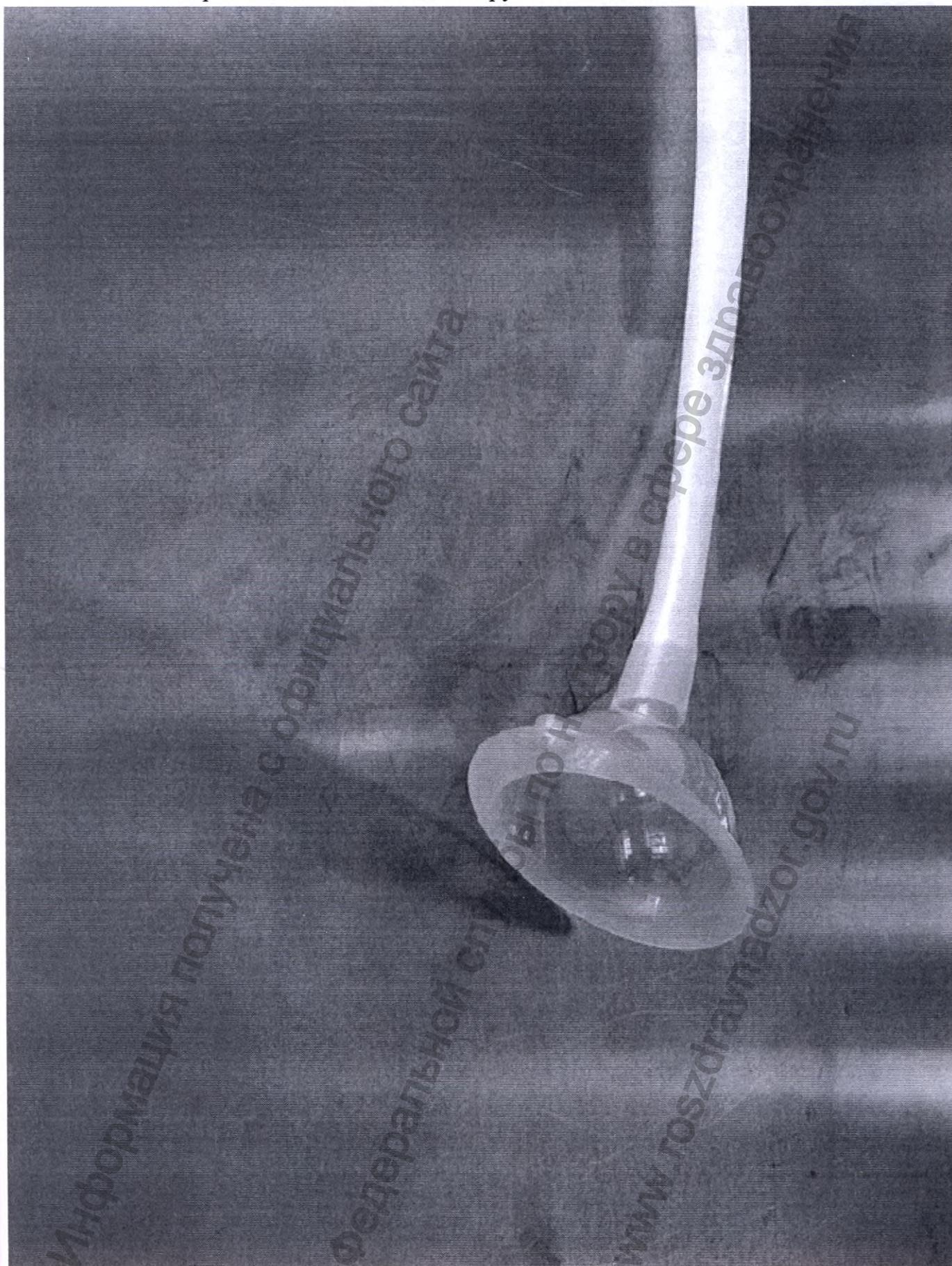


Картридж для воды




Диодная манипула



Держатель для Диодной манипулы

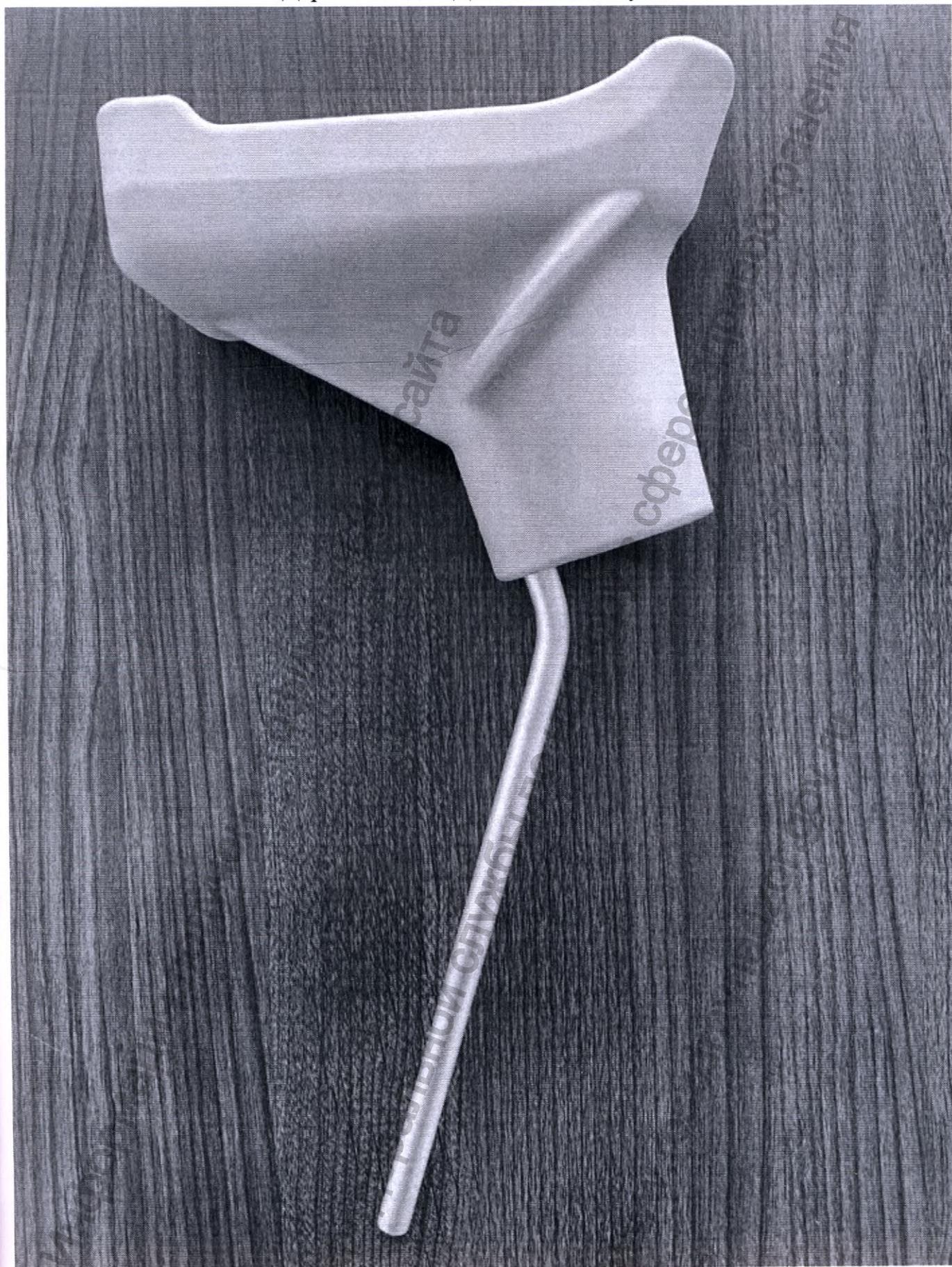


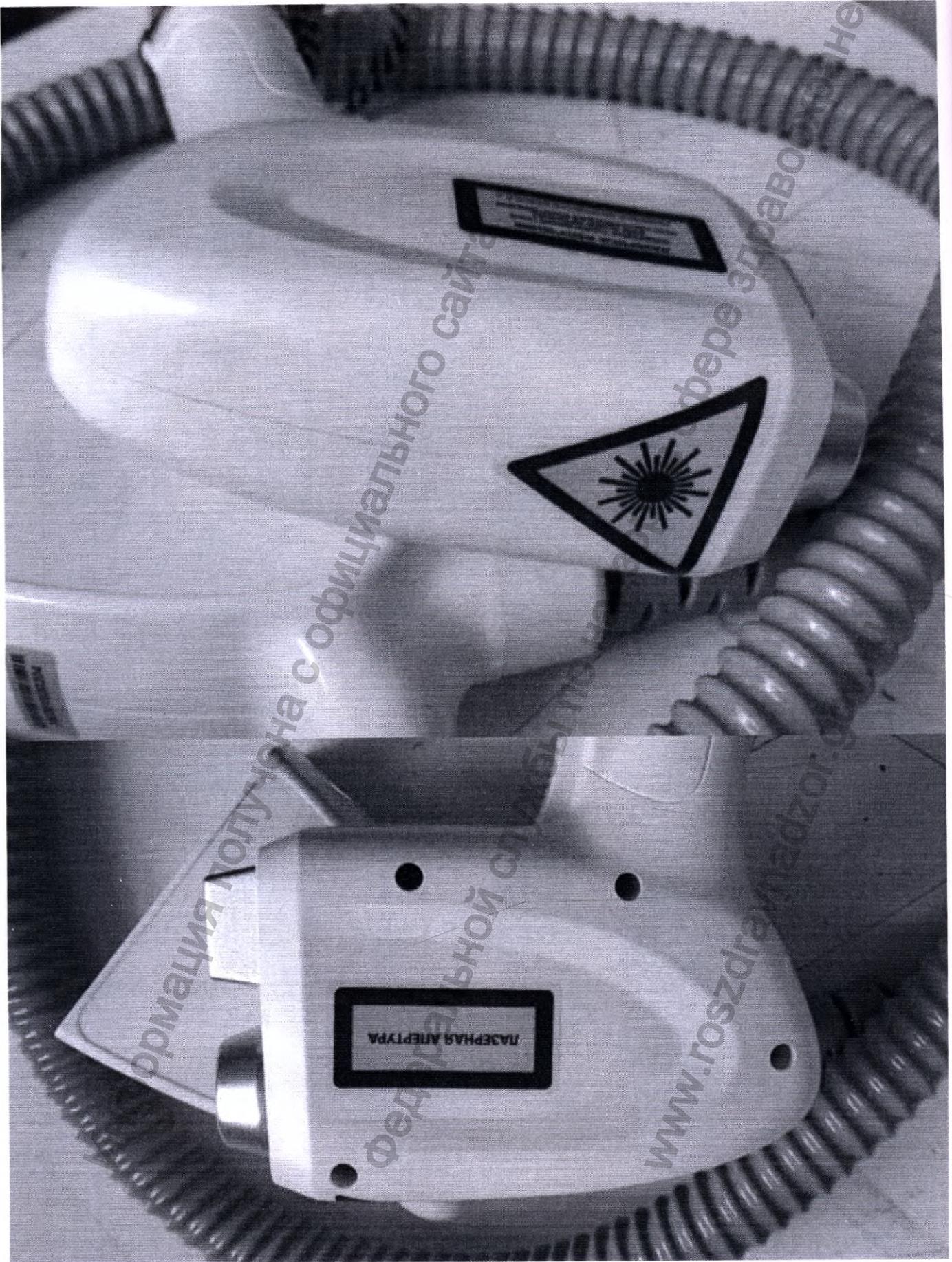



ЭЛОС-манипула




Держатель для ЭЛОС-манипулы

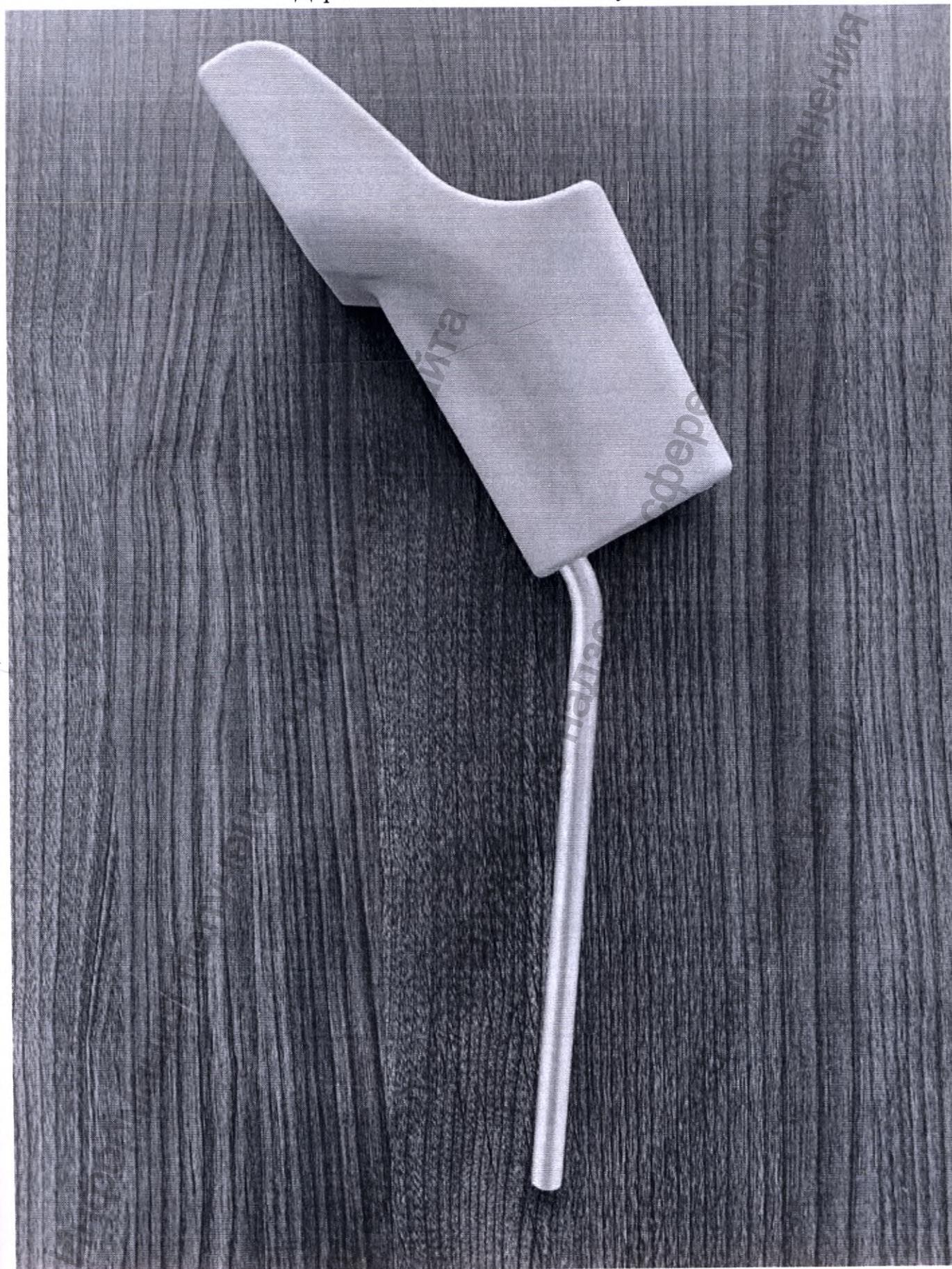

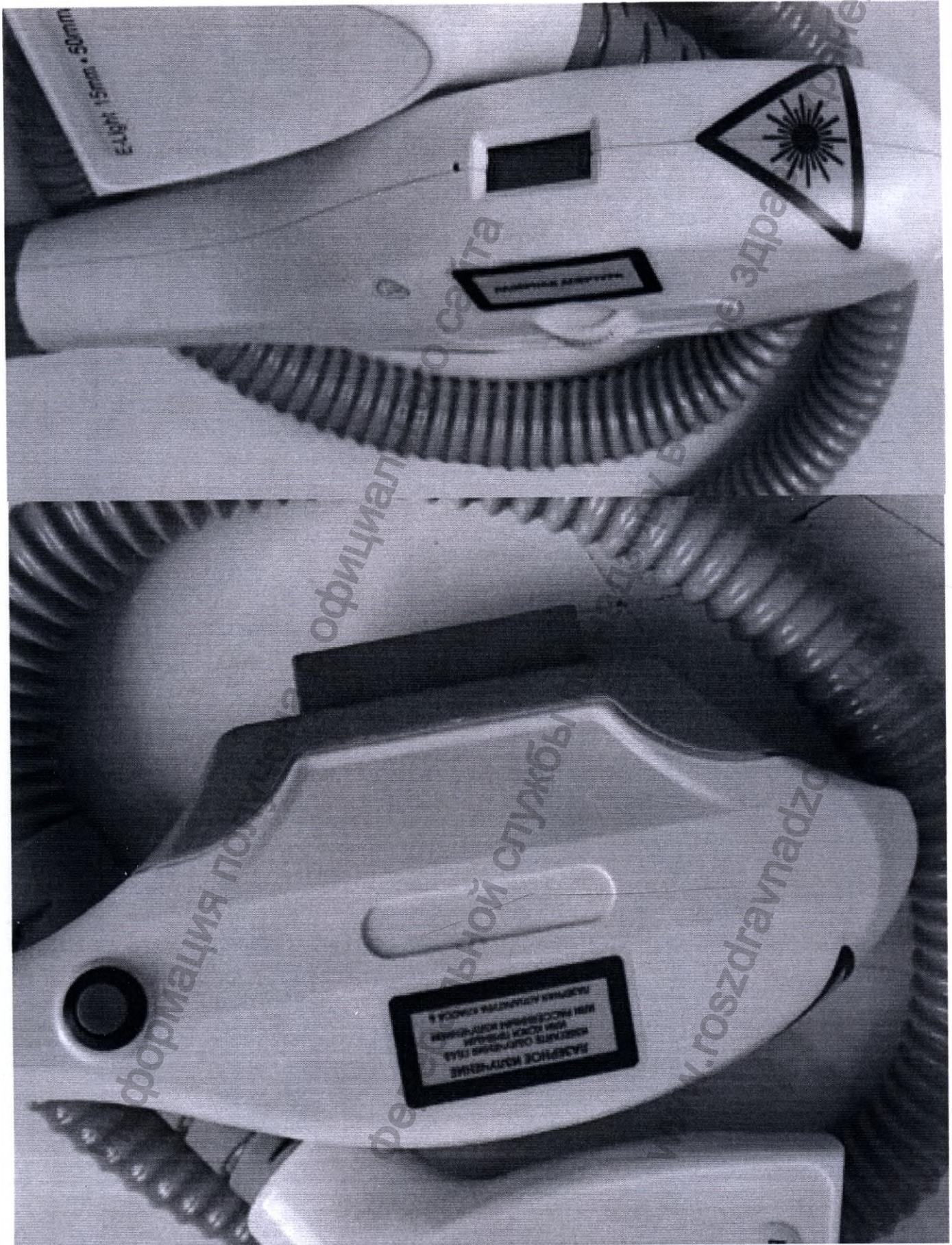


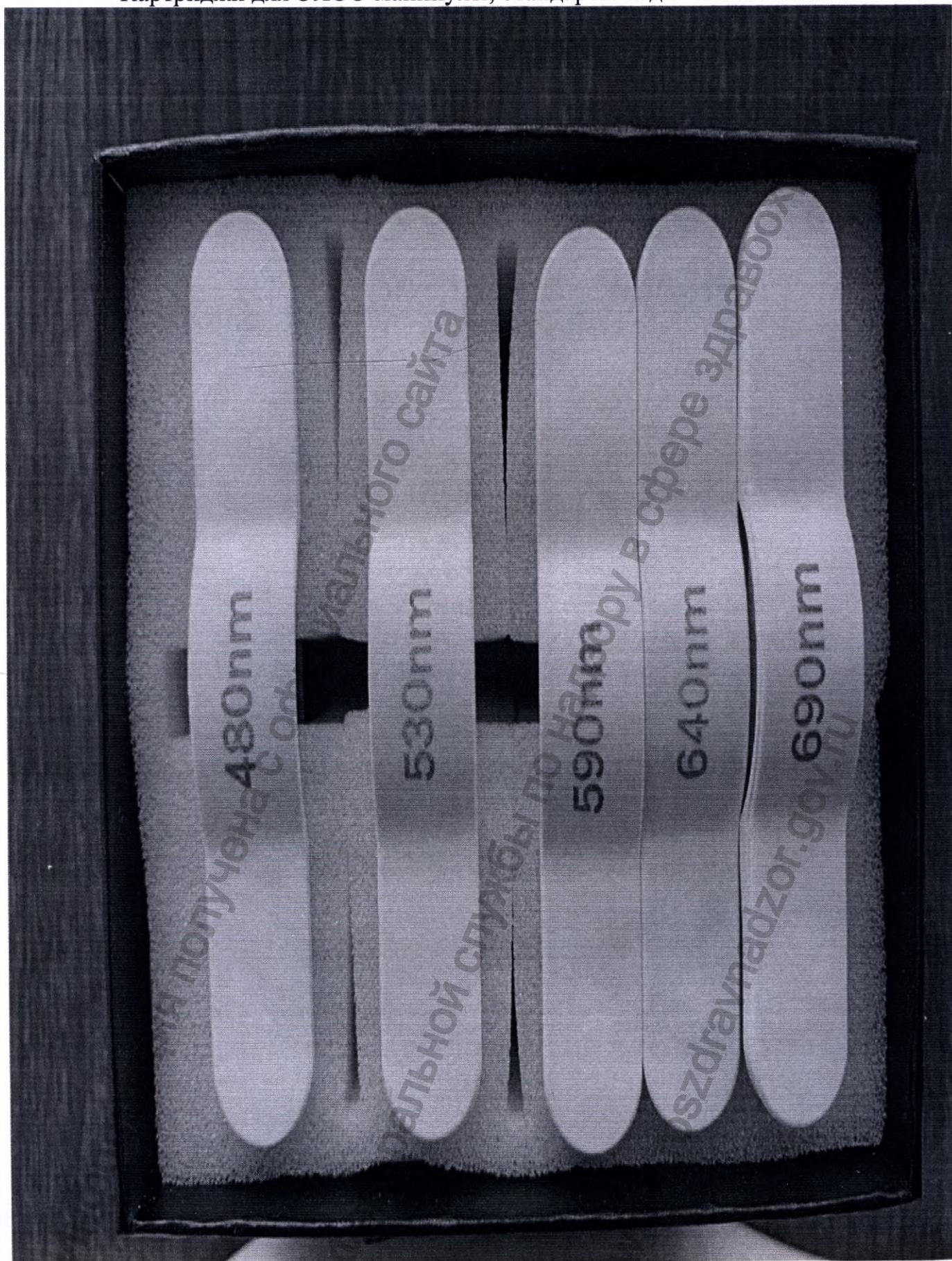

Очки процедурные для пациента

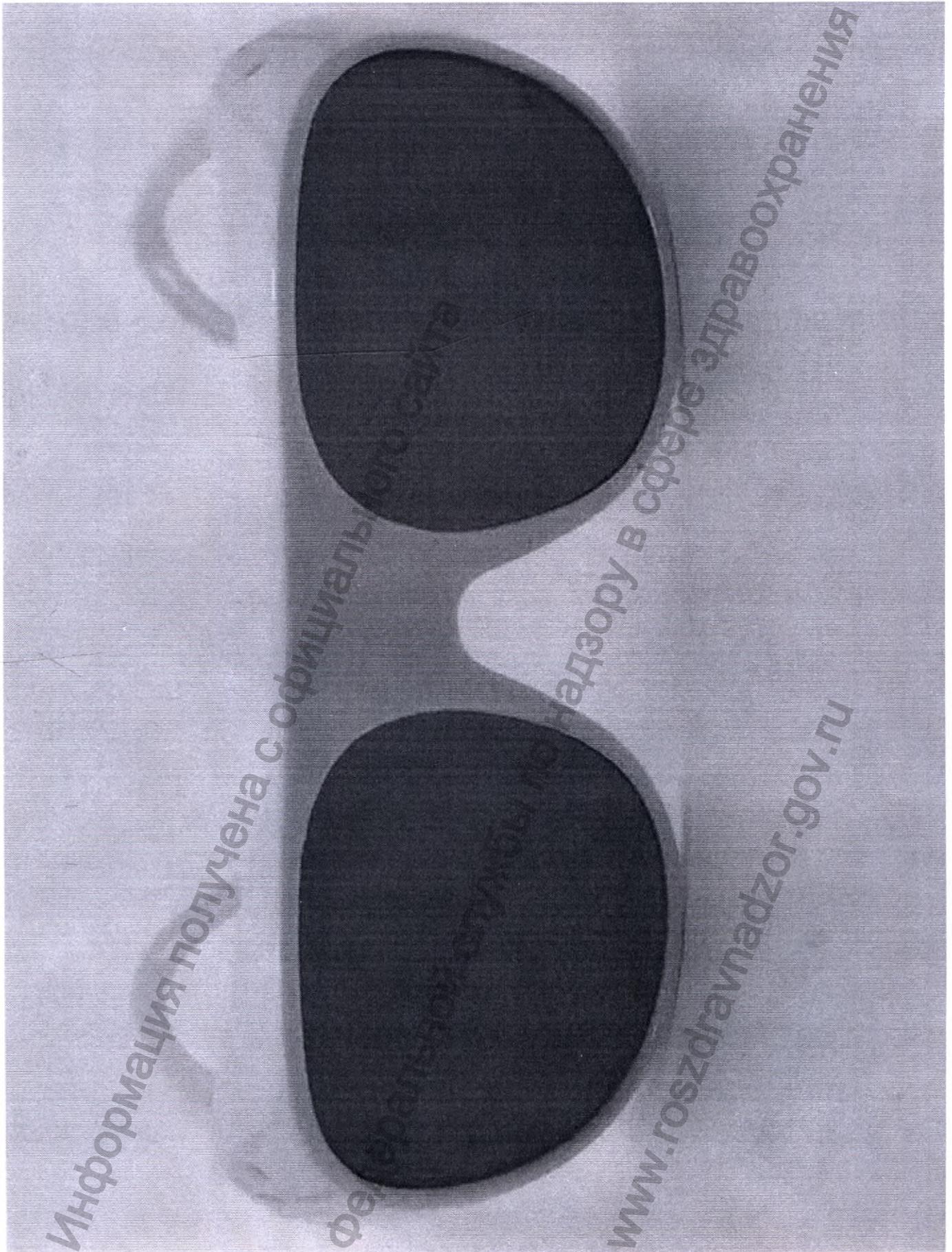

Очки процедурные для специалиста

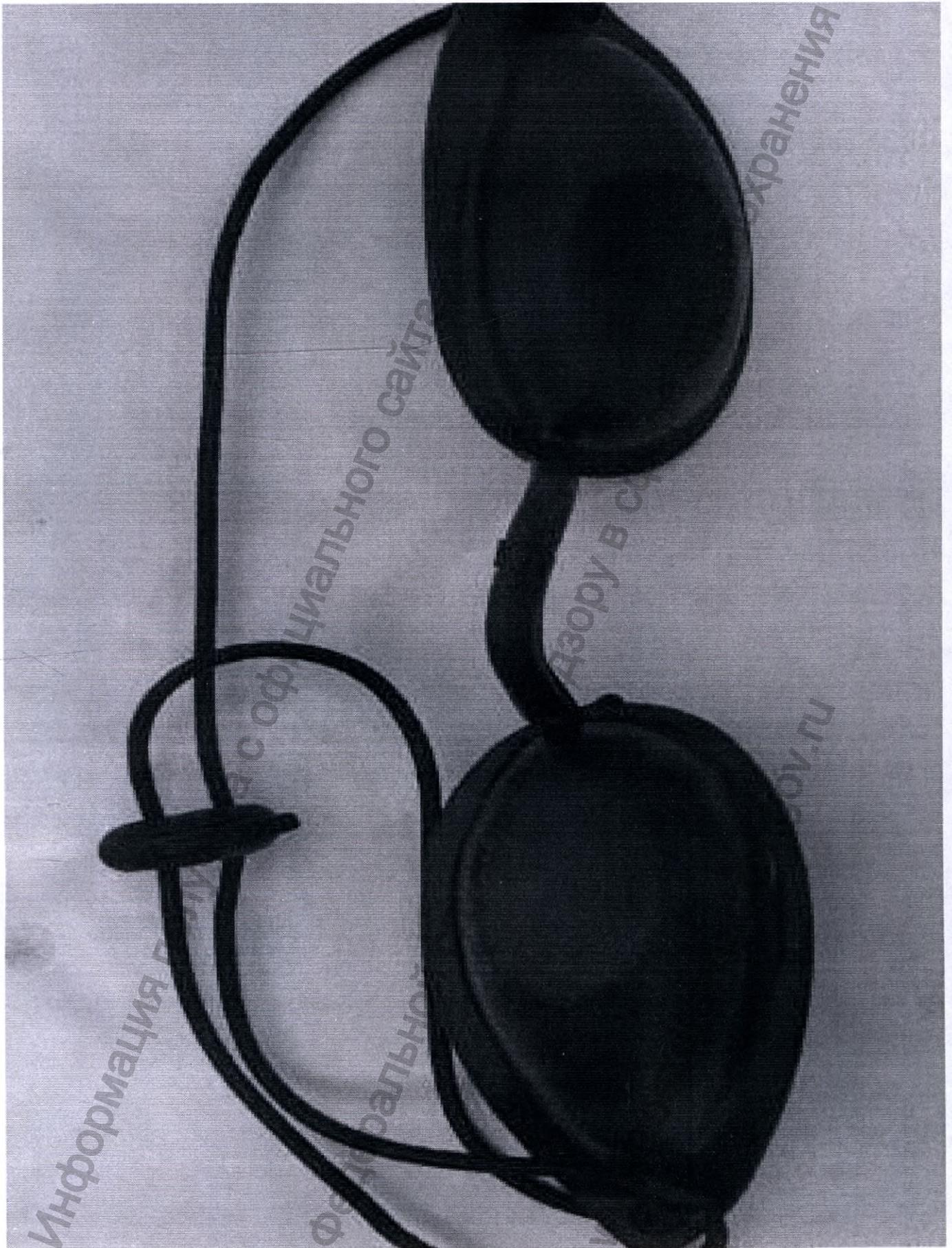

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

www.goszdravnadzor.gov.ru

В документе прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 17

Сергеева листов

Дата: 23.07.2020г

