

TERUMO CORPORATION

Hatagaya Office

2-44-1 Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0072 Japan Telephone; 81-3-3374-8111 Facsimile; 81-3-3374-8399

Tokyo Office

Tokyo Opera City Tower 49F, 3-20-2, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 163-1450 Japan Telephone: +81 3 6742 6500 Facsimile: +81 3 6742 8770

Date: 28 November 2024

To whom it may concern,

STATEMENT

FOR REGISTRATION PURPOSE IN RUSSIA.

We, Terumo Corporation (Terumo Corporation, 44-1, 2-chome, Hatagaya Shibuya-Ku, Tokyo, 151-0072 Japan), hereby state that the attached Instruction for Use is true.

Best regards,

Yoshiniro Dobashi

General Manager

Regulatory Affairs

TERUMO CORPORATION

Registered No: 1029 2024

Certificate of acknowledgment of Notary

On this 5th day of December, 2024, TAKAHASHI Arisa personally appeared before me, TANAKA Toshio, a notary in and for the Tokyo Legal Affairs Bureau, with satisfactory evidence of her identification and of her being an agent of DOBASHI Yoshihiro, General Manager, Regulatory Affairs of TERUMO CORPORATION, and in accordance with the Japanese Notary Act, stated that the principal, said DOBASHI Yoshihiro, had acknowledged affixing his signature and seal to the attached document.

In witness whereof, I set my hand and seal

TANAKA Toshio

TOR DEGA. AFFAIRS BUREAU

TOR KAJICHO CHIYODA-KU
TOKYO JAPAN

東京都千代田区鍛冶町一丁目9番4号 東京法務局所属 公証人) 朱永(1) 朱永(1) 朱永(1) 朱永(1) 朱永(1) 朱永(1) 朱永(2)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Катетер баллонный дилатационный быстрой замены (RX) для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (PTCA) Ryurei

<u>Производитель</u> «Терумо Корпорейшн» (Terumo Corporation)

Версия 2 2024 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер баллонный дилатационный быстрой замены (RX) для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (PTCA) Ryurei,

в вариантах исполнения:

- 1. DC-RR1005HH в составе:
- 1.1. Катетер DC-RR1005HH, диаметр баллона 1,00 мм, длина баллона 5 мм. 1 шт.;
- 1.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 1.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 1.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 1.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 1.6. Инструкция по применению 1 шт.
- 2. DC-RR1205HH в составе:
- 2.1. Катетер DC-RR1205HH, диаметр баллона 1,25 мм, длина баллона 5 мм. 1 шт.;
- 2.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 2.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 2.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 2.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 2.6. Инструкция по применению 1 шт.
- 3. DC-RR1505HH в составе:
- 3.1. Катетер DC-RR1505HH, диаметр баллона 1,50 мм, длина баллона 5 мм. 1 шт.;
- 3.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 3.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 3.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 3.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 3.6. Инструкция по применению 1 шт.
- 4. DC-RR1210HH в составе:
- 4.1. Катетер DC-RR1210HH, диаметр баллона 1,25 мм, длина баллона 10 мм. 1 шт.;
- 4.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 4.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 4.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 4.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 4.6. Инструкция по применению 1 шт.
- 5. DC-RR1510HH в составе:
- 5.1. Катетер DC-RR1510HH, диаметр баллона 1,50 мм, длина баллона 10 мм. 1 шт.;
- 5.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 5.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 5.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 5.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 5.6. Инструкция по применению 1 шт.
- 6. DC-RR2010HHW в составе:
- 6.1. Катетер DC-RR2010HHW, диаметр баллона 2,00 мм, длина баллона 10 мм. 1 шт.;

- 6.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 6.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 6.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 6.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 6.6. Инструкция по применению 1 шт.

7. DC-RR2210HHW в составе:

- 7.1. Катетер DC-RR2210HHW, диаметр баллона 2,25 мм, длина баллона 10 мм. 1 шт.;
- 7.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 7.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 7.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 7.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 7.6. Инструкция по применению 1 шт.

8. DC-RR2510HHW в составе:

- 8.1. Катетер DC-RR2510HHW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 10 мм. 1 шт.;
- 8.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 8.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 8.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 8.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 8.6. Инструкция по применению 1 шт.

9. DC-RR2710HHW в составе:

- 9.1. Катетер DC-RR2710HHW, диаметр баллона 2,75 мм, длина баллона 10 мм. 1 шт.;
- 9.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 9.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 9.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 9.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 9.6. Инструкция по применению 1 шт.

10. DC-RR3010HHW в составе:

- 10.1. Катетер DC-RR3010HHW, диаметр баллона 3,00 мм, длина баллона 10 мм. 1 шт.;
- 10.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 10.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 10.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 10.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 10.6. Инструкция по применению 1 шт.

11. DC-RR3210HHW в составе:

- 11.1. Катетер DC-RR3210HHW, диаметр баллона 3,25 мм, длина баллона 10 мм. 1 шт.;
- 11.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 11.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 11.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 11.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 11.6. Инструкция по применению 1 шт.

12. DC-RR3510HHW в составе:

- 12.1. Катетер DC-RR3510HHW, диаметр баллона 3,50 мм, длина баллона 10 мм. 1 шт.
- 12.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 12.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 12.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 12.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 12.6. Инструкция по применению 1 шт.

13. DC-RR3710HHW в составе:

- 13.1. Катетер DC-RR3710HHW, диаметр баллона 3,75 мм, длина баллона 10 мм. 1 шт.;
- 13.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 13.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 13.4. Инструмент для складывания 1 шт.4
- 13.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 13.6. Инструкция по применению 1 шт.

14. DC-RR4010HHW в составе:

- 14.1. Катетер DC-RR4010HHW, диаметр баллона 4,00 мм, длина баллона 10 мм. 1 шт.;
- 14.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 14.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 14.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 14.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 14.6. Инструкция по применению 1 шт.

15. DC-RR1215HH в составе:

- 15.1. Катетер DC-RR1215HH, диаметр баллона 1,25 мм, длина баллона 15 мм. 1 шт.;
- 15.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 15.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 15.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 15.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 15.6. Инструкция по применению 1 шт.

16. DC-RR1515HH в составе:

- 16.1. Катетер DC-RR1515HH, диаметр баллона 1,50 мм, длина баллона 15 мм. 1 шт.;
- 16.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 16.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 16.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 16.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 16.6. Инструкция по применению 1 шт.

17. DC-RR2015HHW в составе:

- 17.1. Катетер DC-RR2015HHW, диаметр баллона 2,00 мм, длина баллона 15 мм.
- 17.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 17.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 17.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 17.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 17.6. Инструкция по применению 1 шт.

18. DC-RR2215HHW в составе:

- 18.1. Катетер DC-RR2215HHW, диаметр баллона 2,25 мм, длина баллона 15 мм. 1 шт.;
- 18.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 18.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 18.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 18.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 18.6. Инструкция по применению 1 шт.

19. DC-RR2515HHW в составе:

- 19.1. Катетер DC-RR2515HHW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 15 мм. 1 шт.;
- 19.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 19.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 19.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 19.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 19.6. Инструкция по применению 1 шт.

20. DC-RR2715HHW в составе:

- 20.1. Катетер DC-RR2715HHW, диаметр баллона 2,75 мм, длина баллона 15 мм. 1 шт.;
- 20.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 20.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 20.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 20.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 20.6. Инструкция по применению 1 шт.

21. DC-RR3015HHW в составе:

- 21.1. Катетер DC-RR3015HHW, диаметр баллона 3,00 мм, длина баллона 15 мм. 1 шт.;
- 21.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 21.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 21.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 21.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 21.6. Инструкция по применению 1 шт.

22. DC-RR3215HHW в составе:

- 22.1. Катетер DC-RR3215HHW, диаметр баллона 3,25 мм, длина баллона 15 мм. 1 шт.;
- 22.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 22.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 22.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 22.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 22.6. Инструкция по применению 1 шт.

23. DC-RR3515HHW в составе:

- 23.1. Катетер DC-RR3515HHW, диаметр баллона 3,50 мм, длина баллона 15 мм. 1 шт.;
- 23.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 23.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 23.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 23.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 23.6. Инструкция по применению 1 шт.

24. DC-RR3715HHW в составе:

- 24.1. Катетер DC-RR3715HHW, диаметр баллона 3,75 мм, длина баллона 15 мм. 1 шт.;
- 24.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 24.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 24.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 24.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 24.6. Инструкция по применению 1 шт.

25. DC-RR4015HHW в составе:

- 25.1. Катетер DC-RR4015HHW, диаметр баллона 4,00 мм, длина баллона 15 мм. 1 шт.;
- 25.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 25.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 25.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 25.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 25.6. Инструкция по применению 1 шт.

26. DC-RR1220HH в составе:

- 26.1. Катетер DC-RR1220HH, диаметр баллона 1,25 мм, длина баллона 20 мм. 1 шт.;
- 26.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 26.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 26.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 26.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 26.6. Инструкция по применению 1 шт.

27. DC-RR1520HH в составе:

- 27.1. Катетер DC-RR1520HH, диаметр баллона 1,50 мм, длина баллона 20 мм. 1 шт.;
- 27.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 27.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 27.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 27.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 27.6. Инструкция по применению 1 шт.

28. DC-RR2020HHW в составе:

- 28.1. Катетер DC-RR2020HHW, диаметр баллона 2,00 мм, длина баллона 20 мм. 1 шт.;
- 28.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 28.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 28.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 28.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 28.6. Инструкция по применению 1 шт.

29. DC-RR2220HHW в составе:

- 29.1. Катетер DC-RR2220HHW, диаметр баллона 2,25 мм, длина баллона 20 мм. 1 шт.;
- 29.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 29,3. Клипса катетера 1 шт.;
- 29.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 29.5. Лист соответствия 1 шт.;

29.6. Инструкция по применению - 1 шт.

30. DC-RR2520HHW в составе:

- 30.1. Катетер DC-RR2520HHW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 20 мм. 1 шт.;
- 30.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 30.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 30.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 30.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 30.6. Инструкция по применению 1 шт.

31. DC-RR2720HHW в составе:

- 31.1. Катетер DC-RR2720HHW, диаметр баллона 2,75 мм, длина баллона 20 мм. 1 шт.;
- 31.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 31.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 31.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 31.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 31.6. Инструкция по применению 1 шт.

32. DC-RR3020HHW в составе:

- 32.1. Катетер DC-RR3020HHW, диаметр баллона 3,00 мм, длина баллона 20 мм. 1 шт.;
- 32.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 32.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 32.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 32.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 32.6. Инструкция по применению 1 шт.

33. DC-RR3220HHW в составе:

- 33.1. Катетер DC-RR3220HHW, диаметр баллона 3,25 мм, длина баллона 20 мм. 1 шт.;
- 33.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 33.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 33.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 33.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 33.6. Инструкция по применению 1 шт.

34. DC-RR3520HHW в составе:

- 34.1. Катетер DC-RR3520HHW, диаметр баллона 3,50 мм, длина баллона 20 мм. 1 шт.;
- 34.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 34.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 34.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 34.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 34.6. Инструкция по применению 1 шт.

35. DC-RR3720HHW в составе:

- 35.1. Катетер DC-RR3720HHW, диаметр баллона 3,75 мм, длина баллона 20 мм. 1 шт.;
- 35.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 35.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 35.4. Инструмент для складывания 1 шт.;

- 35.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 35.6. Инструкция по применению 1 шт.

36. DC-RR4020HHW в составе:

- 36.1. Катетер DC-RR4020HHW, диаметр баллона 4,00 мм, длина баллона 20 мм. Гшт.;
- 36.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 36.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 36.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 36.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 36.6. Инструкция по применению 1 шт.

37. DC-RR2030HHW в составе:

- 37.1. Катетер DC-RR2030HHW, диаметр баллона 2,00 мм, длина баллона 30 мм. 1 шт.;
- 37.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 37.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 37.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 37.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 37.6. Инструкция по применению шт.

38. DC-RR2530HHW в составе:

- 38.1. Катетер DC-RR2530HHW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 30 мм. 1 шт.;
- 38.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 38.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 38.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 38.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 38.6. Инструкция по применению 1 шт.

39. DC-RR3030HHW в составе:

- 39.1. Катетер DC-RR3030HHW, диаметр баллона 3,00 мм, длина баллона 30 мм. 1 шт.;
- 39.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 39.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 39.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 39.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 39.6. Инструкция по применению 1 шт.

40. DC-RR3530HHW составе:

- 40.1. Катетер DC-RR3530HHW, диаметр баллона 3,50 мм, длина баллона 30 мм. 1 шт.;
- 40.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 40.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 40.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 40.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 40.6. Инструкция по применению 1 шт.

41. DC-RR2040HHW в составе:

- 41.1. Катетер DC-RR2040HHW, диаметр баллона 2,00 мм, длина баллона 40 мм. 1 шт.;
- 41.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 41.3. Клипса катетера 1 шт.;

- 41.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 41.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 41.6. Инструкция по применению 1 шт.

42. DC-RR2540HHW в составе:

- 42.1. Катетер DC-RR2540HHW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 40 мм. 1 шт.;
- 42.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 42.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 42.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 42.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 42.6. Инструкция по применению 1 шт.

43. DC-RR3040HHW в составе:

- 43.1. Катетер DC-RR3040HHW, диаметр баллона 3,00 мм, длина баллона 40 мм. 1 шт.;
- 43.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 43.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 43.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 43.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 43.6. Инструкция по применению 1 шт.

44. DC-RR3540HHW в составе:

- 44.1. Катетер DC-RR3540HHW, диаметр баллона 3,50 мм, длина баллона 40 мм. 1 шт.;
- 44.2. Игла для промывки 1 шт.;
- 44.3. Клипса катетера 1 шт.;
- 44.4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 44.5. Лист соответствия 1 шт.;
- 44.6. Инструкция по применению 1 шт.

Примечания:

далее по тексту возможно использование сокращенного наименования медицинского изделия: «Катетер баллонный дилатационный быстрой замены (RX) для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (PTCA) Ryurei», «Катетер баллонный Ryurei», «Катетер дилатационный Ryurei», «Катетер» и «Изделие»

2. ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система кодирования изделия

Расшифровка системы кодовых чисел

D	С	-																	
1	2	3	4	:	5	6	7	8	3	9	10		1	12					
Номер символа		Символы и их значения																	
1, 2		Наименование изделия DC : Катетер дилатационный																	
3	Назі	начение:	внутрен	ний ры	ынок / з	кспорт	,												
4	Тиг	Тип катетера R: Быстрой замены																	
5	Тиг	Тип R: Ryurei																	
	Диа	аметр бал	лона (м	(м)	-				14		7								
6-7	Сим	мвол	10	12	15	20	22	25	27	307	32	35	37	40					
	Диа	аметр	1,00	1,25	1,50	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00					
	Дли	ина балло	на (мм)		0						7								
8-9	Сим	мвол	0	5	1	0	1	5	2	20	3	0	4	10					
	Дли	ина		5		0	1	5	2	20	3	0	4	10					
10		Тип шафта Н: Гипо-трубка																	
11		Тип гидрофильного покрытия H : Полное покрытие																	
12	Тип Non	рентгено е: одна м	контра етка		метки				0				H: Полное покрытие Тип рентгеноконтрастной метки None: одна метка W: две метки						

Пример кода: DC-RR2510HHW

- DC-: Катетер дилатационный
- R: Быстрой замены
- R: Ryurei
- 25: Диаметр баллона 2,50 мм
- 10: Длина баллона 10 мм
- Н: Гипо-трубка
- Н: Полное покрытие
- W: Две метки

Расшифровка номера партии и срока годности

Номер партии: ГГММДД

 $\Gamma\Gamma \rightarrow \Gamma$ од

 $MM \rightarrow \text{месяц} (01 = \text{январь,..., } 12 = \text{декабрь})$

 $ДД \rightarrow день$

Срок хранения: ГГГГ-ММ

 $\Gamma\Gamma\Gamma\Gamma \rightarrow \Gamma$ од $MM \rightarrow месяц$

Срок хранения составляет 36 месяцев, включая месяц производства.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Официальный производитель:

«ТЕРУМО КОРПОРЕЙШН» 44-1, 2-Чоме, Хатагая, Сибуя-ку, Токио, Япония (TERUMO CORPORATION 44-1, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan)

Место производства:

Терумо Корпорейшн Завод Ашитака 150, Маймаиги-Чо, г. Фудзиномия, префектура Сидзуока 418-0015, Япония (Terumo Corporation, Ashitaka Plant 150, Maimaigi-cho, Fujinomiya-shi, Shizuoka, 418-0015, Japan)

Разработчик:

Терумо Корпорейшн, Завод Ашитака 150, Маймаиги-Чо, г. Фудзиномия, префектура Сидзуока 418-0015, Япония (Terumo Corporation Ashitaka Plant

150, Maimaigi-cho, Fujinomiya-shi, Shizuoka, 418-0015, Japan)

4. ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

4.1 Назначение

Катетер Ryurei («дилатационный катетер») предназначен для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) с целью улучшения миокардиального кровотока при локализованном стенозе коронарных артерий. Ryurei (модели баллонов от 2,0 мм до 4,0 мм) также предназначен для расширения баллонно-расширяемых стентов после развертывания.

Примечание: Стендовые испытания проводились с использованием Ryurei ("дилатационного катетера") и продаваемых баллонно-расширяемых стентов Terumo. Следует быть внимательными, если данное устройство используется со стентами других производителей из-за различий в конструкции стентов. Все стенты должны устанавливаться в соответствии с показаниями к применению, указанными производителем.

4.2 Показания

Ryurei показан для лечения ишемической болезни сердца (CAD), которая характеризуется сужением коронарных артерий, несущих кровь к сердцу.

4.3 Область и условия применения, предназначенные пользователи

Медицинское изделие используется в лечебно-профилактических учреждениях в области сосудистой хирургии врачами высшей категории.

Дилатацитнный катетер должен использоваться врачами, которые знакомы с методикой ЧТКА и хорошо обучены ей.

4.4 Противопоказания

- Противопоказания (пациенты/состояния, для которых не допускается проведение ЧТКА)
 - о Поражение ствола левой коронарной артерии без компенсации кровотока посредством шунта или коллатеральной циркуляции. Несоблюдение данного предупреждения может привести к острой окклюзии коронарной артерии.
 - Пациенты, ранее переносившие спазмы коронарной артерии, связанные с возможностью острой коронарной окклюзии.
 - Беременность или подозреваемая беременность. Воздействие рентгеновского облучения может нанести вред плоду.
- Относительные противопоказания (пациенты/состояния, для которых ЧТКА может представлять повышенный риск, допускаются к операции, только если польза превышает риск).
 - Пациенты, для которых неприменима операция коронарного шунтирования. Экстренное аортокоронарное шунтирование требуется при острой фазе ишемических осложнений.

4.5 Целевая группа пациентов

Пациенты, которым необходима коронарная ангиопластика.

Особая группа пациентов

Безопасность и эффективность Ryurei в отношении детей не установлены.

4.6 Комплектность поставки

Стерильная индивидуальная упаковка содержит дилатационный катетер со стилетом, введенным в проксимальный конец катетера, помещенные в трубку-держатель. К трубке-держателю при помощи клипс прикреплены клипса катетера и игла для промывки. Также в упаковку помещаются лист соответствия и инструмент для складывания (вторая защитная оболочка), закрепленная на листе соответствия.

Индивидуальная упаковка вместе с инструкцией по применению вкладывается во вторичную упаковку.

Катетер баллонный дилатационный быстрой замены (RX) для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (PTCA) Ryurei, постовляется в следующем составе:

- 1. Катетер 1 шт.;
- 2. Игла для промывки 1 шт.;
- 3. Клипса катетера 1 шт.;
- 4. Инструмент для складывания 1 шт.;
- 5. Лист соответствия 1 шт.:
- 6. Инструкция по применению 1 шт.

5. ОСЛОЖНЕНИЯ

- Дилатационный катетер предназначен для применения врачом, прошедшим надлежащее обучение и осведомленным о техниках проведения ЧТКА.
- Процедуры ЧТКА подлежат выполнению только в тех учреждениях, где в случае серьезных осложнений может быть проведена экстренная хирургия на коронарной артерии. Желательно, чтобы при проведении процедуры ЧТКА в готовности находилась группа сердечно-сосудистой хирургии. В противном случае возможность оперативного ответа при неудачном результате или осложнениях процедуры не обеспечена.

Среди возможных осложнений чрескожной транелюминальной коронарной ангиопластики, помимо прочего, могут иметь место:

- Рассечение коронарной артерии
- Острый инфаркт миокарда
- Фибрилляция желудочков
- Ишемия вследствие длительной дилатации
 - Полная окклюзия коронарной артерии или трансплантированного шунта
- Артериовенозная фистула
- Учащенное сердцебиение
- Гипотензия
- Повреждение коронарной артерии
- Нестабильная стенокардия
 - Внутрисосудистый тромбоз
- Разрыв артерии
- Инфекция и боли в месте сосудистого доступа
- Брадикардия
- Тяжелая аритмия
- Церебральный инфаркт
- Перфорация артерии
- Рестеноз коронарной артерии
 - Ишемия вследствие спазма

Эмболизация дистальных участков кровяного русла

Гематома

Тошнота и рвота

Кровотечение

Летальный исход

Если в результате чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики возникло осложнение, требующее экстренного аортокоронарного шунтирования, смертность пациентов, ранее перенесших коронарное шунтирование, будет выше, чем у пациентов, не переносивших ранее коронарное шунтирование.

6. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделие Ryurei состоит из трубки шафта, баллона и соединительной втулки. Наружные поверхности баллона и внешней трубки шафта покрыты смазочным материалом (гидрофильное покрытие).

Данное изделие оснащено одной или двумя рентгеноконтрастными метками внутри баллона для облегчения обнаружения при флюороскопии. Изделие представляет собой катетер быстрой замены.

17. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

	5
	• Перед использованием катетера изучите инструкцию для
	сопутствующих фармацевтических продуктов и медицинских
	изделий.
	• Перед использованием убедитесь, что все оборудование,
	включая дилатационный катетер, функционирует нормально.
ПРЕДОСТЕРИЖЕНИЯ	Проверьте дилатационный катетер на отсутствие повреждений,
0	и конструкцию баллона на соответствие критериям процедуры
O	и методики, которые будут задействованы.
C	
30	9

1. Подготовка дилатационного катетера

1-1 Осторожно извлеките катетер из трубки-держателя. Извлекайте катетер по прямой линии от конца трубки-держателя, избегая сгибания катетера. Если катетер извлекать не по прямой линии, к области порта для проводника будет прилагаться чрезмерное давление, в результате чего катетер может быть поврежден или поломан. Не извлекайте катетер силой, если ощущается сопротивление. Извлечение с применением силы может привести к невозможности раздуть или сдуть баллон.

1-2 Аккуратно снимите защитную оболочку баллона и стилета, не повредив баллон. При необходимости дилатационный катетер можно смотать и закрепить с помощью КЛИПСЫ КАТЕТЕРА в соответствии с «Руководством по применению КЛИПСЫ КАТЕТЕРА и инструмента для складывания».

ВНИМАНИЕ	He	снимайте	защитную	оболочку,	если	ощущается	сопротивление.
DIMINIMATIFIE	Прі	иложение с	илы может пр	оивести к пог	врежде	ению баллона	ì.

1-3 Наберите 3 мл подходящего контрастного вещества (например, смесь контрастного вещества и физиологического раствора в соотношении 1:1) в шприц объемом 20 мл.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте воздух, газы или жидкости, помимо контрастного вещества, для раздувания баллона. В случае утечки из баллона, такие жидкости могут вызвать серьезные неблагоприятные последствия для здоровья пациента.

- **1-**4 Присоедините шприц с контрастным веществом к соединительной втулке катетера (далее называемому «порт раздувания баллона»).
- **1-**5 Удерживая шприц наконечником вниз, выполните аспирацию воздуха в течение $20\sim30$ секунд.
- 1-6 Удерживая шприц наконечником вниз, медленно введите контрастное вещество.
- **1-**7 Повторите шаги **1-**5 и **1-**6 несколько раз, пока контрастное вещество полностью не заполнит баллон.

2. Промывка и введение проводника

2-1 Введите иглу для промывки в дистальный кончик дилатационного катетера. Выполните промывку гепаринизированным физиологическим раствором, чтобы удалить пузырьки воздуха.

ВНИМАНИЕ

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить дилатационный катетер при введении иглы для промывки.

- 2-2 Осмотрите баллон и убедитесь, что он полностью сдут.
- 2-3 Введите проксимальный конец проводника (не более 0,014" (0,36 мм) в диаметре) в дистальный кончик катетера. Проведите проводник через просвет проводника, пока он не покажется из порта для проводника. Захватите проксимальный конец проводника и вытяните его через просвет проводника, пока проводник и кончик катетера не будут позиционированы надлежащим образом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед введением дилатационного катетера тщательно вытрите проводник марлей, смоченной физиологическим раствором, чтобы удалить остатки крови или контрастного вещества. Перемещение катетера через такие остатки на проводнике или через недостаточно увлажненный проводник может привести к отделению или разрыву дилатационного катетера. В результате может потребоваться извлечение фрагментов катетера.

ПРЕДОСТЕРИЖЕНИЯ

- При введении проксимального конца проводника в дистальный кончик дилатационного катетера продвигайте его осторожно и медленно, избегая загиба кончика дилатационного катетера.
- Аккуратно введите проводник, не допуская повреждения просвета проводника проксимальным концом.
- Если катетер помещается в лоток с физиологическим раствором, аккуратно смотайте шафт, чтобы избежать случайного загрязнения.
- В случае излома или загиба проксимального шафта катетера не используйте такой катетер. Это может привести к отделению шафта.

3. Соединение манометрического устройства для раздувания/сдувания баллона с дилатационным катетером

- 3-1 Заполните манометрическое устройство для раздувания/сдувания контрастным веществом и выпустите весь воздух из устройства. Допустимая погрешность измерения устройства $\pm 5\%$.
- **3-**2 Присоедините устройство для раздувания/сдувания к порту раздувания баллона на дилатационном катетере. Чтобы убедиться, что в систему не попадет воздух, устройство для раздувания должно быть надлежащим образом заполнено контрастным веществом.

4. Введение дилатационного катетера

- **4-**1 Введите интродьюсер в кровеносный сосуд в соответствии с описанием в руководстве производителя.
- **4-2** Выберите проводниковый катетер, соответствующий предусмотренному показанию и подходящий для местоположения поражения в анатомии пациента. Перед применением промойте проводниковый катетер гепаринизированным физиологическим раствором.

ВНИМАНИЕ	Перед	введением	проводникового	катетера	пациент	должен	получить
DITTIVIATIFIE	надлеж	сащую антик	оагуляционную те	ерапию.	G		

- **4-**3 Расположите проводниковый катетер у отверстия необходимой коронарной артерии в соответствии с принятым протоколом. Проверьте положение проводникового катетера под флюороскопией с высоким разрешением. После проверки положения катетера введите необходимую дозу сосудорасширяющего препарата.
- **4-**4 Введите дилатационный катетер через гемостатический клапан Y-образного коннектора, присоединенного к проводниковому катетеру.

ВНИМАНИЕ В том, что гемостатический клапан У-образного коннектора ослаблен. Если клапан затянут слишком сильно, это не позволит беспрепятственно провести баллон.

- **4-**5 Под флюороскопией с высоким разрешением продвигайте дилатационный катетер, пока он не достигнет точки в 2-3 см проксимальней дистального конца проводникового катетера. Насколько далеко проведен катетер можно проверить по маркеру глубины на шафте.
- **4-**6 Проведите проводник в необходимую коронарную артерию под рентгеноскопией с высоким разрешением. Выполните ангиографию через проводниковый катетер, чтобы убедиться, что проводник пересек стенозное поражение.

ВНИМАНИЕ	Убедитесь, что проводник корректно введен в целевой с	сосуд, выполнив
	контрастную радиографию под разными углами.	

4-7 Продвигайте дилатационный катетер по проводнику до достижения баллоном стенозного поражения.

Если ощущается какое-либо сопротивление, не продвигайте проводник или дилатационный катетер с применением силы. Прежде чем продолжить, определите причину под флюороскопией с высоким разрешением. Продвижение с применением силы может привести к повреждению сосуда и (или) образованию рваной раны, а также отделению проводника или дилатационного катетера. В результате может потребоваться извлечение фрагментов.

4-8 Продвигайте дилатационный катетер до местоположения баллона в области стенозного поражения, ориентируясь по рентгеноконтрастной метке, и раздувайте баллон при низком давлении 1-2 атм. (101-203 кПа), предварительно затянув гемостатический клапан на Y-образном коннекторе. Убедитесь, что баллон позиционирован в центре стенозного положения, проверив наблюдаемую неравномерность («эффект гантели»).

ВНИМАНИЕ

Избегайте чрезмерной затяжки гемостатического клапана Y-образного коннектора, так как это может повлиять на время раздувания/сдувания и (или) привести к загибу шафта катетера.

5. Раздувание баллона

5-1 Раздуйте баллон до достижения соответствующего давления в течение требуемого времени с помощью манометрического устройства для раздувания/сдувания, а затем сдуйте баллон.

- Осторожно раздуйте баллон под контролем флюороскопии высокого разрешения и убедитесь в том, что давление обеспечивает раздувание баллона. Если баллон не раздувается, не применяйте чрезмерное давление, так как это может привести к невозможности сдуть баллон.
- Давление раздувания баллона не должно превышать расчетное давление разрыва (РДР). Нагнетание давление выше РДР может привести к разрыву баллона. Значение РДР основано на результатах испытаний in vitro. По крайней мере 99,9 % баллонов (с достоверностью 95 %) не разорвутся на уровне РДР или ниже.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Если при нагнетании давления выше значения РДР происходит разрыв баллона, баллон или его фрагменты могут попасть в артерию, в результате чего может потребоваться их извлечение.

Краткосрочное или долгосрочное влияние давления выше номинального на коронарные артерии неизвестно

- Не раздувайте баллон шире диаметра участков коронарной артерии, находящихся проксимально или дистально относительно стенозного поражения.
- При раздувании баллона с целью расширения стента, внутренней части стента или кальцинированных поражений существует вероятность разрыва баллона до превышения значения РДР. Раздувайте баллон с должной осторожностью.

ВНИМАНИЕ

При раздувании баллон может выйти за пределы поражения из-за гидрофильного покрытия. Аккуратно раздуйте баллон под контролем флюороскопии с высоким разрешением так, чтобы баллон не изменил свое положение внутри поражения.

5-2 После раздувания баллона полностью сдуйте его и оттяните дилатационный катетер, чтобы извлечь полностью сдутый баллон в проводниковый катетер, а затем выполните коронарную ангиографию через проводниковый катетер, чтобы оценить улучшение состояния стеноза.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

• Не перемещайте и не извлекайте дилатационный катетер до тех пор, пока баллон не будет полностью сдут.

Извлечение дилатационного катетера следует осуществлять, предварительно ослабив гемостатический клапан Y-образного коннектора.

- Пока проводник находится в сосуде, извлеките катетер по прямой линии вдоль проводника.
- Не извлекайте катетер, если он согнут в области порта Y-образного коннектора. При попытке извлечь согнутый катетер к области возле порта для проводника прилагается чрезмерное давление, что может привести к повреждению или разрыву катетера.
- 5-3 Если улучшение стеноза недостаточное, следует постепенно повысить давление раздувания баллона до РДР или нагнетать давление несколько раз, пока не будет достигнуто максимальное улучшение. Как правило, раздувание и сдувание баллона несколько раз обеспечивает достаточное улучшение стеноза, которое можно проверить посредством коронарной ангиографии.

6. Замена дилатационного катетера

- 6-1 Ослабьте гемостатический клапан Ү-образного коннектора.
- 6-2 Возьмите проводник и гемостатический клапан в одну руку, а катетер в другую.
- **6-**3 Извлеките дилатационный катетер, удерживая положение проводника в зоне поражения. Вытрите поверхность проводника, чтобы избежать проблем при вводе в следующий катетер.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При введении или замене дилатационного катетера один раз вытрите проводник марлей, вымоченной в физиологическом растворе. Осмотрите весь проводник и удостоверьтесь, что смазывающее свойство поверхности не снизилось, и на проводнике отсутствуют какие-либо посторонние вещества. Перемещение катетера через остатки вещества на поверхности проводника или через недостаточно увлажненный проводник может привести к отделению или разрыву дилатационного катетера. В результате может потребоваться извлечение фрагментов катетера.

ВНИМАНИЕ

Во время замены положение проводника необходимо отслеживать под флюороскопией с высоким разрешением.

6-4 Введите следующий катетер через проксимальный конец проводника, как описано выше, сохраняя положение проводника.

ВНИМАНИЕ

При использовании других катетеров, кроме Ryurei, прочтите руководство производителя.

6-5 Выполните руководство по применению под названием «Введение дилатационного катетера» после **4-7** и выполните раздувание/замену дилатационных катетеров.

7. Извлечение дилатационного катетера

По завершению дилатации полностью сдуйте баллон и извлеките дилатационный катетер и проводник, предварительно ослабив гемостатический клапан. Рекомендуется удерживать проводник в положении в течение некоторого времени после процедуры, будучи готовым к возможным непредвиденным явлениям. Для безопасной и надлежащей утилизации

извлеченного дилатационного катетера используйте КЛИПСУ КАТЕТЕРА в соответствии с «Руководством по применению КЛИПСЫ КАТЕТЕРА и ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯа».

8. Руководство по применению КЛИПСЫ КАТЕТЕРА и зИНМТРУМЕНТА ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ

- 8-1 Руководство по применению КЛИПСЫ КАТЕТЕРА
 - 1. Извлеките КЛИПСУ КАТЕТЕРА из держателя.
 - 2. Смотайте дилатационный катетер для ЧТКА в одну или две петли (рис. 1).

ршимашие	Соблюдайте осторожность, не допуская загиба и смятия дилатационного
DIMMAINE	катетера для ЧТКА при сматывании.

- 3. Зафиксируйте смотанный дилатационный катетер для ЧТКА посредством КЛИПСЫ КАТЕТЕРА, выполнив следующие шаги:
 - Прицепите кончик КЛИПСЫ КАТЕТЕРА к дилатационному катетеру ЧТКА (рис. 2).
 - Зафиксируйте дилатационный катетер для ЧТКА на другом конце КЛИПСЫ КАТЕТЕРА (рис. 3).

	Зафиксируйте дилатационный катетер для ЧТКА с помощью КЛИПСЫ КАТЕТЕРА на более жестком проксимальном
предупреждение	конце. Не применяйте КЛИПСУ КАТЕТЕРА на гибком дистальном шафте порта проводника для ЧТКА
	дилатационных катетеров быстрой замены для ЧТКА, поскольку так можно повредить дилатационный катетер для
	ЧТКА.

4. При снятии КЛИПСЫ КАТЕТЕРА со смотанного дилатационного катетера для ЧТКА повторите вышеуказанные шаги в обратном порядке (с рис. 3 по рис. 2).

ВНИМАНИЕ	Соблюдайте осторожность при снятии КЛИПСЫ КАТЕТЕРА, не допуская
DITIVIALITIE	загиба и смятия шафта.

8-2 Руководство по применению инструмента для складывания

	Рекомендуется использовать инструмент для складывания (вторую
3	защитную оболочку) баллона при помещении катетера в лоток с
ВНИМАНИЕ	физиологическим раствором. Не используйте повторно защитную оболочку
BITTIVITATIFIE	баллона, находящуюся на катетере, после ее удаления. Несоблюдение
2	данного предупреждения может привести к невозможности раздуть баллон
5	вследствие деформации баллона и повреждения шафта.


- 1. Снимите инструмент для складывания (вторую защитную оболочку баллона) с листа соответствия.
- 2. Введите стилет в инструмент для складывания (вторую защитную оболочку баллона).
- 3. Полностью сдуйте баллон.
- 4. Введите стилет и инструмент для складывания (вторую защитную оболочку баллона) со стороны кончика катетера, чтобы покрыть сдувшийся баллон.

ВНИМАНИЕ	Не прилагайте силу для введения баллона в защитную оболочку баллона Вводите баллон аккуратно, слегка проворачивая его.
БПИМАНИЕ	Вводите баллон аккуратно, слегка проворачивая его.

5. Для использования катетера аккуратно снимите защитную оболочку баллона и стилет, не повредив баллон.

ВНИМАНИЕ

Не снимайте защитную оболочку баллона силой, если чувствуется сопротивление. Извлечение с применением силы может привести к невозможности раздуть или сдуть баллон.

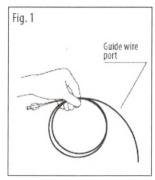



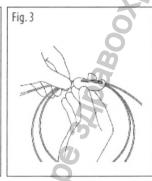


Fig. 1 Guide wire port Fig. 2 Fig. 3

Рис. 1 Порт для проводника Рис. 2 Рис. 3

ОТЧЕТ ОБ ИНЦИДЕНТЕ Если во время использования данного устройства или в результате его использования произошел серьезный инцидент, сообщите об этом производителю и/или его уполномоченному представителю, а также в свой орган государственной власти.

РЕЗЮМЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (SSCP) Сводную информацию по безопасности и клиническим показателям (SSCP) можно найти на сайте https://ec.europa.eu/tools/eudamed (BASIC UDI-DI:498735026DCRRLU).

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Конструкция и внешний вид

Катетер дилатационный представляет собой катетер для баллонной дилатации быстрой замены для ЧТКА. Кончик катетера оснащен баллонном, способным раздуваться до определенного диаметра и длины при рекомендованном давлении. Одна или две рентгеноконтрастные метки в баллоне позволяют определить положение баллона в сосуде пациента под флюороскопией высокого разрешения. На шафте расположено два маркера глубины: один на расстоянии приблизительно 90 см (для плечевой), а другой на расстоянии 100 см (для бедренной) от дистального конца катетера. Дистальная часть катетера имеет коаксиальную конструкцию. Внутренний просвет предназначен для прохождения проводника, диаметр которого не должен превышать 0,014 дюйма (0,36 мм), а другой просвет предназначен для раздувания/сдувания баллона, присоединенного к соединительной втулке, зафиксированному на проксимальном конце катетера. Поверхность катетера частично покрыта гидрофильным полимерным покрытием, которое приобретает смазывающее свойство при намокании. Закрытая игла для промывки с портом Люэра используется для промывки внутреннего просвета на дистальном конце катетера.

Перечень и компонентный состав деталей

Изделие Ryurei состоит из следующих деталей и принадлежностей:

Деталь		Сырьевой материал	Вид контакта согласно ГОСТ ISO 10993-1-2021
Баллон		Нейлон 12- политетраметиленгликоль сополимер	60
	Наружная трубка, дистальная част	Сочетание нейлона 12- политетраметиленгликоль	3800
Трубка шафта	Наружная трубка, средняя часть	Нейлон 12 + пигментный красный	240
	Наружная трубка, проксимальная часть	Нержавеющая сталь	
Гидрофиль	ное покрытие	Сополимер диметилакриламида и глицидилметакрилата (акриловый полимер)*	МИ, присоединяемое извне, кратковременного контакта (≤24 ч) с
	Внутренняя трубка, дистальная част	Нейлон 12- политетраметиленгликоль сополимер + пигментный красный	циркулирующей кровью
Трубка шафта	Внутрен няя Сред	й Денатурированный полиэтилен	2
	трубка, проксим альная часть Нару ный	Нейлон 12	7.406.
Рамиромама	слой	Птотучуочины былы антар	
<u> Усилитель</u>	нтрастная метка	Платиноиридиевый сплав Нержавеющая сталь	- 8
	тьный материал	Уретан-акрилатная смола	T
	для защиты от	Нейлон 12- политетраметиленгликоль сополимер + пигментный зеленый	МИ, присоединяемое извне,
Соединител	іьная втулка	Поликарбонат	кратковременного контакта (≤24 ч) с циркулирующей
Защитная о	болочка	Полиэтилен + пигментный зеленый	кровью МИ поверхностного кратковременного
Стилет		Нержавеющая сталь	контакта (≤24 ч) с неповрежденной кожей
Ирис нас	Канюля	Нержавеющая сталь	1 ,,,
Игла для промывки Соединительная втулка		Полипропилен + пигмент тёмно- серый	МИ поверхностного кратковременного


Протектор	Полипропилен	контакта (≤24 ч) с
Клипса катетера	Полипропилен + пигмент жёлтый	неповрежденной кожей
Соединительный материал	Эпоксидная смола	
Трубка-держатель	Полиэтилен	O
Клипса держателя	Полипропилен	E
Клипса иглы для промывки	Полипропилен	
Инструмент для складывани (Вторая защитная оболочка)	` .	8
Лист соответствия	Синтетическая бумага + чернила	

Варианты конструкции

		Пионатр Баллага	Power or a series a s
Код изделия	Длина баллона (мм)	Диаметр баллона (мм)	Рентгеноконтрастные метки
DC-RR1005HH	5	1,00	Ø MCIKH
DC-RR1205HH	5	1,00	
DC-RR1210HH	10		D ~
DC-RR1215HH	15	1,25	
DC-RR1220HH	20	G	Одна метка
DC-RR1505HH	5.0	m	_ одна метна
DC-RR1510HH	10		
DC-RR1515HH	15	1,50	
DC-RR1520HH	20	2	
DC-RR2010HHW	10	8	
DC-RR2015HHW	15		
DC-RR2020HHW	20	2,00	
DC-RR2030HHW	30		
DC-RR2040HHW	40		
DC-RR2210HHW	10	7	
DC-RR2215HHW	15	2,25	9
DC-RR2220HHW	20	.0	
DC-RR2510HHW	10	0	
DC-RR2515HHW	15		, Q
DC-RR2520HHW	20	2,50	
DC-RR2530HHW	30	5	2
DC-RR2540HHW	40	O,	20
DC-RR2710HHW	10		Две метки
DC-RR2715HHW	15	2,75	Ø
DC-RR2720HHW	20		
DC-RR3010HHW	10		1,0
DC-RR3015HHW	15		
DC-RR3020HHW	20	3,00	5
DC-RR3030HHW	30		
DC-RR3040HHW	40	2	
DC-RR3210HHW	10	2	
DC-RR3215HHW	15	3,25	
DC-RR3220HHW	20	3	
DC-RR3510HHW	10		
DC-RR3515HHW	15	3,50	
DC-RR3520HHW	20		


Код изделия	Длина баллона (мм)	Диаметр баллона (мм)	Рентгеноконтрастные метки
DC-RR3530HHW	30		3
DC-RR3540HHW	40		O
DC-RR3710HHW	10		
DC-RR3715HHW	15	3,75	
DC-RR3720HHW	20		8
DC-RR4010HHW	10		3
DC-RR4015HHW	15	4,00	2
DC-RR4020HHW	20		8

Схематичное представление изделия Ryurei

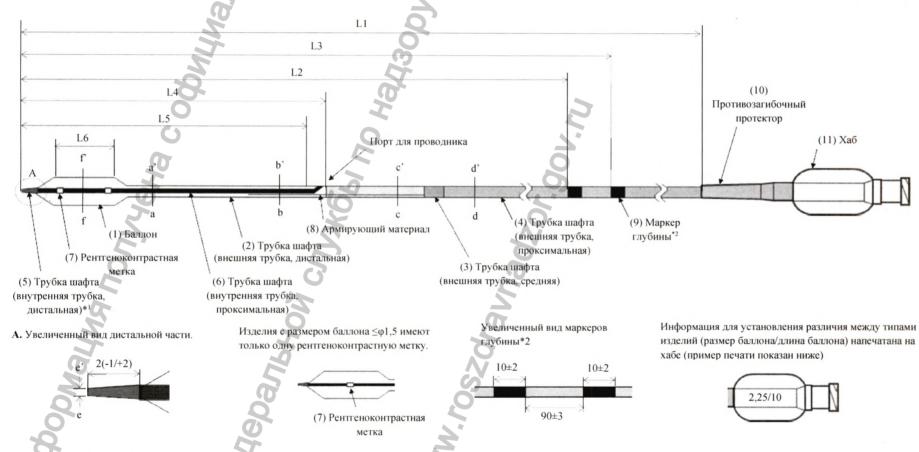


*единицы измерения-мм.

Вид изделия в поперечном разрезе

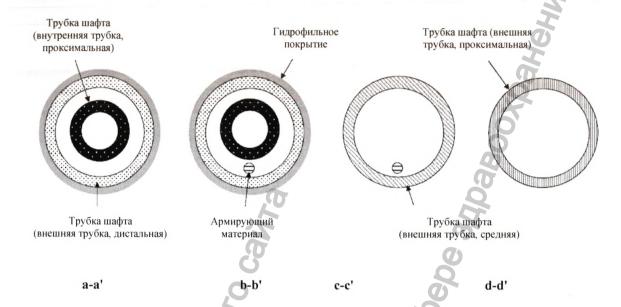

Игла для промывки

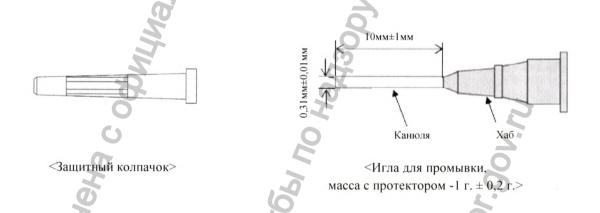

Клипса катетера



Инструмент для складывания (вторая защитная оболочка)

		Not the second s	
	Раздел	Длина (мм	
L1	Рабочая длина катетера (номинальная эффективная длина),мм	1450 ± 50	7
L2	Длина от кончика до ренгеноконтрасного маркера глубины (дистального), мм	900 ± 40	
L3	Длина от кончика до ренгеноконтрасного маркера глубины (проксимального), мм	1000 ± 40	
L4	Длина дистальной части катетера, мм	250 (-35/+40	0)
L5	Длина наружного покрытия, мм	220 (-35/+40	0)
L6	Рабочая длина баллона (с номинальным	5 MM	5±1
	рекомендованным давлением дилатации), мм	10 мм	10 ± 1
	GT .	15 mm	15 ± 2
		20 мм	20 ± 2
	35	30 мм	30 ± 3
		40 мм	40 ± 4
L7	Длина дистального кончика, мм	2 (-1/+2)	
Длина	а рентгеноконтрастных маркеров, мм	10±2	
Рассто	ояние между ренгеноконтрастными маркерами, мм	90±3	
	ояние между ренгеноконтрастными маркерами от него до внешнего края, мм	110±7	
Усили	не на разрыв катетера	5 Н (510 г/см) или	и более
Время	н спуска баллона	не более 15 сен	сунд

Игла для промывки						
Наружный диаметр канюли	Длина канюли	Масса (с протектором)				
$0.31 \pm 0.01 \text{ MM}$	10 ± 1 MM	1 г. ± 0,2 г.				

		F	Іаружный ,	циаметр	шафта катетера		
Размер баллона	a – a' []	b - b'	c - c'	d-d'	e – e'	Размер р балл	
						(f)	f'
Ø 1,00	0,79	0,89 ±			0.41.7	Ø 1,00	$\pm 0,10$
Ø 1,25	0,79 ± 0,04	0,89 ±		2	0,41 (-	Ø 1,25	$\pm 0,13$
Ø 1,50	0,04	0,04		4	0,03/+0,04)	Ø 1,50	± 0,15
Ø 2,00						Ø 2,00	± 0,20
Ø 2,25	2		c	3		Ø 2,25	± 0,23
Ø 2,50			0,84 ±	$0,64 \pm$		Ø 2,50	± 0,25
Ø 2,75	a		0,04	0,01	0.42 (Ø 2,75	± 0,28
Ø 3,00	0,87 =	± 0.04	2		0,43 (-	Ø 3,00	± 0,30
Ø 3,25	7				0,03/+0,04)	Ø 3,25	$\pm 0,33$
Ø 3,50	V				V	Ø 3,50	$\pm 0,35$
Ø 3,75			8			Ø 3,75	$\pm 0,38$
Ø 4,00						Ø 4,00	$\pm 0,40$

Применимый минимальный внутренний диаметр проводникового катетера: 1,27 мм (0,050").

Клипса катетера	(0)		
Толщина	Длина 🚫	Ширина	Macca
3.9 - 0.1 MM + 0.0 MM	Не более 41 мм	Не более 24 мм	Не более 2 г.

Стилет	
Длина	Macca
Не более 295 мм	Не более 1 г.

Защитная оболочка		
Диаметр	Длина	Macca
Максимальный $-2-0,1$ мм/ $+0$ мм	Не более 55,5 мм	Не более 1 г.
Минимальный $-1-0$ мм/ $+0,5$ мм		
Инструмент для складывания		2
Диаметр	Длина	Macca
Максимальный $-3 - 0.1$ мм/ $+0$ мм	Не более 55 мм	Не более 1 г.
Минимальный $-1-0$ мм/ $+1$ мм	Or	

Лист соответствия

						OIBCI							
Р (атм) (кПа)	4 405		5 6 07 608	7 709	8 811	9 912	10 1013	11 1115	12 1216	13 1317	14 1419	15 1520	16 1621
1,0	0,91		96 1,00	1,04	1,07	1,10	1,13	1,15	1,17	1,19	1,21	1,24	1,24
1,25	1,19		22 1,25	1,28	1,30	1,32	1,33	1,35	1,37	1,39	1,41	1,44	1,45
1,5	1,41		46 1,50	1,54	1,57	1,60	1,62	1,64	1,66	1,69	1,72	1,75	1,79
2,0	1,87		95 2,00	2,04	2,08	2,11	2,13	2,15	2,18	2,20	2,23	2,26	2,30
2,25	2,16			2,29	2,32	2,36	2,39	2,42	2,46	2,49	2,53	2,57	2,62
Ø 2,5	2,40			2,54	2,58	2,62	2,66	2,69	2,74	2,78	2,82	2,87	2,91
(MM) 2,75	2,64		70 2,75		2,84	2,88	2,93	2,97	3,02	3,07	3,12	3,18	3,24
3,0	2,89			3,05	3,09	3,14	3,18	3,23	3,28	3,33	3,38	3,44	3,50
3,25	3,12	3,12 3,	19 3,25	3,30	3,36	3,41	3,46	3,51	3,57	3,63	3,70		
3,5	3,37	3,37 3,	44 3,50	3,56	3,62	3,67	3,73	3,79	3,86	3,93	4,01		
3,75	3,62	3,62 3,	69 3,75	3,81	3,87	3,93	3,99	4,06	4,13	4,21	4,29	7.7	
4,0	3,86	3,86 3,	93 4,00	4,07	4,13	4,19	4,26	4,33	4,41	4,49	4,57		4 10 - 2
NР Номинальное давление Диаметр баллона NР от 1,00 до 4,00 мм 6 атм Диаметр баллона RBP от 1,00 до 3,00 мм 14 атм от 3,25 до 4,00 мм 12 атм													

Диаметр баллона	NP
от 1,00 до 4,00 мм	6 атм

Диаметр баллона	RBP
от 1,00 до 3,00 мм	14 атм
от 3,25 до 4,00 мм	12 атм

9. ВОЗМОЖНОСТЬ И СПОСОБЫ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ С ДРУГИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

- Внутренний просвет используется для прохождения проводника, диаметр которого не должен превышать 0,014 дюйма (0,36 мм)
- Выберите проводниковый катетер, соответствующий предусмотренному показанию (минимальный внутренний диаметр проводникового катетера) и подходящий для местоположения поражения в анатомии пациента
- Ryurei (модели баллонов от 2,0 мм до 4,0 мм) может использоваться совместно с баллонно-расширяемыми стентами Terumo, например: «Стент коронарный сиролимусвыделяющий с системой доставки вариантов исполнения: Ultimaster, Ultimaster Tansei», производства TERUMO EUROPE N.V. (Бельгия) РУ РЗН 2021/14131 от 23.04.2021г. Следует быть внимательными, если Ryurei используется со стентами других производителей из-за различий в конструкции стентов. Все стенты должны устанавливаться в соответствии с показаниями к применению, указанными производителем. Любые комбинации должны быть предварительно одобрены производителем стента и Terumo Corporation.

10. ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ 10.1 Спецификация упаковки

Блистерная (стерильная первичная) упаковка содержит дилатационный катетер со стилетом, введенным в проксимальный конец катетера, помещенные в трубку-держатель. К трубке-держателю при помощи клипс прикреплены клипса катетера и игла для промывки. Также в упаковку помещаются лист соответствия и инструмент для складывания (вторая защитная оболочка), закрепленная на листе соответствия. Индивидуальная упаковка вместе с инструкцией по применению вкладывается во вторичную упаковку.

Примечание: Стилет с защитной оболочкой, трубка – держатель, клипсы держателя, клипса иглы для промывки являются элементами упаковки (упаковочным элементам).



10.2 Блистерная (стерильная первичная) упаковка

Изделие вместе с листом соответствия и инструментов для складывания (второй защитной оболочкой) упаковывается в отрывную индивидуальную упаковку, состоящую из пленки и бумаги.

10.3 Потребительская (вторичная) упаковка - отдельная коробка

Отдельная коробка вмещает 1 индивидуальную упаковку и выполнена из картона с покрытием.

10.4 Транспортная (групповая) картонная тара

Групповая транспортная тара изготовлена из гофрированного картона и вмещает 5 отдельных коробок.

11. РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ, УКАЗАННЫХ НА МАРКИРОВКЕ

Информация, указанная на блистерной (стерильной первичной) упаковке – индивидуальной упаковке.

Hydrophilic Coating	Гидрофильное покрытие
STERILE EO	Стерилизовано этиленоксидом
<u></u>	Не использовать, если упаковка повреждена
<u>i</u>	См. инструкцию по применению
REF	Номер по каталогу
LOT	Код партии
~~ <u></u>	Дата изготовления
	Срок годности
* 8	Содержимое (количество)
	Не использовать повторно
STEPAZZE	Не стерилизовать повторно
	Производитель
416	Производственная площадка
Max Guide Wire O.D.	Максимальный наружный диаметр проводника
1 Min GC	Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера
NP	Номинальное давление
RBP	Расчетное давление разрыва
P	Давление
Ø	Диаметр баллона
< L >	Длина баллона

RX	Быстрой замены
MD	Медицинское изделие
	Система с одинарным стерильным барьером
7440-48-4	Содержит опасные вещества. Содержание кобальта
UDI	Индивидуальный штрих код
EC REP	Импортер. Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе

Информация, указанная на этикетке потребительской (вторичной) упаковке – отдельная коробка.

коробка.	
Hydrophilic Coating	Гидрофильное покрытие
REF	Номер по каталогу
LOT	Код партии
	Дата изготовления
	Срок годности
**	Содержимое (количество)
↑ Max Guide Wire O.D.	Максимальный наружный диаметр проводника
† Min GC	Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера
NP	Номинальное давление
RBP	Расчетное давление разрыва
P	Давление
Ø	Диаметр баллона
<l></l>	Длина баллона
RX	Быстрой замены
8 MD	Медицинское изделие
UDI	Индивидуальный штрих код

Информация, указанная на потребительской (вторичной) упаковке — отдельная коробка (предварительная печать).

**	Беречь от влаги
**	Беречь от воздействия солнечного света
STERILE EO	Стерилизовано этиленоксидом
2	Не использовать повторно
STEROLZE	Не стерилизовать повторно
and .	Производитель
41	Производственная площадка
EC REP	Импортер. Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе
<u> </u>	См. инструкцию по применению
7440-48-4	Содержит опасные вещества. Содержание кобальта

Информация, указанная на транспортной (групповой) картонной таре — транспортная картонная тара.

картоппал тара	Этикетка транспортной картонной тары
MD	Медицинское изделие
#	Содержимое (количество)
REF	Номер по каталогу
LOT	Код партии
_ M	Дата изготовления
	Срок годности
	Производитель
1	Хрупкое, обращаться с осторожностью
ZX III	Предельное количество ярусов в штабеле (х)
3 +	Беречь от влаги
类	Беречь от воздействия солнечного света
_11	Производственная площадка

EC REP	Импортер. Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе	
UDI	Индивидуальный штрих код	

Для обращения медицинского изделия на территории РФ дополнительно будет применяться маркировка на русском языке. Русскоязычная маркировка наносится на потребительскую (вторичную) упаковку — отдельную коробку. Она не перекрывает оригинальную маркировку.

Катетер баллонный дилатационный быстрой замены (RX) для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (PTCA) Ryurei
Производитель: Терумо Корпорейшн, Япония,
Тегито Corporation, 44-1, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan
Произведено в Японии

См. REF, LOT, , на основной маркировке производителя

Обратитесь к основной маркировке, упаковке и эксплуатационной документации производителя за нормативными сведениями и полной информацией о безопасном использовании изделия.

Представитель производителя в РФ: ООО «Терумо Рус», Россия, 123112, город Москва, улица Тестовская, дом 10, эт/пом/ком 13/1/5. Тел. + 7 495 988 47 40

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8859 от хх.хх.20хх г. LC-

^{*}Примечание: Расположение, формат текста, вкл. сокращения могут измениться.

STERILE EO	Стерилизовано этиленоксидом
Ti o	См. инструкцию по применению
REF	Номер по каталогу
LOT	Код партии
Σ,	Срок годности
	Не использовать повторно
STEPALZE	Не стерилизовать повторно
X	Апирогенно
8 *	Беречь от влаги
多类	Беречь от воздействия солнечного света

						Л	ист с	отве	тств	ия					
on an annual contract of the c	ERU	MO	/	and the same in		re Cathete	and the second second	resolvent resolv	maka asalan ya 1860 a 1860 wila ku a	The latter of th		Folding to	100	Z Ry	urei
P 圧力	(atm) (kPa)	4 405	5 507	6 608	7 709	8 811	9 912	10	11 1115	12 1216	13 1317	14 1419	15 1520	16 1621	
1111	1.0	0.91	0.96	1.00	1.04	1.07	1.10	1.13	1.15	1.17	1.19	1.21	1.24	1.24	
	1.25	1.19	1.22	1.25	1.28	1.30	1.32	1.33	1.35	1.37	1.39	1.41	1.44	1.45	
	1.5	1.41	1.46	1.50	1.54	1.57		1.62	1.64	1.66	1.69	1.72	1.75	1.79	
	2.0	1.87	1.95	2.00	2.04	2.08	2.11	2.13	2.15	2.18	2.20	2.23	2.26	2.30	
	2.25	2.16	2.21	2.25	2.29	2.32	2.36	2.39	2.42	2.46	2.49	2.53	2.57	2.62	
Ø	2.5	2.40	2.45	2.50	2.54	2.58	2.62	2.66	2.69	2.74	2.78	2.82	2.87	2.91	
(mm)	2.75	2.64	2.70	2.75	2.80	2.84	2.88	2.93	2.97	3.02	3.07	3.12	3.18	3.24	
	3.0	2.89	2.95	3.00	3.05	3.09	3.14	3.18	3.23	3.28	3.33	3.38	3.44	3.50	
	3.25	3.12	3.19	3.25	3.30	3.36	3.41	3.46	3.51	3.57	3.63	3.70		***************************************	
	3.5	3.37	3.44	3.50	3,56	3.62	3.67	3.73	3.79	3.86	3.93	4.01		***************************************	
	3.75	3.62	3.69	3.75	3.81	3.87	3.93	3.99	4.06	4.13	4.21	4.29			
	4.0	3.86	3.93	4.00	4.07	4.13	4.19	4.26	4.33	4.41	4.49	4.57			
Folding too	1	место оболо		прик		推奏拡張	raka sahira malamara sahara sahara	румен	та д	ВВР ПЯ СКЈ				рая заг	цитн
NP	I	Номи	налы	ное да	авлен	ие		19						9	
RBP		Расче	тное	давле	ение ј	разры	іва	F					V C		
P	7	Цавле	ние				5)					90		
Ø	1	Циам	етр ба	аллон	ia	2						3			

12. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Стандартные технические характеристики:

Изделие Ryurei состоит из трубки шафта, баллона и соединительной втулки. Наружные поверхности баллона и внешней трубки шафта покрыты смазочным материалом (гидрофильное покрытие).

Данное изделие оснащено одной или двумя рентгеноконтрастными метками внутри баллона для облегчения обнаружения при флюороскопии. Изделие представляет собой катетер быстрой замены.

<Описание компонентов>

Катетер дилатационный представляет собой катетер для баллонной дилатации быстрой замены для ЧТКА. Кончик катетера оснащен баллонном, способным раздуваться до определенного диаметра и длины при рекомендованном давлении. Одна или две рентгеноконтрастные метки в баллоне позволяют определить положение баллона в сосуде пациента под флюороскопией высокого разрешения. На шафте расположено два маркера глубины: один на расстоянии приблизительно 90 см (для плечевой), а другой на расстоянии 100 см (для бедренной) от дистального конца катетера. Дистальная часть катетера имеет соосную конструкцию. Внутренний просвет предназначен для прохождения проводника, диаметр которого не должен превышать 0,014 дюйма (0,36 мм), а другой просвет предназначен для раздувания/сдувания баллона, присоединенного к соединительной втулке, зафиксированному на проксимальном конце катетера. Поверхность катетера частично покрыта гидрофильным полимерным покрытием, которое приобретает смазывающее свойство при намокании. Закрытая игла для промывки с портом Люэра используется для промывки внутреннего просвета на дистальном конце катетера.

Срок службы: неприменимо, поскольку катетер Ryurei является изделием для однократного применения.

Срок хранения изделия составляет 36 месяцев, включая месяц производства.

13. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

• Продвигайте дилатационный катетер по артерии с осторожностью. При возникновениифлюороскопии высокого разрешения. Дальнейшее продвижение катетера может привести к

повреждению сосуда, а также разрыву катетера. При этом может потребоваться извлечение

фрагментов дилатационного катетера.

• Внутри ячеек стента продвижение, извлечение или надув дилатационного катетера следует

выполнять с осторожностью под контролем флюороскопии высокого разрешения. Несоблюдение

мер предосторожности может привести к повреждению сосуда, а также разрыву катетера из-за

трения о стент или разрыву баллона под давлением ниже расчетного давления разрыва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Будьте осторожны при манипулировании этими устройствами через острые края, через извилистые или кальцинированные кровеносные сосуды. Это может привести к повреждению и/или отслаиванию внешнего покрытия, что может вызвать клинически неблагоприятные ситуации, в результате чего материал покрытия останется в сосудистой системе, или будет повреждено устройство.
- Несоблюдение предупреждений, содержащихся на маркировке, может привести к повреждению покрытия катетера, что может привести к серьезным неблагоприятным последствиям
- Безопасность и эффективность катетера с покрытием не была установлена или неизвестна при применении в других сосудистых областях, кроме тех, которые указаны в рекомендациях по эксплуатации.

• Данное устройство содержит Кобальт (CAS No. 7440-48-4, EC No. 231-158-0), классифицируемый как CMR* 1B, в концентрации выше 0.1% no весу. Современные научные данные подтверждают, что медицинские приборы, изготовленные из сплавов, содержащих кобальт, не вызывают повышенного риска неблагоприятного развития рака или влияния репродуктивную функцию.

*CMR: канцерогенность, мутагенность и репродуктивная токсичность (CLP regulation EU 1272/2008)

Данное изделие стерилизовано оксидом этилена. Только для одноразового использования. Не использовать повторно. Не стерилизовать повторно. Не обрабатывать повторно, поскольку повторная обработка может нарушить стерильность, биологическую совместимость и функциональную целостность изделия.

- Стерильность и апирогенность гарантирована только если упаковка не была открыта или повреждена. Не используйте устройство, если упаковка или ее содержимое повреждены или имеют следы загрязнения.
- Продукт следует использовать сразу же после вскрытия упаковки, а после использования утилизировать с особой осторожностью и надлежащим образом в соответствии с местными правилами. Продукт является биологически опасным, так как он загрязнен кровью.
- Используйте устройство раздувания/сдувания баллона, оборудованное точным манометром. В случае неправильной работы манометра возможен разрыв баллона из-за превышения давления внутри него.
- Во время чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики введите пациенту соответствующие антикоагулянт и коронарный вазодилататор. Завершив чрескожную транслюминальную коронарную ангиопластику, проведите соответствующую антикоагулянтную терапию под руководством лечащего врача.
- Не используйте препараты, содержащие органические растворители или масляные контрастные вещества. Взаимодействие с этими препаратами может привести к повреждению дилатационного катетера, а также разрыву баллона.
- Соблюдайте осторожность при работе с катетерами, избегайте изломов. Не используйте катетер в случае излома. Это может привести к повреждению или разрыву катетера.
- Во избежание переплетения катетера с сопутствующим устройством, соблюдайте особенную осторожность при бифуркационном стентировании двумя баллонами или использовании параллельных проводников. При наличии сопротивления одновременно извлеките катетер и сопутствующее устройство.
- Выберите соответствующий размер баллона в зависимости от результатов диагностики и места установки стента.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Обратитесь к прилагаемому комплектационному листу относительно соотношения между диаметром баллона и расчетным давлением разрыва.
- Не используйте повторно защитную оболочку баллона, которая находится на катетере. Несоблюдение этого предупреждения может привести к тому, что баллон не будет надуваться или сдуваться из-за деформации баллона и повреждения шафта.
- При протирании катетера, протрите его один раз марлей, смоченной физиологическим раствором. Не протирайте прибор сухой марлей, так как это может повредить его покрытие. Избегайте чрезмерного протирания устройства с покрытием.
- После извлечения катетера замочите его в физиологическом растворе, чтобы удалить кровь с поверхности катетера. Перед повторным введением того же баллонного катетера осмотрите весь катетер, чтобы убедиться, что смазка поверхности не уменьшилась, и на катетере нет посторонних веществ. Для удаления крови из просвета проводника промойте катетер физиологическим раствором с гепарином.
- Чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика допускается только в тех учреждениях, где в случае осложнений может быть выполнено экстренное хирургическое вмешательство на коронарных сосудах. Во время чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики желательно наличие бригады сердечнососудистых хирургов в состоянии готовности оперативного вмешательства в случае сбоя или осложнений.
- Не вымачивайте катетер в стерилизующих спиртовых или лекарственных растворах, содержащих органические растворители, и не протирайте катетер лекарственными препаратами. Несоблюдение этого предупреждения может повлечь за собой повреждение или поломку катетера, потерю смазывающей функции или вызвать непредсказуемые изменения в покрытии, которые могут повлиять на безопасность и работу устройства.
- Любое продвижение катетера после введения в сосуд должно выполняться под контролем флюороскопии высокого разрешения.
- Вся процедура должна проводиться с соблюдением правил асептики.
- Не использовать под МРТ.

14.ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

После использования необходимо утилизировать медицинское изделие в соответствии с местными нормами.

15. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ

Неприменимо. Данное изделие поставляется стерильным и предназначается для одноразового применения. Повторное использование запрещено. Повторная стерилизация

запрещена. Не обрабатывать повторно. Повторная обработка может привести к нарушению стерильности, биологической совместимости и функциональной целостности изделия.

16. ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ COOTBETCTBYET МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Тема	Ссылочный стандарт
Система качества	EN ISO13485
	(ISO 13485)
Информация, предоставляемая	EN1041
производителем	29
Анализ рисков	EN ISO 14971
20	(ISO 14971)
Валидация и текущий контроль процесса	EN ISO 11135
стерилизации	(ISO 11135)
Маркировка «Стерильно»	EN 556-1
Символы для использования на этикетках	EN ISO 15223-1
медицинских изделий	(ISO 15223-1)
Упаковка медицинских изделий,	EN ISO 11607-1
подлежащих финишной стерилизации	(ISO 11607-1)
9	EN ISO 11607-2
5	(ISO 11607-2)
Стерилизация медицинских изделий.	EN ISO 11138-1
Биологические индикаторы	(ISO 11138-1)
	EN ISO 11138-2
	(ISO 11138-2)
Стерилизация медицинских изделий.	EN ISO 11737-1
Микробиологические методы	(ISO 11737-1)
Детали соединительные с конусностью 6%	EN 20594-1
(Люэра) для шприцев, игл и другого	EN1707
медицинского оборудования	ISO 594-1
	ISO594-2
Чистые помещения и связанные с ними	
контролируемые среды	(ISO 14644-1)
Клиническая оценка. Руководство для	MEDDEV 2.7.1
производителей и нотифицированных	2
органов	

Q.	Тема	Ссылочный стандарт
Медицинские изделия. Часть 1. Применение		EN 62366
проектирования эксплуатационной пригодности		(IEC 62366)
к медицинским	изделиям	N. Company
Испытания на безопасность	Стерильность	EP (EX.2.6.1.)
	Эндотоксины	EP (DC.2.6.14.)
	Оценка и проведение	EN ISO 10993-1
	испытаний	(ISO 10993-1)
	Подготовка образцов и	EN ISO 10993-12
	справочных материалов.	(ISO 10993-12)
	Взаимодействие с кровью	EN ISO 10993-4
		(ISO 10993-4)
	Цитотоксичность	EN ISO 10993-5

1		
	- A A CONTRACTOR OF THE PARTY O	(ISO 10993-5)
	Оценка биологического	EN ISO 10993-103
	действия медицинских	(ISO 10993-10)
	изделий. Часть 10. Испытания	O
	на раздражение и	
	сенсибилизацию кожи.	
	Оценка биологического	EN ISO 10993-11
	действия медицинских	(ISO 10993-11)
	изделий. Часть 11. Испытания	
	на системную токсичность	8
	Остаточное содержание	
	этиленоксида	EN ISO 10993-7
	Остаточное содержание	(ISO 10993-7)
	этиленхлоргидрина	
Механическое испытание	Стерильные, одноразовые	EN ISO 10555-1
	внутрисосудистые катетеры.	(ISO 10555-1)
	Часть 1. Общие требования	
	Стерильные, одноразовые	EN ISO 10555-4
	внутрисосудистые катетеры.	(ISO 10555-4)
	Часть 4. Катетеры для	O
	баллонной дилатации	m

17.УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура при применении должна соответствовать требованиям, предъявляемым к температуре в операционных.

В соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20 (СанПиН 2.1.3.2630-10) «Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», температура воздуха в операционных, послеоперационных, реанимационных палатах, палатах интенсивной терапии, родовых должна составлять 21-24°C. Относительная влажность: не более 60%.

Диапазон температур при использовании внутри пациента – температура тела от +36 до +42 °C.

Относительная влажность при использовании внутри пациента — 100% (контакт с кровью) Атмосферное давление: 86-106 кПа

17.1 Данные о техническом обслуживании (информация о техническом обслуживании)

Не применимо, поскольку данное изделие является изделием одноразового применения.

17.2 Данные о калибровке

Не применимо, поскольку данное изделие не выполняет измерительной функции.

18.УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Информацию по хранению можно видеть на коробке для изделия, отдельной коробке, транспортной таре и в инструкции по эксплуатации, как указано ниже:

<u>Информация о хранении и транспортировке, указанная в инструкции по</u> эксплуатации:

• Не использовать в случае повреждения или загрязнения индивидуальной упаковки или изделия. Использовать сразу же после вскрытия индивидуальной упаковки. Утилизировать после одноразового применения с соблюдением безопасных процедур во избежание риска заражения.

- Предназначено только для одноразового использования. Повторное использование запрещено. Повторная стерилизация запрещена. Не обрабатывать повторно. Повторная обработка может привести к нарушению стерильности, биологической совместимости и функциональной целостности изделия.
- В процессе хранения изделие должно быть защищено от попадания влаги и прямых солнечных лучей, а также воздействия экстремальных температур и повышенной влажности.

- Температура: +15° - +25°;

- Относительная влажность: не более 60%;

- Атмосферное давление: 86 – 106 кПа.

Информация, относящаяся к хранению и транспортировке, указанная на этикетках:

	Этикетка транспортной картонной тары	
I	Хрупкое, обращаться с осторожностью	
*	Беречь от влаги	
类	Беречь от воздействия солнечного света	

Отдельная коробка (предварительная печать)	
*	Беречь от влаги
类	Беречь от воздействия солнечного света

19. УКАЗАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ У ЛИЦ С ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ВСКАРМЛИВАЮЩИХ ГРУДЬЮ ЖЕНЩИН, ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Применение изделия противопоказано при беременности или подозреваемой беременности. Воздействие рентгеновского облучения может нанести вред плоду.

Внимательно прочтите список противопоказаний в инструкции по применению для других интервенционных изделий, которые будут использоваться с данным изделием.

20. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА СПОСОБНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МЕХАНИЗМАМИ

Неприменимо.

21. СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения изделия составляет 36 месяцев. Не используйте изделие, срок годности которого достиг или превысил указанную дату.

- Не использовать в случае повреждения или загрязнения индивидуальной упаковки или изделия.
- Используйте сразу же после вскрытия упаковки изделия.

22.УКАЗАНИЕ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИНЯТЫ ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ Неприменимо.

23.ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Неприменимо. Изделие Ryurei предназначено для однократного применения.

24.ПРОЦЕДУРА УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

После использования утилизируйте медицинское изделие и упаковку аналогично эпидемиологически опасным отходам в соответствии с инструкциями, действующими в больнице, административными и/или местными, государственными, федеральными и международными законами и правилами об утилизации медицинских отходов.

Утилизация медицинских изделий осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. Согласно классификации медицинских отходов ЛПУ неиспользованное изделие относится к классу А. Согласно классификации медицинских отходов ЛПУ использованное изделие относится к классу Б.

25.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Во время производства, эти изделия прошли подготовку и испытания, чтобы подтвердить их соответствие заявленным свойствам, указанным на этикетке. Из-за биологических различий отдельных лиц, ни одно из изделий не является на 100% эффективным при любых условиях. Кроме того, поскольку мы не можем контролировать условия использования данных изделий, диагноз пациента, способ применения или назначения лекарств, а также обращение с изделиями после того, как они прекращают быть нашей собственностью, мы не можем гарантировать достижение положительного результата или отсутствие побочных эффектов после/во время применения данных изделий.

Перед применением катетера Ryurei следует учитывать риски и пользу для каждого пациента. Врачи несут ответственность за оценку пригодности данного изделия для пациента перед проведением процедуры.

Гарантийные обязательства производителя определяются процедурой компании по рассмотрению рекламаций/осуществлению надзора.

Гарантийный срок хранения составляет 36 месяцев, включая месяц производства.

26.ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ РФ ОБРАЩАТЬСЯ В КОМПАНИЮ

ООО «Терумо Рус»

Юридический адрес: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, эт/пом/ком 13/І/5.

Телефон: + 7 495 988 47 40

Электронная почта: moscowoffice@terumo-europe.com

Информация на русском языке, представленная в мультиязычной брошюреинструкции



MD C € 2797 2022-12 Rev 05

Ryurei

PTCA Dilatation Catheter (RX)

PTCA Dilatation Catheter (RX)
Cathéter de dilatation pour P.T.C.A (RX)
PTCA-Dilatationskatheter (RX)
Catéter de dilatación para ACTP (RX)
Cateter de dilatação para ACTP (RX)
Catetere dilatativo per PTCA (RX)
PTCA Dilatatie catheter (RX)
PTCA dilatationskateter (RX)
PTCA dilatationskateter (RX)
PTCA dilatasjonskateter (RX)
PTCA dilatasjonskateter (RX)
PTCA laajennuskatetri (RX)
Kαθετήρας Διαστολής PTCA (RX)
Дилатационный катетер PTCA (RX)
Cewnik poszerzający do PTCA (RX)

PTCA tágító katéter (RX)
Dilatační katétr pro PTCA (RX)
Dilatačný katéter PTCA (RX)
PTCA dilatasyon kateteri (RX)
PTKA dilatasiooni kateeter (RX)
PTCA dilatacijas katetrs (RX)
PTCA dilatacinis kateteris (RX)
Kateter za dilatacijo PTCA (RX)
PTCA dilatacioni kateter (RX)
Cateter de dilatare PTCA (RX)
PTCA Пдилатационен катетър (RX)
Дилатаційний катетер для ЧТКА (RX)
Balonski dilatacijski kateter za PTCA (RX)

REF

Référence du catalogue Bestellnumme Número de catálogo Referência Codice prodotto Catalogusnummer Artikelnummer Artikkelnummer Tuotekoodi Κωδικός Προϊόντος Каталожный номер Termékkód Katalogové číslo Kód výrobku ffriin kodu Katalooginumber Koda Nr. Katalogo Nr Koda izdelka Sifra proizvoda Codul de catalog al produsuk Каталожен номер Номер за каталогом



Batch code Numéro de lot Chargenbezeichn Número de lote Número de lote Numero di lotto Batchcode Batchkod Batchkode Batch-nummer Franumera Аріθμός партібає Номер партии Tételszám Číslo vyrobní série Kód distribučnej šarže ot numarası artiitähis Sērijas Nr. Partijos kodas Stevilka serile Serijska oznaka Numär lot Партиден код Код партії



Date limite d'utilisation Verwendbar bis aducidad Data limite de uso Utilizzare entro Houdbaarheidsdatum Bäst fore-datum Udløbsdato Brukes for-dato Erapaiva Ημερομηνία Λήξης Голен до Użyć przed datą Felhasználható Použit do Dátum spotreby Son kullanım tarihi Kölblik kuni Deriguma termiņš Sunaudoti iki Uporabno do Upotrebljivo do Data de expirare Срок на годност Використати до Rok upotrebe



Do not reuse Ne pas réutiliser Nicht wiederverwenden No reutilizar Não reutilizar Monouso Niet hergebruiken Ateranvand inte Ma ikke genbruges Må ikke gjenbrukes Ala kayta uudelleen Να μην επαναχρησιμοποιηθ Не использовать повторно Nie używać powtórnie Csak egyszeri használatra Nelze použít opakovaně Na jednorazové použitie Tek kullanımlıktır Ainult ühekordseks kasutusek Nelietot atkartoti Pakartotinai nenaudoti Samo za enkratno uporabo Ne koristiti ponovo Doar pentru unică folosință Да не се използва повторно Використовувати повторно заборо-Ne upotrebljavati ponovno



Do not use if package is damaged Ne pås utiliser si l'emballage est endommagé Bei beschädigter Umverpackung den Inhalt nicht verwenden No usar si el envase está dañado Não usar se a embalagem estiver danificada Non utilizzare se la confezione risulta danneggiata Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd, Använd inte om förpackningen är skadad Må ikke anvendes, hvis pakningen er beskadiget Må ikke brukes hvis forpakningen er ødelagt. Ala kayta, jos pakkaus on vahingoittunut Να μην χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη Не использовать, если упаковка повреждена Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania Ne használja, ha a csomagolás sérült! Nepoužívejte, bylo-li balení poškozeno Nepoužívajte, ak je obal poškodený Paket hasarlıysa kullanmayını Mitte kasutada, kui pakend on kahiustatud Nelietot, ja sterilais iepakojums ir bojāts Jei pakuotė pažeista, nenaudoti Ne uporabljajte, če je ovojnina poškodovana Ne upotrebljavati ukoliko je pakovanje oštećen A nu se utiliza în cazul în care ambalajul este deteriorat Да не се използва, ако опаковката е увредена Не використовувати якщо пакування пошкод жен Ne upotrebljavati ako je ambalaža oštećena



Date of manufacture Date de fabrication Herstellungsdatun Fecha de fabricación Data de fabrico Data di produzione Fabricagedatum Tillverkningsdatum Fremstillingsdato Produksion Valmistuspājvāmaarā Ημερομηνίσκοτασκευης Ниєро<mark>идую к</mark>атаскє Дата изготовления Data produkcji Gyártás dátuma tum výroby Datum výroby Valmistamise kuupäev Ražošanas datums Pagaminimo data Datum izdelave Datum proizvodnje Data de fabricație Дата на производство Дата виробництва Datum proizvodnje



Importer Importateur Importeur Importador Importador Importatore Importeur Importor Importer Maahantuoja Εισαγωγέας Импортер Importer Importor Dovozce Dovozca lthalatçı Importija Importetajs Importuotojas Uvoznik Uvoznik Importator Вносител Uvoznik

MD

Medical device Dispositif médical Medizinprodukt Producto sanitario Dispositivo médico Dispositivo medico Medisch hulpmiddel Medicinsk enhet Medicinsk udstvr Medisinsk enhet Lääkinnällinen laite Ιατροτεχνολογικό προϊόν Мелицинское устройство Urządzenie medyczne Orvosi eszköz Zdravotnický prostředek Zdravotnícka pomôcka Tıbbi cihaz Meditsiiniseade Medicīniskā ierīce Medicinos prietaisas Medicinski pripomoček Medicinski uređaj Dispozitiv medica Медицинско изделие Медичний пристрій Medicinski proizvod

Single sterile barrier system Système de barrière stérile unique Einzelnes Sterilbarrieresystem Sistema de barrera esterilizado único Sistema de barreira estéril única Sistema di barriera sterile singole Eenmalig steriel barrièresysteem Enkelt sterilt barriërsystem Enkelt sterilt barrieresystem Enkelt sterilt barrieresystem Yksittäinen steriili suojajärjestelmä Μονό σύστημα στείρου φραγμού Одиночная стерильная барьерная система System pojedynczej bariery sterylnej Egyszer használatos steril csomagolási rendszer Jednoduchý sterilní bariérový systém Jeden sterilný bariérový systén Tekli steril bariyer sistemi Ühekordne steriilne pakend Vienota sterilās barjeras sistēma Vieno sterilaus barjero sistema Sistem z eno sterilno pregrado Sistem sa jednom sterilnom barijerom Sistem de barieră sterilă de unică folosință Единична стерилна бариерна система Єдина стерильна бар'єрна система Jedinstveni sustav sterline barijere

Manufacturing site Site de fabrication Herstellungsort Lugar de fabricación Site do fabricante Sito di produzione Productielocatie Tillverkningsplats Produktionssted Produksjonssted Valmistuspaikka Τόπος κατασκευής Произвелено liejsce produkcji Gyártási hely Misto výroby Výrobná prevádzka Oretim Yeri Tootmiskoht Ražotne gamybos vieta Proizvodno mesto. Mesto proizvodnje Locul de producție Място на праизводство Виробнича дільниця Mjesto proizvodnje

UDI

Unique Device Identifier ldentifiant unique des dispositifs Einmalige Produktkennung (UDI) Identificación única del producto identificador exclusivo do dispositivo Identificazione unica del dispositivo Unieke identificatiecode voor medische hulpmiddelen (UDI Unik Enhetsidentifierare Unik enhedsidentifikato Unik enhetsidentifikato Uniikki laitetunniste Μοναδικό αναγνωριστικό προϊόντος Уникальный идентификатор устройства Unikatowy identyfikator urządzenia Egyedi eszközazonosító Jedinečný identifikátor zařízen Unikátny identifikátor pomôcky Benzersiz cihaz tanımlayıcısı Seadme kordumatu identifitseerimistunnus erīces unikāls identifikators Unikalusis prietaiso identifikatorius Edinstveni identifikator naprave Jedinstveni identifikator uređaja Identificator unic de dispozitiv Уникален идентификатор на изделието Унікальний ідентифікатор пристрок Jedinstveni identifikator proizvoda

NP

Nominal Pressure Pression nominale Nenndruck Presión naminal Pressão nomina Pressione nominale Nominale druk Nominellt Tryck Nominelt tryk Nominelt trykk Nominaalipa Ονομαστική πίεση Номинальное давля Ciśnienie nominalne Névleges nyomás Nominální tlak Menovitý tlak Nominal Basınç Nominaalröhk Nominālais spiediens Minimalus slėgis Nominalni tlak Nominalni pritisak Presiune nominală Номинално налягане Номінальний тиск Nominalni tlak

RBP

Rated Burst Pressur Pression nominale de rupture Berstdruck Presson de ruptura nominal Pressão nominal de rotura Pressão nominal de iscoppio Nominale barstdruk Nominellt Bristningstryc Nominelt sprængtryk Nominelt sprengtrykk Nimellinen rikkoutumisp Ονομαστική πίεση ρήξης Расчетное давление разрыва Znamionowe ciśnienie rozrywające Becsült szakítónyomás lmenovitý projektovaný tlak Menovitý deštrukčný tlak Anma Patlama Basıncı Nominaalne lõhkemisrõhk Aprēķinātais sprādziena spiediens Minimalus išplētimo slēgis Nazivni delovni tlak Granični pritisak pucania Presiunea nominală de explozie Номинално налягане на разкъсване Номінальний тиск розриву Nazivni tlak prsnuća

Min GC Guiding Catheter minimum inner diameter Diamètre interne minimum du cathéter guid Minimaler Innendurchmesser Führungskatheter Diámetro interior mínimo del catéter guia Diametro interno minimo cateter quia Diametro interno minimo del catetere guida Minimale binnendiameter van een geleidekatheter Ledarkateter minsta innerdiamete Styrekateterets mindste indvendige diameter Føringskateter minimum innvendig diameter Ohjainkatetrin pienin sisähalkaisija Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος οδηγού καθετήρα Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера Minimalna średnica wewnętrzna cewnika prowadzącego Vezető katéter minimum belső átmérő Minimální vnitřní průměr zaváděcího katétru Zavádzací katéter – minimálny vnútorný prien Kılavuz Kateter minimum iç çapı Juhtekateetri minimaalne sisediameeter Vaditājkatetra minimālais iekšējais diametrs Kreipiamojo kateterio minimalus vidinis skersmu Najmanjši notranji premer vodilnega katetra Minimalni unutrašnji prečnik uvodnog katetera Diametru interior minim al cateterului de ghidare Минимален вътрешен диаметър на въвеждащия катетъс Мінімальний внутрішній діаметр направляючого катетера Minimalni unutarnji promjer vodećeg katetera



Druck

Tryk Trykk

Tlak

Tlak

Basino

Rôhk

Tlak

Tlak

Pression Presión Pressão Pressione Druk Давление Nyomás Spiediens Priticak Presiune Напягане



sult instructions for use ire le mode d'emploi Gebrauchsanweisung beachten Consulte las instrucciones de uso Consultar instruções de uso Consultare le istruzioni per l'uso Raadpleeg de gebruiksaanwijzing Läs bruksanvisningen Læs brugsanvisninger es bruksanvisning før bruk. Lue käyttöohieet Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης рочитайте инструкции по применению Sprawdzić w instrukcji stosowania Olvassa el a használati útmutatót! Tartalom Obsah Postupuite podle pokynů ozrite si pokyny na použitie Kullanma talimatina basvurunu: Tutvu kasutusjuhendiga Pirms lietošanas izlasiet instrukciju Skaitykite naudojimo instrukciją Glej navodila za uporabo Pogledaj uputstvo za upotrebu A se consulta instrucțiunile de folosință Прочетете указанията за употреба
Ознайомтеся з Інструкціями для застосування Pogledati upute za upotrebu



Contents

Contenu

Contenido

Conteudo

Contenut

Inhoud

Indhold

Innhold

Sisältö

Περιεχόμε

Содержан Zawartość

lçindekiler

Saturs

Sudetis

Vsebina

Sadržai

Continu

Sadržai

Съдържание

Inhalt

Fabricant rsteller Fabricante Fabricante Fabbricante Fabrikant Fabrikant Produsen Valmistaia Κατασκευαστής Изготовлено Producent Gyártó Výrobce Výrobca Oretici firma Tootja Ražots Gamintojas Izdelovalec Proizvođa Fabricat de



Sterilized using ethylene oxide Sterilisé à l'oxyde d'éthylène Sterilisation mit Ethylenoxid Esterilizado con óxido de etileno Esterilizado com óxido de etileno Sterilizzato con ossido di etilene Gesteriliseerd met etheenoxide Steriliserad med etylenoxid Steriliseret med ethylenoxid Sterilisert med etylen oksid Steriloitu etyleenioksidilla Αποστειρωμένο με αιθυλαινοξείδιο Стерилизовано окисью этилена Sterylizowany tlenkiem etylenu Etilénoxiddal sterilizálva Sterilizováno ethylenoxidem Sterilizované etylénoxidom Etilen Oksitle sterilize edilmistir Steriliseeritud etüleenoksiidiga Sterilizēts ar etilena oksīdu Sterilizuota naudojant etileno oksidą Sterilizirano z etilen oksidom Sterilisano etilen-oksidom Sterilizat cu oxid de etilenă Стерилизирано с етилен оксид Простерилізовано за допомогою оксиду етилену Sterilizirano etilen-oksidom



Do not resterilize Ne pas restériliser Nicht erneut sterilisieren No reesterilizar Não reesteriliza Non risterilizzare Niet opnieuw steriliseren Får ej omsteriliseras Må ikke resteriliseres Må ikke resteriliseres Ålä steriloi uudelleen Να μην επαναποστειρωθεί Не стерилизовать повторно Nie sterylizować ponownie Nem sterilizálható újral Nesterilizujte opakovane Opakovane nesterilizujte Yeniden sterilize etmeyiniz Mitte resteriliseerida Nesterilizēt atkārtoti Pakartotinai nesterilizuoti Ne ponovno sterilizirati Ne resterilisati Nu resterilizați Да не се стерилизира повторно Повторно не стерилізувати Ne ponovno sterilizirati



Balloon diameter Diamètre du ballonnet Durchmesser des Ballons Diámetro del balón Diâmetro do balão Diametro del palloncino Ballondiameter Ballong-diameter Ballondiameter Ballongdiameter Pallon halkaisija Διάμετρος μπαλονιού Пиаметр баллона Średnica balonu Ballon átmérő Průměr balonka Priemer balonika Balon Çapı Ballooni diameeter Balona diametrs Baliono diametras Premer balona Prečnik balona iametrul balonulu Диаметър на балона Діаметр балону Promjer balona



Balloon length Longueur du ballonne Länge des Ballons Longitud del balor Comprimento do balão Lunghezza del palloncino Ballonlengte Ballongens längd Ballonlængde Ballonglengde Pallon pituus Μήκος μπαλονιού Длина баллона Długość balonu Ballon hossz Délka Balonku Dĺžka balonika Balon Uzunluğu Ballooni pikkus Balona garums Baliono ilgis Dolžina balona Dužina balona Lungimea balonulu Дължина на балона Довжина балону Duljina balona



Max guide wire outer diameter Diamètre externe maximum du fil guide Maximaler Außendurchmesser Führungsdraht Diámetro externo máx, de la guia Diámetro externo máx, do fio quia Diametro esterno massimo del filo guida Maximale buitendiameter van een voerdraad Maximal ytterdiameter för ledare Guidewire største udvendige diameter Maks guidewire ytterdiameter Ohjainlangan ulkohalkaisijan enimmäismitta έγ, εξωτερική διάμετρος του οδηγού σύρματος Максимальный внешний диаметр проводника Maksymalna średnica zewnętrzna prowadnika Maximális vezetődrót külső átmérő Maximální vnější průměr vodicího drátu Maximálny vonkajší priemer vodiaceho drôtu Maks. kılavuz tel dış çapı luhtetraadi maksimaalne välisdiameetei Maks. vadītājstīgas ārējais diametrs Maksimalus kreipiamosios vielos diametras Največji zunanji premer žičnega vodila Maks. spoljní prečník vodič-žice Diametrul exterior maxim al ghidului Макс, външен диаметър на водача Максимальний зовнішній діамето провідника Maksimalni vanjski promjer žice vodilice

EC REP

Произведено от

Виробния

Proizvođač

Authorized representative in the European Community Représentant autorisé dans la Communaute européenne Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft Representante autorizado en la Union Europea Representante autorizado na Comunidade Europeia Rappresentante autorizzato nella Comunità europea Gemachtigd vertegenwoordiger in de Europese Unie Auktoriserad representant i Europeiska gemenskape Bemyndiget repræsentant i Det Europæiske Fællesskab Autorisert representant i det europeiske fellesskapet Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Уполномоченный представитель в Европейском сообществе Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségber Autorizovaný zástupce v Evropské Unii Spinomocnený žástupca v Európskom społočenstve Avrupa Topfulugu indaki yetkili temsilci Volitatud esindaja Euroopa Liidus Pilnvargtais pārstāvis Eiropas Kopienā lgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje Pooblasceni zastopnik v Evropski skupnosti Ovlašćeni predstavnik u Evropskoj zajednici Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană Эторизиран представител за Европейския съюз Уповноважений представник в Европейському співтоваристві Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici

Hydrophilic Coating

Hydrophilic Coating Revêtement hydrophile Hydrophile Beschichtung Revestimiento hidrofilico Revestimento hidrofilico Rivestimento idrofilo Hydrofiele coating Hydrofil beläggning Hydrofil belægning Hydrofilt belegg Hydrofiilinen pinnoite Υδρόφιλη επίστρωση Гидрофильное покрытие Powłoka hydrofilowa Hidrofil bevonat Hydrofilni povlak Hydrofilný povlak Hidrofilik Kaplama Hüdrofiilne kattekiht Hidrofils pärkläjums Hidrofilinė danga Hidrofilna prevleka Hidrofilna obloga

Acoperire hidrofilă

Хидрофилно покритие

Гідрофільне покриття Hidrofilni premaz



Keep away from sunlight Tenir à l'écart de la lumière du soleil Von Sonnenlicht fernhalten Mantener alejado de la luz solar Manter afastado da luz solar Tenere lontano dalla luce del sole Uit de buurt van zonlicht houden Háll borta från solljus Må ikke udsættes for sollys Må oppbevares unna sollys Pida poissa auringonvalosta Να φυλάσσεται μακριά από το ηλιακό φως Беречь от попадания солнечного света Chronić przed światłem słonecznym Napfénytől távol tartandó Chraňte před slunečním zářením Chráňte pred slnečným svetlom Güneş ışığından uzak tutunuz Hoida eemal päikesevalgusest Sargāt no saules gaismas Saugoti nuo saulės spindulių Hranite stran od sončne svetlobe Držatí dalje od sunčeve svetlosti Pästrați departe de lumina soarelui Да не се излага на слънчева светлина Зберігати подалі від сонячних променів Čuvati podalje od sunčeve svjetlosti



Keep dry Conserver au sec Trocken halten Mantener seco Manter seco Mantenere asciutto Droog houden Håll torr Opbevares tørt Oppbevares tørt Pidă kuivana Να διατηρείται στεγνό Хранить в сухом месте Utrzymywać w stanie suchym Tartsa szárazon Udržujte v suchu Uchovávajte v suchom prostredí Kuru tutunuz Hoida kuivas Gl<mark>abāt sa</mark>usumā Laikyti sausoje vietoje Hranite na suhem mest Zaštititi od vlage Păstrați uscat Да се пази от влага Зберігати сухим Cuvati na suhom



Contains hazardous substances (Cobalt; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Contient des substances dangereuses (Cobalt; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Enthalt Gefahrstoffe (Kobalt; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Contiene sustancias peligrosas (Cobalto; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Contiene sustancias perigrosas (Cobalto; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Contiene sostanze pericolose (Cobalto; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Gontiene sostanze pericolose (Cobalto; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Bevat gevaarlijke stoffen (Kobalt; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Innehåller farliga ämnen (Kobolt; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Innehåller farliga stoffer (Kobolt; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Innehålar farliga stoffer (Kobolt; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Innehålar farliga stoffer (Kobolt; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Sisältää vaarallisia aineita (Koboltti; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Sisältää vaarallisia aineita (Koboltti; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Coppewart onacusus eeugercaa (Kobanti; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Zawiera substancje niebezpieczne (Kobalt; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Obsahuje nebezpečne lätky (kobalt; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Obsahuje nebezpečne lätky (kobalt; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Obsahuje nebezpečne lätky (kobalt; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Sisäldab ohtlikke aimeid (koobalt; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Sudetyje yra pavojingų medžiagų (kobalts; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Sudetyje yra pavojingų medžiagų (kobalts; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Sudetyje yra pavojingų medžiagų (kobalts; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Sudetyje yra pavojingu medžiagų (kobalts; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Sudetyje yra pavojingu medžiagų (kobalts; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Sudetyje yra pavojingu medžiagų (kobalts; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Sudetyje yra pavojingu medžiagų (kobalts; CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0)
Sud

ОПИСАНИЕ

Данный дилатационный катетер является дилатационным баллонным катетером быстрой замены для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики. Конец катетера оснащен баллоном, надуваемым до определенного диаметра и длины при рекомендованном давлении. Внутри баллона находятся одна или две рентгеноконтрастные метки, которые позволяют определять положение баллона внутри сосуда под контролем флюороскопии высокого разрешения. На шафте катетера имеются два маркера глубины, один — на расстоянии примерно 90 см. (при катетеризации плечевой артерии), а другой — на расстоянии 100 см. (при катетеризации бедренной артерии) от дистального конца катетера. Дистальный конец катетера обладает коаксиальной конструкцией. Один просвет предназначен для легкого прохождения проводника диаметром не более 0.014" (0,36 мм), а другой — для раздувания/спускания баллона, прикрепленного к коннектору на проксимальном конце катетера. Поверхность катетера частично снабжена гидрофильным полимерным покрытием, которое выполняет функцию смазки при намокании. Прилагающаяся в комплекте промывочная игла с портом типа Люэр используется для наполнения внутреннего просвета на дистальном конце катетера.

< NAME OF EACH PART / NOM DE CHAQUE PARTIE / BENENNUNG DER EINZELNEN BESTANDTEILE / NOMBRE DE CADA PARTE / NOME DE CADA COMPONENTE / NOME DEI SINGOLI COMPONENTI / NAAMGEVING VAN DE AFZONDERLIJKE COMPONENTEN / BENÄMNING PÅ DELARNA / DE ENKELTE DELES NAVNE / NAVN PÅ DE ENKELTE DELENE / OSIEN NIMET / ONOMAZIA TON ENIMEPOYS TMHMATON / HAMMEHOBAHUE KAMAON HACTU / NAZWA KAŻDEJ CZĘŚCI / A RÉSZEGYSÉGEK MEGNEVEZÉSE / NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ / NÁZOV KAŽDEJ ČASTI / HER BÖLÜMÜN İSİMLERİ / OSADE NIMETUSED / KATRAS DALAS NOSAUKUMS / KIEKVIENOS DALIES PAVADINIMAS / IMENA DELOV / NAZIVI DELOVA / DENUMIREA PĂRȚILOR COMPONENTE / HAUMEHOBAHUE HA KOMПOHEHTUTE / HAŬMEHYBAHHЯ KOЖHOÏ YACTUHU / NAZIVI DIJELOVA >

Katheterklemme

Clip del catéter

Clip do cateter

Katheterklem

Clip del catetere

Kateterklämma

Kateterklemme

Kateterklemme

Katetrin pidike

Κλιπ καθετήρα

Zacisk cewnika

Katéterrögzítő

Spona katétra

Kateter kelepçesi

Kateetriklamber

Spoika za kateter

Clemă cateter

Kateterio spaustukas

Štipaljka za kateter

Катетърна щипка

Затискач катетера

Spojnica katetera

Katetra spaile

Klip katetru

Зажим катетера

Holder tube Tube de support Halteschlauch Tubo de sujeción Tubo de suporte Tubo contenitore Beschermhuls Hållarrör Beskyttelsesrør Holderslange Pidikeletku Σωλήνας υποστήριξης Держатель Pojemnik Tárolócső Trubicový držák Hadička držiaka Tutucu tüp Hoidetoru Turētāja caurulīte Laikiklio vamzdelis Držalna cev Cev držača Tub suport Тръба за съхранение Тримач Cijev držača

Flushing needle Catheter clip Aiguille d'irrigation Pince du cathéter Spülkanüle Aquja de purgado Agulha de lavagem Ago per lavaggio Spoelnaald Spolningsnål Skyllenål Skyllekanyle Huuhteluneula Βελόνα έκπλυσης Промывочная игла lgła do płukania Öblítőtű Proplachovací jehla Preplachovacia ihla Yıkama iğnesi Loputusnõel Skalošanas adata Praplovimo adata Igla za spiranje Igla za ispiranje Ac de spălare Игла за промиване Голка для промивання Igla za ispiranje

Compliance sheet Fiche de conformité Konformitätserklärung Ficha de conformidad Ficha de conformidade Scheda di conformità Conformiteitsblad Överrenstämmelseblad Ark om overholdelse Samsvarsinformasjon Vaatimustenmukaisuuslomake Φύλλο συμμόρφωσης Комплектационный лист Karta zgodności Megfelelőségi lap Výkaz souladu Karta zhody Uvumluluk tabakası Vastavuskaart Atbilstības lapa Atitikties lapas List za preverjanje skladnosti List o usklađenosti Fisa de conformitate Лист за съответствие Лист відповідності List o usklađenosti

Ryurei

Folding tool Outil rétractable Faltwerkzeug Herramienta de plegado Ferramenta de dobragem Dispositivo di piegatura Vouwgereedschap Vikverktyg Sammenfoldningsredskab Bretteverktøy Taittotyökalu Αναδιπλούμενο εργαλείο Складывающий инструмент Narzędzie do składania Összecsukó eszköz Skládací nástroi Skladací nástroj Katlama aleti Ballooni kaitseümbris Salokāmais instruments Balionélio apsauginé mova Zlagalno orodie Alat za preklapanje Instrument pliabil Инструмент за сгъване Складаний інструмент Alat za savijanje

Romigenpositivinen merkki (kahden rönigenpositävisen merkin tyyppi) Aktivoonatpio(bekring (bioo tulnot aktivoonaspoli bekrin) Pentrenoaontrpactinsiä mapkep (gaa tuna pentrenokontrpactiniax mapkepoli) Znacznik nieprzepuszczalny dia promieni rentgenowskich (dwa znaczniki typu nieprzepuszczalni gyomieni rentgenowskich) ptomieni rentgenowssucu;
Sugārāmyeku ado marker (kēt sugārāmyeku ado markeres tipus)
Sugārāmyeku ado marker (kēt sugārāmyeku ado markeres tipus)
Setuga navirastri značia (va rypy rentgenkontrastich značek)
Rontgenologisky kontrastai značia (typs o kvomi rontgenologisky kontrastinimi značiami)
Radvopak isaretlev (ikiradkysia kaet tipi)
Rontgenkontrastine mārtigi kaks rontgenkontrastse mārtigis tiūtipi)
Rentgenokontrastine mārtigi kaks rontgenkontrastse mārtigis tiūtipi)
Rentgenokontrastine symek is (dviegi rolfizjenkontrastigisije markjeru veidi)
Rentgenokontrastinis symek is (dviegi rolfizjenkontrastiniu zymek iņ tipas)
Radioneprepusten označevalec (dve vrsti radioneprepustrini označevaleci)
Radiopaktni marker (dva tipa radoopaktnini markera) Рентгеномонтрастен маркер (тип с два рентгеномонтрастни маркера). Рентгеномонтрастний маркер (дві рентгеноконтрастні мітко). Radiopakni marker (dvije vrste radiopaknih markera). Guide wire port

Onfice du fil guide
Anschluss für Führungsdraht
Onfico de la guia
Porta do fio guia
Accesso per il filo guida
Accesso per il filo guida
Gerüfradpoort
Lecanort
Guidewire-Port
Radiopake marker (Type met twee radiopake markers) Röntgentäta markörer (version med två röntgentäta markörer) Radiopaque marker (two radiopaque markers type)
Marqueur radio-opaque (type à deux marqueurs radio-opaque
Röntgendichte Marker (Typ mit zwei röntgendichten Markem)
Marcador radio-opaco (dos typos de marcadores radiopacos) Otvor za vodič-žicu Onficiu al finului de ghidaj Ropt sa sogava Vezet ûdrût kimeneti nyilas Marcador radiopaco (dois tipos de marcadores radiopacos) Marcatore radiopaco (tipo con due marcatori radiopachi) Priključak za žicu vodilicu Rantgenfast marker (type med to rantgenfaste markerer) Rantgentett marker (type med to rantgentette markerer) Kreipiamosios vielos ang Odprtina za vodilno žico Порт для проводника Port prowadnika Astup pre vodiaci drbt Radiopaktni marker (dva tipa radiopaktnih markera) Marker radioospac (tip doi marken radioopaci) Port pro vodici drat laditajstigas ports Kılavuz tel portu Juhtettraadi ava Marcadores de profundidad Marcadores de profundidade Marcatorì di profondità Marqueurs de profondeur Tiefenmarker Дълбочиння маркери Маркери глибини Oznaka dubine Markeri dubine Markeri de adâncime Mathebu inyówena Znacznie płębokości Metyseglebok Oznaceni hloubky Hibkowe markery Deriniik sparetieri Označevalca globine Dieptemarkeringen Oziluma markieri Gyfio žymekliai Syryysmerkinnät Atikte; Bollouc Sugavusmargised 220mm Topoqual movupagen, Topoqual movupagen, Topoqual movupagen, Tourodenseen nontweepen on topoqual managen polymera, powiat Hydroff in polymera, powiat Poviak z hydroff ingen polymera. Hydroff ilk polimer kapiama. Hydroff ilk polimer kapiama. Hydrophilic polymer costnog Revetement polymer hydropkile Hydrophile Polymentes chichtung Revestimiento de polimero hidrofilico Revestimento de polimero hidrofilico Rivestimento in polimero idrofilo Hidrofiline polimerine danga Prevleka iz hidrofilnega polimera Hydrofiit palymerbelegg Hydrofiilmen palymeeripinnoite Υδρόφιλη πολυμερής επικαλυψη Hydrofiele polymeercoating Hydrofii polymerbeläggning Hydrofii polymerbelægning Hidrofils polimera parklajums Obloga od Midrofilnog polime Acoperire cu polimer hidroffil Embase (onflice de gonflement du la monet)
Anschlussstack (Ball onaufdehnungsafech uss)
Cono (onflicio de inflado del bajón)
Suporte (porta de instflação do balão)
Cono (attacco per il gonfliaggio del palloncino) Nav (port til ballonoppustning)
Nav (ballonapppblasningsport)
Napa (pallonapppblasningsport)
Napa (pallonapppblasningsport)
Пилрип (фира биоток) (у ципалочной)
Коннектор (порт для раздувания баклона)
Persone (отмот ртгенотоку do wypełmiania balonu) Cvorište (priključak za napuhavanje balona) Hub (opblasspoort ballon) Luerfattning (ballonguppbiäsningsport) (pripojka na nafuknutile balionika) ajs (balona inflacijas ports) balionelio pripūtimo anga) (odprtina za polnjenje balona) Racord (orificiu de umflare a balonului Втупка (с отвор за надуване на бало для роздування бал orište (otvor za naduvavanje balon (balon şişirme portu) (ballooni taiteava) (port pro plnéní balónku) Hub (balloon inflation port) Ballong Pallo Mmaków Ballong Ballon Balons нектор (п

РУССКИЙ

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер Ryurei ("дилатационный катетер") предназначен для использования при чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (ЧТКА) с целью улучшения кровотока в миокарде при локализованном стенотическом поражении коронарных артерий.

Ryurei (модели баллонов от 2,0 мм до 4,0 мм) также предназначен для расширения баллонно-расширяемых стентов после развертывания.

Примечание:Стендовые испытания проводились с использованием Ryurei ("дилатационного катетера") и

продаваемых баллонно-расширяемых стентов Terumo.

Следует быть внимательными, если данное устройство используется со стентами других производителей из-за различий в конструкции стентов. Все стенты должны устанавливаться в соответствии с показаниями к применению, указанными производителем.

ПОКАЗАНИЯ

Ryurei показан для лечения ишемической болезни сердца (CAD), которая характеризуется сужением коронарных артерий, несущих кровь к сердцу.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- 1. Противопоказания (пациенты/состояния, для/при которых запрещена чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика)
 - Поражения основного ствола левой коронарной артерии, с отсутствием компенсаторного кровообращения через шунт или по коллатералям. Пренебрежение этим предупреждением может повлечь за собой острую окклюзию коронарных артерий.
 - · Пациенты с ранее отмеченным спазмом коронарной артерии из-за риска возникновения острой коронарной окклюзии.
 - Беременность или подозрение на беременность. Рентгеновские лучи могут повредить плод.
- 2. Относительные противопоказания (пациенты/условия, для/при которых чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика связана с повышенным риском и может применяться только, если польза от процедуры перевешивает риск)
 - Пациенты, которым противопоказано коронарное шунтирование. Экстренное аортокоронарное шунтирование требуется при острых ишемических осложнениях.

ПАЦИЕНТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Пациенты, которым необходима коронарная ангиопластика.

Особые группы пациентов

Безопасность и эффективность Ryurei в отношении детей не установлены.

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Дилатационный катетер должен использоваться врачами, которые знакомы с методикой ЧТКА и хорошо обучены ей.

КЛИНИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Улучшение ишемии миокарда можно ожидать при расширении места стенотического поражения.

ОСЛОЖНЕНИЯ

Среди возможных осложнений чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, помимо прочего, могут иметь место:

- Рассечение коронарной артерии
- Острый инфаркт миокарда
- Фибрилляция желудочков
- Ишемия вследствие длительной дилатации
- Перфорация артерии
- Артериовенозная фистула
- Учащенное сердцебиение
- Гипотензия
- Повреждение коронарной артерии
- Нестабильная стенокардия
- Внутрисосудистый тромбоз
- Разрыв артерии

- Инфекция и боли в месте сосудистого доступа
- Брадикардия
- Тяжелая аритмия
- Церебральный инфаркт
- Полная окклюзия коронарной артерии или трансплантированного шунта
- Рестеноз коронарной артерии
- Ишемия вследствие спазма
- Эмболизация дистальных участков кровяного русла
- · Гематома
- Тошнота и рвота
- Кровотечение
- Летальный исход

Если в результате чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики возникло осложнение, требующее экстренного аортокоронарного шунтирования, смертность пациентов, ранее перенесших коронарное шунтирование, будет выше, чем у пациентов, не переносивших ранее коронарное шунтирование. Отсроченные осложнения в результате чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики еще не определены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Продвигайте дилатационный катетер по артерии с осторожностью. При возникновении

сопротивления прекратите манипуляции с катетером и определите его причину при помощи флюороскопии высокого разрешения. Дальнейшее продвижение катетера может привести к повреждению сосуда, а также разрыву катетера. При этом может потребоваться извлечение фрагментов дилатационного катетера.

- Внутри ячеек стента продвижение, извлечение или надув дилатационного катетера следует выполнять с осторожностью под контролем флюороскопии высокого разрешения. Несоблюдение мер предосторожности может привести к повреждению сосуда, а также разрыву катетера из-за трения о стент или разрыву баллона под давлением ниже расчетного давления разрыва.
- Будьте осторожны при манипулировании этими устройствами через острые края, через извилистые или кальцинированные кровеносные сосуды. Это может привести к повреждению и/ или отслаиванию внешнего покрытия, что может вызвать клинически неблагоприятные ситуации, в результате чего материал покрытия останется в сосудистой системе, или будет повреждено устройство.
- Несоблюдение предупреждений, содержащихся в данной маркировке, может привести к повреждению покрытия устройства, что может потребовать вмешательства или привести к серьезным неблагоприятным последствиям.
- Безопасность и эффективность устройства с покрытием не была установлена или неизвестна при применении в других сосудистых областях, кроме тех, которые специально указаны.
- Данное устройство содержит Кобальт (CAS No. 7440-48-4, EC No. 231-158-0), классифицируемый как CMR* 1B, в концентрации выше 0,1% по весу. Современные научные данные подтверждают, что медицинские приборы, изготовленные из сплавов, содержащих кобальт, не вызывают повышенного риска развития рака или неблагоприятного влияния на репродуктивную функцию.

 *CMR: канцерогенность, мутагенность и репродуктивная токсичность (CLP regulation EU 1272/2008)

тформация получена с офици Ведеральной службы по надзо, ти. гоѕгагай падгог. 30 v. ги

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данное изделие стерилизовано оксидом этилена. Только для одноразового использования. Не использовать
 повторно. Не стерилизовать повторно. Не обрабатывать повторно, поскольку повторная обработка может
 нарушить стерильность, биологическую совместимость и функциональную целостность изделия.
- Стерильность и апирогенность гарантирована только если упаковка не была открыта или повреждена. Не
 используйте устройство, если упаковка или ее содержимое повреждены или имеют следы загрязнения.
- Продукт следует использовать сразу же после вскрытия упаковки, а после использования утилизировать с особой осторожностью и надлежащим образом в соответствии с местными правилами. Продукт является биологически опасным, так как он загрязнен кровью.
- Используйте устройство раздувания/сдувания баллона, оборудованное точным манометром. В случае неправильной работы манометра возможен разрыв баллона из-за превышения давления внутри него.
- Во время чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики введите пациенту соответствующие антикоагулянт и коронарный вазодилататор. Завершив чрескожную транслюминальную коронарную ангиопластику, проведите соответствующую антикоагулянтную терапию под руководством лечащего врача.
- Не используйте препараты, содержащие органические растворители или масляные контрастные вещества. Взаимодействие с этими препаратами может привести к повреждению дилатационного катетера, а также разрыву баллона.
- Соблюдайте осторожность при работе с катетерами, избегайте изломов. Не используйте катетер в случае излома. Это может привести к повреждению или разрыву катетера.
- Во избежание переплетения катетера с сопутствующим устройством, соблюдайте особенную осторожность при бифуркационном стентировании двумя баллонами или использовании параллельных проводников. При наличии сопротивления одновременно извлеките катетер и сопутствующее устройство.
- Выберите соответствующий размер баллона в зависимости от результатов диагностики и места установки стента.
- Обратитесь к прилагаемому комплектационному листу относительно соотношения между диаметром баллона и расчетным давлением разрыва.
- Не используйте повторно защитную оболочку баллона, которая находится на катетере. Несоблюдение этого предупреждения может привести к тому, что баллон не будет надуваться или сдуваться из-за деформации баллона и повреждения шафта.
- При протирании катетера, протрите его один раз марлей, смоченной физиологическим раствором. Не протирайте прибор сухой марлей, так как это может повредить его покрытие. Избегайте чрезмерного протирания устройства с покрытием.
- После извлечения катетера замочите его в физиологическом растворе, чтобы удалить кровь с поверхности

катетера. Перед повторным введением того же баллонного катетера осмотрите весь катетер, чтобы убедиться, что смазка поверхности не уменьшилась, и на катетере нет посторонних веществ. Для удаления крови из просвета проводника промойте катетер физиологическим раствором с гепарином.

- Чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика допускается только в тех учреждениях, где в случае
 осложнений может быть выполнено экстренное хирургическое вмешательство на коронарных сосудах. Во время
 чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики желательно наличие бригады сердечно-сосудистых
 хирургов в состоянии готовности для оперативного вмешательства в случае сбоя или осложнений.
- Не вымачивайте катетер в стерилизующих спиртовых или лекарственных растворах, содержащих органические растворители, и не протирайте катетер лекарственными препаратами. Несоблюдение этого предупреждения

может повлечь за собой повреждение или поломку катетера, потерю смазывающей функции или вызвать непредсказуемые изменения в покрытии, которые могут повлиять на безопасность и работу устройства.

- Любое продвижение катетера после введения в сосуд должно выполняться под контролем флюороскопии высокого разрешения.
- Вся процедура должна проводиться с соблюдением правил асептики.
- Не использовать под МРТ.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями к прилагаемым фармацевтическим препаратам и медицинским приборам.
- Перед использованием убедитесь, что все приборы, включая дилатационный катетер, работают должным образом. Убедитесь в том, что дилатационный катетер не поврежден, а конструкция баллона соответствует критериям процедуры и используемой техники.

1. Подготовка дилатационного катетера

1-1 Осторожно извлеките катетер из трубки держателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Извлекайте катетер ровным движением, начиная с конца трубки держателя, не сгибая катетер. Если катетер извлекается неровно, на зону возле порта проводника воздействует избыточное давление, которое может повредить катетер.
- Столкнувшись с сопротивлением при извлечении катетера, не прилагайте чрезмерных усилий. Усилия могут вызвать надувание или спускание баллона.
- 1-2 Осторожно снимите защитную оболочку баллона и стилет, чтобы не повредить баллонную часть. При необходимости дилатационный катетер может быть свернут и зафиксирован с помощью зажима катетера в соответствии с "Указаниями по использованию зажима катетера и складывающего инструмента".

ВНИМАНИЕ

Не удаляйте защитную оболочку баллона при наличии сопротивления. Чрезмерные усилия могут привести к повреждению баллона.

1-3 Наберите 3 мл соответствующего контрастного вещества (например: соотношение 1:1 контрастного вещества и физиологического раствора) в шприц, объемом 20 мл.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для надувания баллона запрещается использовать воздух, газы и жидкости, за исключением контрастного вещества. В случае утечки из баллона такие жидкости могут оказать острое негативное воздействие на здоровье пациента.

1-4 Присоедините шприц с контрастным веществом к коннектору катетера (далее - «порт для раздувания

- 1-5 Удерживая шприц кончиком вниз, набирайте воздух в течение 20-30 секунд.
- 1-6 Удерживая шприц кончиком вниз, медленно выпрысните контрастное вещество.
- 1-7 Повторите шаги 1-5 и 1-6 несколько раз, до полного наполнения баллона контрастным веществом.

2. Промывание и введение проводника

2-1 Введите прилагающуюся промывочную иглу в дистальный конец дилатационного катетера. Промойте катетер физиологическим раствором для удаления пузырьков воздуха.

ВНИМАНИЕ

Вводя прилагающуюся промывочную иглу, старайтесь не повредить дилатационный катетер.

- 2-2 Визуально убедитесь в том, что баллон полностью спущен.
- 2-3 Наденьте дистальный кончик катетера на проксимальный конец проводника (диаметром не более 0,014 дюйма (0,36 мм)). Продвигайте проволоку через просвет проводника, пока она не выступит из порта проводника. Захватите проксимальный конец проводника и протяните его назад через просвет проводника, до тех пор, пока проводник и наконечник катетера не будут расположены надлежащим образом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед продвижением дилатационного катетера по проводнику тщательно протрите проводник марлей, смоченной физиологическим раствором, чтобы удалить остатки крови или контрастного вещества. Продвижение катетера по наполовину смоченному или содержащему подобные остатки проводнику может привести к отделению или разрыву дилатационного катетера. Это может привести к необходимости извлечения фрагментов катетера.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Медленно и осторожно, стараясь избегать изломов дистального конца дилатационного катетера, вставьте проксимальный конец проводника в дистальный конец дилатационного катетера.
 - Аккуратно вставьте проводник, стараясь не повредить просвет для проводника проксимальным концом
 - Если катетер помещен в емкость с физиологическим раствором, во избежание загрязнения осторожно сверните шафт.
 - Если проксимальный шафт катетера согнут или изломан, не используйте катетер. Это может привести к отсоединению шафта.

3. Присоединение к дилатационному катетеру устройства для раздувания/ сдувания баллона с манометром

- 3-1 Наполните контрастным веществом устройство для раздувания/сдувания с манометром и удалите из него воздух.
- 3-2 Присоедините устройство для раздувания/сдувания к порту для раздувания баллона на дилатационном катетере. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, необходимо заполнить устройство для раздувания контрастным веществом.

4. Введение дилатационного катетера

- 4-1 Введите оболочку интродьюсера в кровеносный сосуд, согласно инструкции изготовителя.
- 4-2 Выберите проводниковый катетер, соответствующий требованиям, указанным на этикетке, а также участку поражения и особенностям анатомии пациента. Перед использованием проводникового катетера промойте его смесью физиологическим раствором с гепарином.

ВНИМАНИЕ

Перед введением проводникового катетера проведите соответствующую антикоагуляционную терапию.

- 4-3 Расположите проводниковый катетер у входа в нужную вам коронарную артерию, используя разрешенный протокол. Подтвердите расположение проводникового катетера с помощью рентгенографии. После подтверждения положения катетера, введите соответствующую дозу вазодилатора.
- **4-**4 Проведите дилатационный катетер через гемостатический клапан Y-образного коннектора, подсоединенного к проводниковому катетеру.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что гемостатический клапан Y-образного коннектора открыт. Затянутый клапан будет препятствовать гладкому прохождению баллона.

- 4-5 Под контролем флюороскопии высокого разрешения продвигайте дилатационный катетер до тех пор, пока он не приблизится к дистальному концу проводникового катетера на 2 3 см. Маркер глубины на шафте поможет определить, насколько продвинулся катетер.
- **4-**6 Установите проводник в нужную вам коронарную артерию. Выполните ангиографию проводникового катетера, чтобы убедиться в том, что проводник прошел сквозь стенозированный участок.

ВНИМАНИЕ

Выполните контрастную рентгенографию под разными углами, чтобы убедиться в том, что проводник введен в сосуд правильно.

4-7 Продвигайте дилатационный катетер по проводнику до тех пор, пока баллон не достигнет стенозированного участка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Столкнувшись с сопротивлением при продвижении проводника или дилатационного катетера, не прикладывайте усилий. Прежде, чем продолжить процедуру, определите источник сопротивления с помощью флюороскопии высокого разрешения. Дальнейшее продвижение с приложением усилий может привести к повреждению сосуда, а также разрыву проводника или катетера. При этом может понадобиться извлечение фрагментов.

4-8 Продвиньте дилатационный катетер, расположив баллон в стенозированном участке с помощью рентгеноконтрастного маркера, и надуйте его при низком давлении в 1 - 2 атм (101 - 203 кПа), затянув гемостатический клапан Y-образного коннектора. На размещение баллона в центре стенозированного участка указывает неровная (гантелеобразная) форма баллона в сосуде.

ВНИМАНИЕ

Не затягивайте гемостатический клапан Y-образного соединителя слишком сильно, поскольку это может повлиять на время накачивания/спускания баллона, а также привести к излому шафта катетера.

5. Раздувание баллона

5-1 Надувайте баллон с помощью устройства для раздувания/сдувания, оборудованного манометром, под определенным давлением и в течение определенного времени, а затем спустите баллон.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (7)

 Осторожно надуйте баллон под контролем флюороскопии высокого разрешения и убедитесь, что данная компрессия надувает баллон. Если баллон не надувается, не подавайте на него излишнее давление, так как это может помешать спусканию баллона.

- Давление раздувания баллона не должно превышать расчетное давление разрыва.
 Нагнетание давления выше расчетного давления разрыва может привести к разрыву баллона. Расчетное давление разрыва основано на результатах тестирования in vitro.
 Не менее 99,9 % баллонов (с вероятностью 95 %) не разорвутся под давлением, не превышающим их расчетное давление разрыва.
- Если разрыв баллона происходит из-за превышения расчетного давления разрыва, баллон или его фрагменты могут попасть в сосуд, после чего потребуется их извлечение.
- Краткосрочное или долгосрочное влияние давления выше номинального на коронарные артерии неизвестно.
- Не раздувайте баллон больше диаметра здорового участка сосуда, проксимальнее или дистальнее стеноза.
- При раздувании баллона с целью раскрытия стента, внутри стента или кальцифицированных поражений, существует опасность разрыва баллона под давлением ниже расчетного давления разрыва. Раздувайте баллон с особой осторожностью.

ВНИМАНИЕ

Гидрофильное покрытие может стать причиной выскальзывания надутого баллона за пределы участка поражения. Во избежание изменения положения баллона в пределах пораженного участка, раздувайте баллон с особой осторожностью, под контролем флюороскопии высокого разрешения.

5-2 Потяните на себя дилатационный катетер, чтобы извлечь полностью спущенный баллон в проводниковый катетер после раздувания баллона, а затем выполните коронарную ангиографию через проводниковый катетер для оценки изменений стеноза.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Не двигайте и не извлекайте дилатационный катетер до полного спускания баллона. Перед извлечением дилатационного катетера следует ослабить гемостатический клапан Y-образного коннектора.
- Пока проводник находится в сосуде, извлеките катетер по прямой, вдоль проводника.
- Не извлекайте катетер, если он погнут у Y-образного коннектора. При попытке извлечения погнутого катетера на зону возле порта проводника воздействует избыточное давление, которое может поврелить катетер.
- 5-3 Если положительные изменения стеноза недостаточны, постепенно повысьте давление в баллоне до расчетного давления разрыва, либо многократно подавайте давление до достижения положительной динамики. Как правило, многократное раздувание баллона вызывает достаточные положительные изменения стеноза, которые можно подтвердить коронарографией.

6. Замена дилатационного катетера

- 6-1 Ослабьте гемостатический клапан Y-образного коннектора.
- 6-2 Держите проводник и гемостатический клапан одной рукой, а катетер другой.
- 6-3 Извлеките дилатационный катетер, не нарушая положение проводника в зоне поражения. Протрите поверхность проводника во избежание проблем при установке следующего катетера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке или замене дилатационного катетера следует протирать проводник марлей, смоченной физиологическим раствором. Осмотрите проводник целиком чтобы убедиться в отсутствии посторонних веществ, а также в том, что смазочная функция поверхности не уменьшилась. Продвижение катетера по наполовину смоченному или содержащему подобные остатки проводнику может привести к разрыву катетера. Это может привести к необходимости извлечения фрагментов катетера.

ВНИМАНИЕ

Во время замены катетера контролируйте положение проводника с помощью флюороскопии с высоким разрешением.

6-4 Введите следующий катетер с проксимального конца проводника, согласно инструкции выше, не нарушая при этом положение проводника в зоне поражения.

ВНИМАНИЕ

Если вы используете не катетер Ryurei, а другой катетер, прочтите прилагающиеся к нему инструкции изготовителя.

6-5 Выполните инструкции из пункта «Введение дилатационного катетера» после этапа 4-7, а затем раздуйте/замените дилатационный катетер.

7. Извлечение дилатационного катетера

После завершения дилатации полностью сдуйте баллон и извлеките дилатационный катетер и проводник, ослабив гемостатический клапан. Рекомендуется некоторое время после процедуры держать проводник на месте, тем самым обеспечивая готовность к возможным непредвиденным ситуациям. Чтобы безопасно и правильно утилизировать извлеченный дилатационный катетер, используйте зажим катетера в соответствии с "Указаниями по использованию зажима катетера и складывающего инструмента".

8. Указания по использованию зажима катетера и складывающего инструмента

- 8-1 Указания по использованию зажима катетера
 - 1. Извлеките зажим катетера из держателя.
 - 2. Сверните дилатационный катетер для транслюминальной коронарной ангиопластики в виде одинарной или двойной петли (Рис. 1).

ВНИМАНИЕ

Соблюдайте осторожность во избежание излома и разрыва дилатационного катетера для транслюминальной коронарной ангиопластики при формировании петель.

- 3. Закрепите свернутый дилатационный катетер ЧТКА с помощью зажима катетера, выполнив следующие действия:
 - Зацепите кончик зажима катетера за дилатационный катетер ЧТКА (рис. 2).
 - Закрепите дилатационный катетер ЧТКА на другом конце зажима катетера (рис. 3).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ П

Закрепите дилатационный катетер ЧТКА с помощью зажима катетера на более жестком проксимальном конце. Не используйте зажим катетера на гибком дистальном шафте или порте проводника ЧТКА дилатационных катетеров типа ЧТКА с быстрой заменой, так как это может привести к повреждению дилатационного катетера ЧТКА.

4. При снятии зажима катетера со свернутого дилатационного катетера ЧТКА повторите описанные выше действия в обратном порядке (рис. 3 - рис. 2).

ВНИМАНИЕ

Действуйте осторожно, чтобы шафт не перекрутился и не сорвался во время снятия зажима катетера.

8-2 Инструкции по применению складывающего инструмента

ВНИМАНИЕ

Складывающий инструмент рекомендуется использовать при помещении катетера в чашу физиологическим раствором. Не используйте повторно защитную оболочку баллона, которая находится на катетере.

Несоблюдение этого предупреждения может привести к тому, что баллон не будет надуваться из-за деформации баллона и повреждения шафта.

- 1. Отделите складывающий инструмент от комплектационного листа.
- 2. Вставьте стилет внутрь складывающего инструмента.
- 3. Полностью сдуйте баллон.
- 4. Осторожно вставьте стилет и складывающий инструмент с кончика катетера, чтобы покрыть сдувшийся баллон.

ВНИМАНИЕ


He применяйте силу, вставляя баллон в складывающий инструмент. Слегка перекрутите баллон, чтобы вставить аккуратно.


5. При использовании катетера осторожно извлеките стилет и складывающий инструмент, чтобы не повредить баллон.

ВНИМАНИЕ

При возникновении сопротивления не извлекайте складывающий инструмент, применяя силу. Извлечение с применением силы может привести к тому, что баллон не будет надуваться или сдуваться.



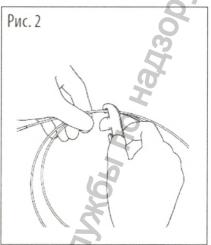

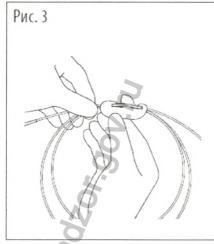

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ

Хранить в прохладном, темном, сухом месте.

СПРАВКИ

Врачу следует ознакомиться с современной медицинской литературой, затрагивающей вопросы дилатации катетера, такие как, например, публикуемые Американским колледжем кардиологии или Американской кардиологической ассоциацией (АСС/АНА).

ОТЧЕТ ОБ ИНЦИДЕНТЕ

Если во время использования данного устройства или в результате его использования произошел серьезный инцидент, сообщите об этом производителю и/или его уполномоченному представителю, а также в свой орган государственной власти.

РЕЗЮМЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (SSCP)

Сводную информацию по безопасности и клиническим показателям (SSCP) можно найти на сайте https://ec.europa.eu/tools/eudamed (BASIC UDI-DI:498735026DCRRLU).

[На бланке компании «Терумо Корпорейшн»]

«ТЕРУМО КОРПОРЕЙШН» (TERUMO CORPORATION)

Офис в Хатагая

2-44-1 Хатагая, Сибуя-ку, Токио, 151-0072 Япония (2-44-1 Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0072 Japan) Телефон: 81-3-3374-8111 Факс: 81-3-3374-8399

Офис в Токио

Токио Опера Сити Тауэр 49 этаж, 3-20-2, Ниси-Синдзюку, Синдзюку-ку, Токио, 163-1450 Япония (Tokyo Opera City Tower 49F, 3-20-2, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 163-1450 Japan)

Телефон: +81 3 6742 8500 Факс: +81 3 6742 8770

Дата: 28 ноября 2024 г.

Для предъявления по месту требования

ЗАЯВЛЕНИЕ

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ В РОССИИ.

Мы, компания «Терумо Корпорейшн» Terumo Corporation, 44-1, 2-chome, Hatagaya Shibuya-Ки, Токуо, 151-0072 Japan), настоящим заявляем, что прилагаемая Инструкция по применению является верной.

С уважением,

/подпись/

Ёсихиро Добаси Генеральный директор Отдел нормативно-правового регулирования «ТЕРУМО КОРПОРЕЙШН»

[Печать компании «Терумо Корпорейшн»]

Регистрационный № 1029 | 2024 г.

Нотариальное свидетельство

Сегодня, 05 декабря 2024 г., ТАКАХАСИ Ариса лично явилась ко мне, ТАНАКЕ Тосио, нотариусу Бюро по юридическим вопросам г. Токио, предъявила убедительные доказательства, удостоверяющие ее личность и факт того, что она является представителем ДОБАСИ Ёсихиро, генерального директора отдела нормативно-правового регулирования компании «ТЕРУМО КОРПОРЕЙШН», и в соответствии с Японским законом о нотариате заявила, что доверитель, упомянутый ДОБАСИ Ёсихиро, подтверждает факт проставления своей подписи и печати на прилагаемом документе.

В свидетельство чего, я ставлю свою подпись и печать

<u>/по∂пись/</u> ГАНАКА Тосио

[Печать нотариуса]

[Печать: Бюро по юридическим вопросам г. Токио Нотариус 1-9-4 Кадзитё, Тиёда-ку Токио, Япония]

Нотариальное свидетельство

ТАКАХАСИ Ариса, представитель ДОБАСИ Ёсихиро, генерального директора отдела нормативно-правового регулирования компании «ТЕРУМО КОРПОРЕЙШН», в присутствии нотариуса заявила, что вышеупомянутый ДОБАСИ Ёсихиро подтверждает факт проставления своей подписи и печати на прилагаемом документе.

Вышесказанное засвидетельствовано. 05 декабря 2024 г., в настоящем нотариальном бюро Токио, Тиёда-ку, Кадзитё, 1-9-4 Бюро по юридическим вопросам г. Токио Нотариус /nodnucь/

[Печать нотариуса]

