



ООО «М.К. Асептика»

ОГРН 1027700317941

111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 9,  
строение 3, помещение 2

Тел.: +7(495) 660-18-00 , [www.aseptica.ru](http://www.aseptica.ru)

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор ООО «М.К. Асептика»  
О.А. Пелехатая  
«20» февраля 2019 г.



### Инструкция по применению медицинского изделия

#### Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные "М.К.Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00

**Общие сведения:** Салфетки представляют собой основу из бумажного текстилеподобного материала, пропитанную 70% этиловым спиртом и упакованную в комбинированный материал. Обладают дезинфицирующим действием. Выпускаются в стерильном виде.

**Состав:** нетканый текстилеподобный материал, пропитанный 70% этиловым спиртом.

**Назначение:** предназначены для санации кожи до и после инъекций, дезинфекционной обработки мелких травм кожи, рук медицинского персонала и рабочих поверхностей.

#### Показания к применению:

Салфетки спиртовые предназначены для местного применения в качестве антимикробного и стерилизующего средства для обработки неповрежденной кожи (дезинфекции рук, подготовки операционного поля, мест проколов до и после постановки инъекций, заборов крови и др.), обработки инструментов и других поверхностей.

**Возможные побочные действия:** раздражающее действие или аллергическая реакция в связи с индивидуальной непереносимостью пациента.

**Область применения:** Салфетки могут быть использованы в больничных, поликлинических, полевых условиях и быту.

**Противопоказания к применению:** не применять при индивидуальной непереносимости этилового спирта.

**Меры предосторожности:** Не обрабатывать салфетками слизистые оболочки. Использовать только для наружного применения. Не применять в случае нарушения целостности первичной упаковки.

#### Способ применения:

Вскрыть упаковку, развернуть салфетку, обработать поверхность.

При необходимости повторить манипуляцию новой салфеткой.

Салфетка является одноразовой и не подлежит повторному использованию.

#### Условия хранения:

Хранить при температуре от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  в недоступном для детей месте.

Не допускать воздействия на упаковку прямых солнечных лучей.

**Способ утилизации:** как отходы класса Б по СанПиН 2.1.7.2790-10

**Срок годности:** 5 лет с даты, указанной на упаковке.

**Производитель/Организация, принимающая претензии:** ООО «М.К. Асептика», Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 9, стр. 3, пом. 2.

**Адрес производства:** Россия, 140032, Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40

**Сайт:** [www.aseptica.ru](http://www.aseptica.ru); **Электронная почта:** [mk@aseptica.ru](mailto:mk@aseptica.ru)

**Условия отпуска из аптек:** отпускается без рецепта врача.

**Произведено по ТУ 9393-001-51276525-00**

**Регистрационное удостоверение:** ФСР 2009/05438 от 26.07.2016г.







- Салфетка антисептическая из бумажного текстилеподобного материала стерильная «М.К.Асептика» спиртовая (70% этиловый спирт), размер 220 x 400мм.
- Салфетка антисептическая из бумажного текстилеподобного материала стерильная «М.К.Асептика» спиртовая (70% этиловый спирт), размер 230 x 300мм.
60. Салфетка антисептическая из бумажного текстилеподобного материала стерильная «М.К.Асептика» спиртовая (70% этиловый спирт), размер 240 x 240мм.

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

[www.gosdrazhnadzor.gov.ru](http://www.gosdrazhnadzor.gov.ru)

Всего прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 4 лист  
(ов)

Генеральный директор

ООО "М.К. Асептика"

О.А. Пелехатая

" 20 " февраля 20 19 г.



Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

[www.gosdrazhnadzor.gov.ru](http://www.gosdrazhnadzor.gov.ru)