



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО "Белпа-мед"

Политико О.К.

18 января 2006 года

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия "Бинт медицинский эластичный тканый",
ТУ РБ 800007404.007-2003

Бинт медицинский эластичный вязаный предназначен для профилактики и лечения хронической венозной недостаточности, тромбозболии в до и послеоперационный период, травматических отеков, посттравматических осложнений, удержания эндопротезов в стабильном состоянии при пластических операциях.

Бинт надежно фиксируется на конечностях больного путем последовательного кольцеобразного накручивания, при этом последний виток расправляют от складок и подсовывают под предыдущий. Возможна фиксация последнего витка при помощи металлической клипсы, состоящей из двух металлических замков, соединенных между собой отрезком бельевой резинки. Бинт изготавливается разной длины и ширины из хлопчатобумажной пряжи. Размер изделия обозначается на этикетке-вкладыше в упаковке. Бинт не вызывает аллергических и других побочных эффектов при контакте с кожей больного.

Стирать бинт необходимо в ненасыщенном мыльном растворе (10 г. мягкого моющего средства на 200 см. куб. воды) при температуре не более 40 град. Цельсия в течение 10-ти минут в режиме свободного полоскания без сильного трения и выкручивания. Полощут изделие в объеме воды не менее 3000 см. куб. при температуре не более 20 град. Цельсия. Отжимать не выкручивая, сушить раскладывая на горизонтальной поверхности вдали от источников тепла. Не гладить.

Разработал:
Шендеров И.М.