



«Утверждаю»
Ген. директор ООО «Целит»
Л.Г. Андреева
«16» августа 2012г.

Руководство по эксплуатации
ЖИДКОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ДЛЯ АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ПОЛОСТИ РТА
«ДЕНТАСЕПТИН»
ТУ 9391-017-10614163-2012

НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкость «Дентасептин» предназначена для антисептической обработки полости рта пациента перед стоматологическим приёмом, перед снятием слепков, до и после хирургических вмешательств.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стоматологическая жидкость «Дентасептин» оказывает противомикробное, гемостатическое, противовоспалительное действие на слизистую полости рта и пародонта в целом.

В состав входят:

- дезин (хлоргексидин), который обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, дрожжеподобных грибов рода Кандида;
- квасцы алюмокалиевые, обладающие гемостатическим действием;
- пенообразователь, вода дистиллированная.

Обладает хорошей переносимостью. Не вызывает общих и местных аллергических реакций.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕТЯМ ДО 6 ЛЕТ без специального предписания стоматолога.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Стоматологическая жидкость «Дентасептин» применяется без разбавления.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Налить в мерный стаканчик стоматологической жидкости «Дентасептин» в количестве 20–25 мл и прополоскать полость рта в течение - 30 секунд.
Внимание! Жидкость не глотать.

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость (флакон) - 250±5 г;
Этикетка-рекомендация по применению - 1 шт.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 °С до +25° С в сухом прохладном месте.

СРОК ГОДНОСТИ: 18 месяцев

Главный технолог:



/О.Н. Шалеев/

Главный врач
стоматологической поликлиники
ВГМА им. Н.Н.Бурденко
профессор



/А.В.Сущенко/

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 2 (два) листов

Генеральный директор



Федеральной службы по надзору в сфере

www.roszdravnadzor.ru